



ORLIMAN®





ACCOMPAGNATEUR EN MOUVEMENT

Présent dans de nombreux pays européens et plus particulièrement en France et en Espagne, **Orliman® développe diverses solutions orthopédiques et se positionne comme un acteur incontournable de l'aide à la mobilité.** Nous vous proposons une offre complète répondant aux pathologies communes (chroniques ou traumatiques telles l'arthrose, les tendinites ou les fractures...) mais aussi plus spécifiques (tennis elbow, entorse de Chopart...). La gamme générale est complétée par des solutions dédiées aux enfants, aux sportives et sportifs, aux femmes enceintes ou encore répondant aux morphologies des personnes en surpoids.

Expliquer, montrer, informer...
en un mot : ACCOMPAGNER !

Afin de toujours plus accompagner vos patients et de maximiser leur observance, nous mettons un point d'honneur à les placer au centre de toutes nos actions. Nous apportons également une attention particulière à votre accompagnement, cher partenaire, en vous proposant **une offre globale adaptée à votre activité mais aussi de nombreux outils tel que l'outil d'aide à la vente et de suivi des formations personnalisées.**

Les tarifs de remboursement et/ou les codes LPPR indiqués sur ce document correspondent à ceux en vigueur au moment de sa date d'édition. En cas de modification du montant de remboursement et/ou des codes LPPR en cours d'année, nous vous conseillons de bien vouloir vérifier les nouveaux tarifs et/ou codes LPPR en vigueur.

NOS FORCES

La triple condition !

Toutes nos solutions font l'objet d'une attention particulière pour apporter une réponse à une pathologie tout en facilitant la délivrance et en prenant en considération l'expérience du patient.

C'est grâce à l'association de ces trois critères que nous apportons une meilleure expérience au comptoir.

1

Pathologie

Une offre complète répondant aux **pathologies communes** mais aussi **plus spécifiques**.

2

Expérience patient

Des familles de produits répondant aux attentes de vos patients :
Facile à mettre, Évolutif, Légèreté, Tendance...

3

Facilité de délivrance

Des **taillants uniques ou limités** s'adaptant à toutes les morphologies pour faciliter la mise en place... et la gestion de vos stocks !

Le patient au cœur de nos solutions.

- ✓ Matériaux confortables & solutions ergonomiques pour **faciliter leur observance**.
- ✓ Produits adaptés à leurs contraintes quotidiennes pour **permettre la mobilité**.
- ✓ Produits adaptés à leurs besoins spécifiques pour une **délivrance précise**.



Votre site professionnel pro.orklman.fr



Pour vous accompagner au quotidien dans l'univers des produits et services Orliman®, nous mettons à votre disposition un site professionnel dédié. Vous y trouverez nos actualités, nos campagnes de communication pour animer votre point de vente, des arbres de décision pour faciliter la délivrance, des formations à l'orthopédie...

Identifiant

Mot de passe



Scannez-moi

pour accéder directement aux arbres de décision et trouver le produit adapté en 3 clics !

Une offre de services adaptée à votre activité.



COMMANDE TÉLÉPHONIQUE

Horaires : 8h45 - 18h30
sans interruption.



COMMANDE EN LIGNE

Pharma ML.



SERVICE LIVRAISON PERFORMANT

Commande jusqu'à 16h30.
Livraison avant 12h30 le lendemain.

AVEC NOUS, CRÉEZ LA DIFFÉRENCE !

Que pouvons-nous vous apporter de plus ?

1. Analyse et recommandations 05



Évaluer les points clés de l'activité orthopédique & les grandes tendances.
Établir ensemble un plan d'action stratégique adapté à votre performance, à la physiologie de votre officine & aux besoins de votre patientèle.

2. Formation 09



Développer des supports de formation sur l'anatomie, les pathologies et les profils des patients.
Fournir des outils du quotidien.
Accompagner avec des guides complets pour aider votre délivrance.

3. Visibilité 33



Développer des stratégies de communication personnalisées (pathologies, saisonnalité, cible...).
Fournir des outils de mise en avant & de clarification de l'offre.
Mettre en place des campagnes thématiques ciblées.

4. Offre produits 47



Proposer une offre complète pour répondre aux pathologies communes, mais aussi spécifiques.
Apporter des solutions dédiées aux enfants, sportifs, femmes enceintes ou encore aux personnes en surpoids ou aux morphologies atypiques.

1. Analyse et recommandations



1.1 Analyse de la performance

Qui êtes-vous ?

Acteur +++ en Orthopédie

Vous êtes force de proposition au comptoir.

- **Vous disposez d'une offre de produits complète répondant aux pathologies communes et spécifiques.**
Vous pouvez adapter votre délivrance en fonction des besoins et du profil de vos patients.
- **Expert en orthopédie, vous réalisez une prise en charge globale.**
Vous êtes capable d'identifier différents cas de comptoir et vous captez de nouvelles cibles qui arrivent à la pharmacie sans prescription de produits d'orthopédie.
Vous savez conseiller les patients, vous êtes acteur de votre activité.

Acteur + en Orthopédie

Vous savez répondre à la prescription avec une bonne délivrance.

- **Vous disposez d'une offre de produits adaptée répondant aux pathologies communes.**
- **Vous êtes en mesure de réaliser une prise de mesure et de poser les produits que vous référencez.**

Acteur ++ en Orthopédie

Vous êtes engagé dans la délivrance des produits d'orthopédie.

- **Vous disposez d'une offre de produits plus large et vous pouvez adapter votre délivrance en fonction des besoins de vos patients.**
- **La prise de mesure et la mise en place des produits n'ont plus de secrets pour vous !**
Vous connaissez l'anatomie des différentes articulations, leurs rôles et les pathologies associées.
Vous comprenez le but de chaque produit par rapport à la pathologie, à la cible patient et à l'action mécanique du produit.
Vous pouvez mener un entretien patient afin d'adapter votre délivrance en fonction de ses besoins.



Où en êtes-vous ?

Potentiel Ortho

Évolution des ventes (en unités)

Catégorie	Année N-1	Potentiel Annuel	Rdv n°1 le ... / ... /	Rdv n°2 le ... / ... /	Rdv n°3 le ... / ... /	Rdv n°4 le ... / ... /	Rdv n°5 le ... / ... /
Ceinture lombaire							
Ceinture abdominale							
Collier cervical							
Chevillère de compression pure							
Chevillère avec adjonction							
Attelle de cheville rigide							
Genouillère de compression pure							
Genouillère avec adjonction							
Genouillère articulée							
Attelle d'immobilisation du genou							
Épaule, Clavicule, Botte, Releveur							
Coudière, Tennis-elbow							
Main							
Poignet (traumatique)							
Poignet (chronique)							
Poignet-pouce (traumatique)							
Poignet-pouce (chronique)							
Pouce (traumatique)							
Pouce (chronique)							
Sport							
Skintape							
Podologie							
CHUT							
Total CA							
		Trend					

1.2 | Suivi des rendez-vous

Date	Objectifs	Recommandations
... / ... /	<p>.....</p>	<p>.....</p>
... / ... /	<p>.....</p>	<p>.....</p>
... / ... /	<p>.....</p>	<p>.....</p>
... / ... /	<p>.....</p>	<p>.....</p>
... / ... /	<p>.....</p>	<p>.....</p>

2. Formation



Plan de formation 2.1 | personnalisé

Pour vous accompagner jour après jour dans l'univers des produits et services Orliman®, nous avons développé un plan de formation personnalisable en 3 niveaux qui vous aidera à mieux conseiller vos patients et à maximiser leur observance.

Étape #1

Ensemble, réalisons un audit pour évaluer votre niveau d'expertise et analyser vos performances.

Êtes-vous un niveau 1, 2 ou 3 en orthopédie ? Quels sont vos objectifs de développement ?



Niveau 1

Vous savez répondre à la prescription avec la délivrance appropriée.

Niveau 2

Vous êtes engagé dans la délivrance des produits d'orthopédie. Vous comprenez le but de chaque produit par rapport à la pathologie, au profil patient et à l'action mécanique du produit.

Niveau 3

Vous êtes force de proposition au comptoir en développant la délivrance de produits d'orthopédie et en captant de nouvelles cibles qui arrivent à la pharmacie sans prescription. Vous savez conseiller les patients, vous êtes acteur de votre activité.



Étape #2

Planifions votre plan de formation, actions et validation d'acquis pour atteindre vos objectifs.



Étape #3

Pas-à-pas, suivons votre évolution et regardons votre progression !

À l'aide de notre outil d'analyse & recommandations (page 5), suivons un plan d'action adapté à votre performance, à la physiologie de votre officine et aux besoins de votre patientèle. De l'évolution des ventes au suivi de recommandation, cet outil vous accompagne lors de vos rendez-vous avec votre technico-commercial(e).

LE GUIDE DE FORMATION

Au cœur de notre plan de formation personnalisable en 3 niveaux, pour mieux conseiller vos patients et maximiser leur observance :

- ✓ Rappels anatomiques
- ✓ Fiches pathologies
- ✓ Cas de comptoir
- ✓ Guides d'aide à la délivrance

Renseignez-vous auprès de votre technico-commercial(e) pour connaître les conditions d'attribution.



Niveau 2 : Comprendre l'orthopédie.

Connaître l'anatomie, les différentes pathologies, comprendre les principes mécaniques des attelles et maîtriser les arbres décisionnels.

Connaissez-vous l'anatomie et les différentes pathologies ? Oui Non

Savez-vous expliquer les principes mécaniques des attelles ? Oui Non

Savez-vous utiliser les arbres décisionnels pour délivrer les produits ? Oui Non



Programmons ensemble des sessions de formation adaptées à vos besoins :

	Session n°1	Session n°2	Session n°3
Date / / / / / /
Thèmes abordés	<input type="radio"/> Main <input type="radio"/> Ceintures lombaires <input type="radio"/> Genou <input type="radio"/> Cheville <input type="radio"/> Arthrose <input type="radio"/> Lombalgie <input type="radio"/> Entorse <input type="radio"/> Tendinite <input type="radio"/> Arbres décisionnels <input type="radio"/> Anatomie	<input type="radio"/> Main <input type="radio"/> Ceintures lombaires <input type="radio"/> Genou <input type="radio"/> Cheville <input type="radio"/> Arthrose <input type="radio"/> Lombalgie <input type="radio"/> Entorse <input type="radio"/> Tendinite <input type="radio"/> Arbres décisionnels <input type="radio"/> Anatomie	<input type="radio"/> Main <input type="radio"/> Ceintures lombaires <input type="radio"/> Genou <input type="radio"/> Cheville <input type="radio"/> Arthrose <input type="radio"/> Lombalgie <input type="radio"/> Entorse <input type="radio"/> Tendinite <input type="radio"/> Arbres décisionnels <input type="radio"/> Anatomie
Personnes présentes
Notes / Questions

Niveau 3 : Être force de proposition.

Détecter des signaux d'alerte au comptoir, maîtriser le conseil associé en orthopédie et répondre aux demandes des sportifs, femmes enceintes...

Savez-vous détecter les signaux d'alerte au comptoir ? Oui Non

Faites-vous du conseil associé en orthopédie ? Oui Non

Avez-vous des demandes de sportifs ? de femmes enceintes ? de personnes en surpoids ? Oui Non

Vous avez répondu OUI à toutes les questions

Bravo, l'orthopédie n'a plus de secret pour vous !

Vous avez répondu NON à une question ou plus

Programmons ensemble des sessions de formation adaptées à vos besoins :

	Session n°1	Session n°2	Session n°3
Date / / / / / /
Thèmes abordés	<input type="radio"/> Main <input type="radio"/> Ceintures lombaires <input type="radio"/> Genou <input type="radio"/> Cheville <input type="radio"/> Arthrose <input type="radio"/> Lombalgie <input type="radio"/> Entorse <input type="radio"/> Tendinite <input type="radio"/> Femme enceinte <input type="radio"/> Sportif <input type="radio"/> Personne en surpoids <input type="radio"/> Reprise d'activité	<input type="radio"/> Main <input type="radio"/> Ceintures lombaires <input type="radio"/> Genou <input type="radio"/> Cheville <input type="radio"/> Arthrose <input type="radio"/> Lombalgie <input type="radio"/> Entorse <input type="radio"/> Tendinite <input type="radio"/> Femme enceinte <input type="radio"/> Sportif <input type="radio"/> Personne en surpoids <input type="radio"/> Reprise d'activité	<input type="radio"/> Main <input type="radio"/> Ceintures lombaires <input type="radio"/> Genou <input type="radio"/> Cheville <input type="radio"/> Arthrose <input type="radio"/> Lombalgie <input type="radio"/> Entorse <input type="radio"/> Tendinite <input type="radio"/> Femme enceinte <input type="radio"/> Sportif <input type="radio"/> Personne en surpoids <input type="radio"/> Reprise d'activité
Personnes présentes
Notes / Questions

Mémo

2.2 | Articulations

L'articulation est le point de jonction entre deux os. Elle les relie et leur donne éventuellement une mobilité l'un par rapport à l'autre. La forme et la nature de l'articulation déterminent l'amplitude de cette mobilité et permettent de les classer en trois types :

LES ARTICULATIONS

fixes

Appelées **synarthroses** ou **jointures fibreuses**, elles ne permettent pas (ou très peu) le mouvement. Les surfaces osseuses sont solidement unies par du tissu conjonctif.

EXEMPLES : ARTICULATIONS RELIANT LES OS DU CRÂNE.

LES ARTICULATIONS

semi-mobiles

Appelées **amphiarthroses**, elles permettent un mouvement limité. Les surfaces osseuses sont unies par une structure mixte fibreuse et fibrocartilagineuse renforcée par des ligaments périphériques.

EXEMPLES : VERTÈBRES, SYMPHYSE PUBIENNE.



LES ARTICULATIONS


mobiles

Appelées **articulations synoviales**, elles permettent des mouvements étendus. Elles sont caractérisées par l'existence d'une cavité articulaire et d'une membrane synoviale. Ce sont les plus élaborées de l'organisme et constituent la majorité des articulations des membres. Elles sont formées par des surfaces articulaires osseuses ou fibrocartilagineuses et par des moyens d'union.

EXEMPLES : GENOUX, POIGNETS, ÉPAULES...

LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D'UNE ARTICULATION

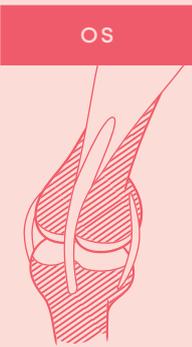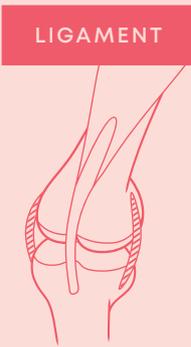OS	MUSCLE	LIGAMENT
		
Les os forment le squelette et structurent le corps humain.	Le muscle produit l'énergie nécessaire au mouvement de l'articulation.	Le ligament relie deux os d'une articulation pour guider le mouvement mais aussi le limiter.
FRACTURE	ÉLONGATION CLAQUAGE	ENTORSE
↓		
PATHOLOGIES TRAUMATIQUES		

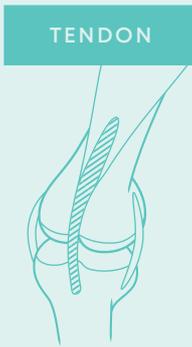TENDON	CARTILAGE
	
Le tendon transfère le mouvement produit par les muscles aux os de l'articulation.	Le cartilage facilite le mouvement entre deux os tout en les protégeant de contacts trop violents.
TENDINITE	ARTHROSE
↓	
PATHOLOGIES CHRONIQUES	

Mémo


2.2 | Symptômes / Pathologies

PRINCIPAUX SYMPTÔMES	 GENOU	 CHEVILLE	 POIGNET	 DOIGTS	 DOS
Œdème	Entorse, Luxation. Tendinite, Arthrose (crise inflammatoire).	Entorse, Fracture. Rupture du tendon d'Achille. Tendinite, Arthrose (crise inflammatoire).	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose (crise inflammatoire).	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose (crise inflammatoire).	Arthrose (crise inflammatoire).
Hématome	Entorse, Fracture, Luxation.	Entorse, Fracture.	Entorse, Fracture, Luxation.	Entorse, Fracture, Luxation.	
Inflammation	Tendinite, Arthrose, Syndrome fémoropatellaire.	Tendinite, Arthrose.	Tendinite, Arthrose.	Tendinite, Arthrose.	Lumbago. Hernie discale. Sciatique, Cruralgie, Arthrose.
Contracture musculaire					Lumbago. Lombalgie.
Fourmillements / engourdissements			Syndrome du canal carpien.	Syndrome du canal carpien.	Hernie discale. Sciatique, Cruralgie.
Douleur	Toutes les pathologies traumatiques et chroniques.	Toutes les pathologies traumatiques et chroniques.	Toutes les pathologies traumatiques et chroniques.	Toutes les pathologies traumatiques et chroniques.	Toutes les pathologies traumatiques et chroniques.
Douleur aiguë	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose (crise inflammatoire).	Entorse, Fracture. Rupture du tendon d'Achille. Arthrose (crise inflammatoire).	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose (crise inflammatoire).	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose (crise inflammatoire).	Lumbago, Fracture, Tassement vertébral. Arthrose (crise inflammatoire).
Douleur irradiante					Tassement vertébral. Sciatique, Cruralgie.
Douleur nocturne	Tendinite, Arthrose.	Tendinite.	Arthrose, Syndrome du canal carpien, Tendinite.	Arthrose, Syndrome du canal carpien.	Arthrose.
Déformation de l'articulation	Fracture, Luxation. Arthrose.	Fracture. Arthrose.	Fracture, Luxation. Arthrose.	Fracture, Luxation. Arthrose.	
Gêne / perte fonctionnelle articulaire	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose.	Entorse, Fracture. Rupture du tendon d'Achille. Steppage, Arthrose.	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose.	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose.	Fracture, Lumbago. Discopathie, Lombalgie. Arthrose.
Raideur articulaire	Arthrose.	Arthrose.	Arthrose.	Arthrose.	Hernie discale, Discopathie. Arthrose.
Perte de force		Steppage.	Syndrome du canal carpien.		
Perte de sensibilité		Steppage.	Syndrome du canal carpien.	Syndrome du canal carpien.	Discopathie. Sciatique, Cruralgie.

■ TRAUMATIQUE ■ CHRONIQUE ■ TRAUMATIQUE & CHRONIQUE


Mémo

2.2 | Principes mécaniques

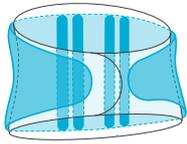


AUGMENTATION DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE

Obtenir une correction posturale correcte par des baleines dorsales et/ou un système de rappel postural.

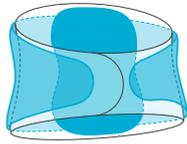


RÉDUCTION DU PÉRIMÈTRE ABDOMINAL

Apporter un effet corset par une coque rigide et un système de serrage type corset.

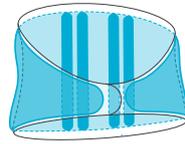


SOUTIEN MUSCULAIRE DURANT LA GROSSESSE

Transférer le poids du bébé sur les hanches par des baleines dorsales et un système de rappel postural.

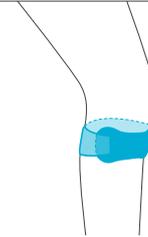

MISE AU REPOS DU TENDON

Maintenir et protéger le tendon par des dispositifs tels qu'une sangle de serrage, une éclisse, une matière compressive ou un pad silicone.

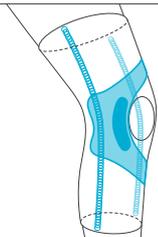

LIMITATION DES FROTTEMENTS OSSEUX

Cloisonner un ou plusieurs os d'une articulation dans une position spécifique par des dispositifs tels qu'un insert en silicone, une éclisse ou une articulation dynamique.




COMPENSATION DE LA FONCTION ARTICULAIRE

Améliorer la mobilité par un support de maintien à angle droit.




SOUTIEN / MAINTIEN DE L'ARTICULATION

Mettre au repos l'articulation et limiter ses mouvements par des éclisses.

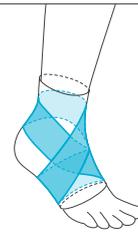

LIMITATION DE L'AMPLITUDE ARTICULAIRE

Limiter le mouvement dans un axe de l'articulation par un système de strapping (sangles élastiques).

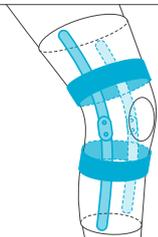

IMMOBILISATION RELATIVE DE L'ARTICULATION

Empêcher le mouvement dans un plan (sans bloquer les autres mouvements) par des cadrans articulés, des ressorts spiralium ou des coques latérales.



IMMOBILISATION STRICTE DE L'ARTICULATION

Mettre en position physiologique et empêcher tous les mouvements d'une articulation (flexion, extension, rotation, torsion...) par des éclisses.

2.3 Anatomie

Tronc & Rachis

CONNAÎTRE L'ESSENTIEL POUR BIEN L'EXPLIQUER

LA COLONNE VERTÉBRALE

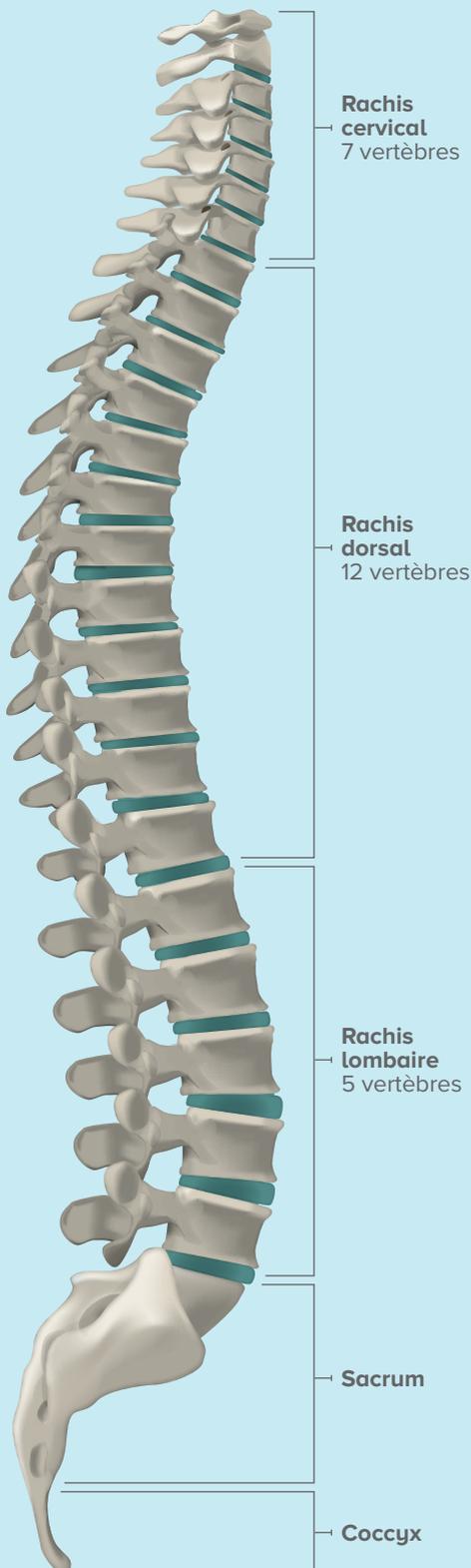


Fig. Colonne vertébrale, vue latérale.

LES VERTÈBRES

Les vertèbres sont des éléments mobiles selon certains axes et certaines amplitudes. Elles supportent des efforts très importants.

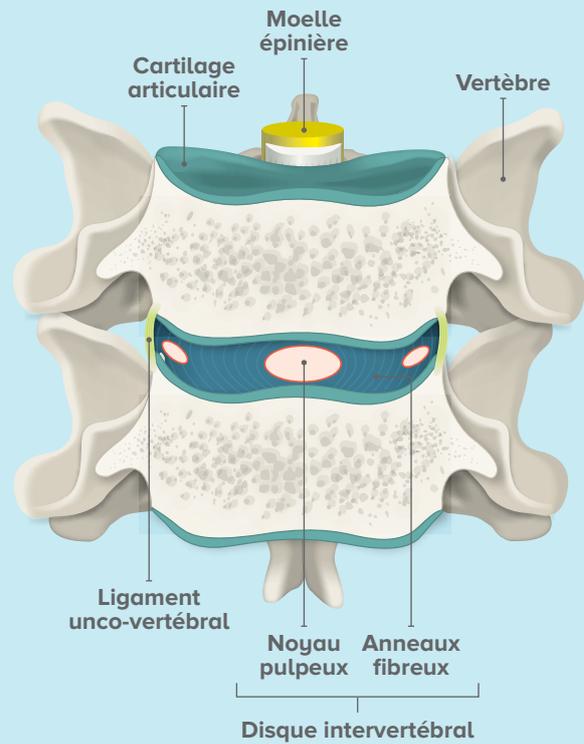


Fig. Articulation unco-vertébrale, coupe frontale.

LES MUSCLES ABDOMINAUX

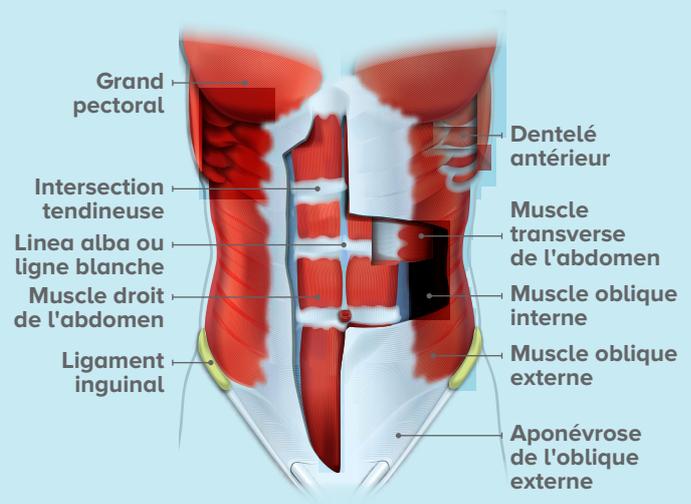


Fig. Muscles abdominaux, vue antérieure.

2.3 Anatomie Épaule & Bras

CONNAÎTRE L'ESSENTIEL POUR BIEN L'EXPLIQUER

L'ÉPAULE

L'épaule est composée de trois os : la Clavicule ①, l'Omoplate ② et l'Humérus ③. La mobilité de l'épaule est assurée principalement par le muscle deltoïde, qui apporte la puissance, et par les muscles de la coiffe, qui initient le mouvement et stabilisent la tête de l'humérus. La coiffe des rotateurs est le nom donné à l'ensemble des tendons situés au-dessus de la tête de l'humérus.

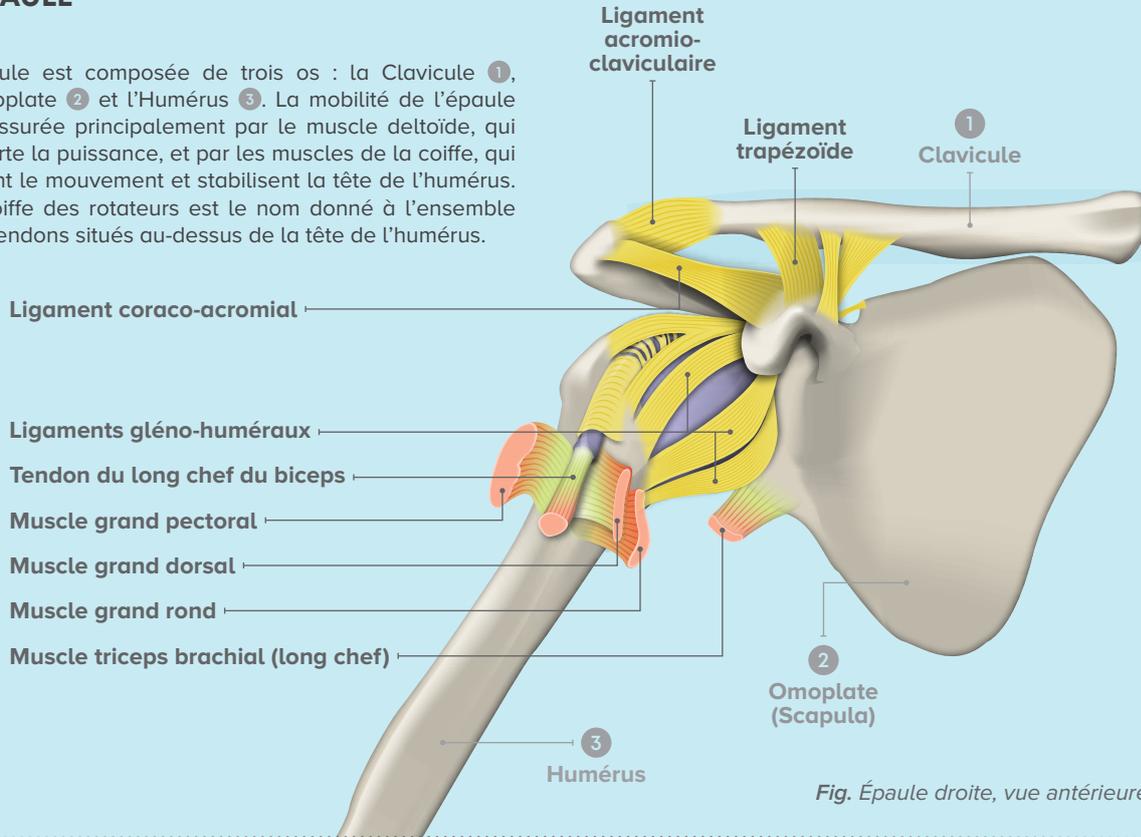


Fig. Épaule droite, vue antérieure.

LE COUDE

Le coude est l'articulation du membre supérieur permettant la flexion/extension de l'avant-bras par rapport au bras et la pronation/supination de l'avant-bras. Il est composé de trois os reliés entre eux : le Radius ①, le Cubitus ② et l'Humérus ③.

En position anatomique de référence (bras aligné le long du corps, paume de la main vers l'avant), le coude est en extension complète et la main en supination. En flexion, le coude peut quasiment fermer l'angle formé entre le bras et l'avant-bras.


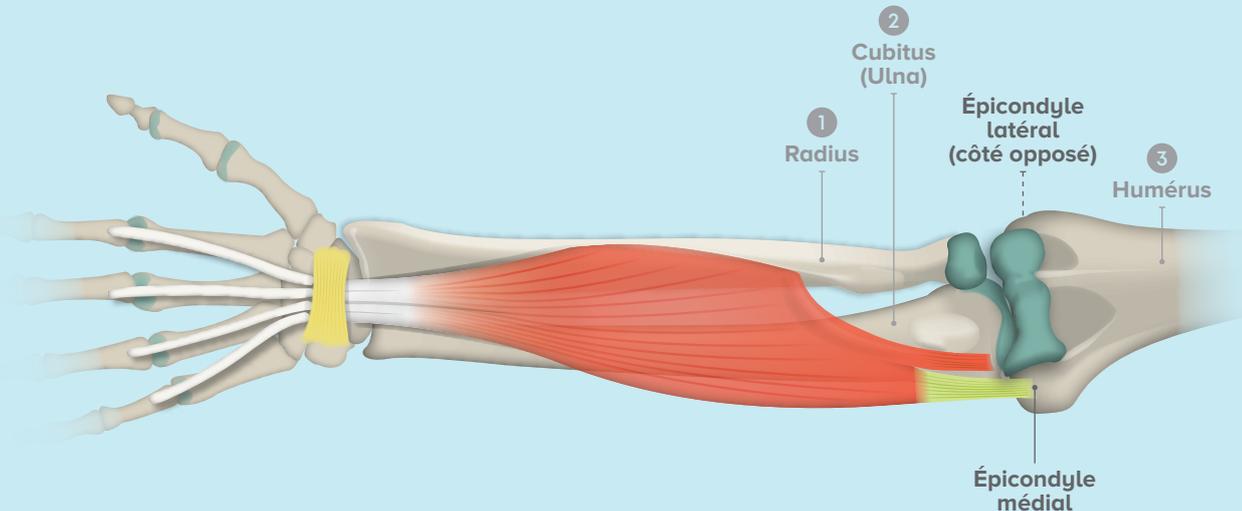


Fig. Bras droit, vue antérieure.

2.3 Anatomie Poignet & Main


CONNAÎTRE L'ESSENTIEL POUR BIEN L'EXPLIQUER

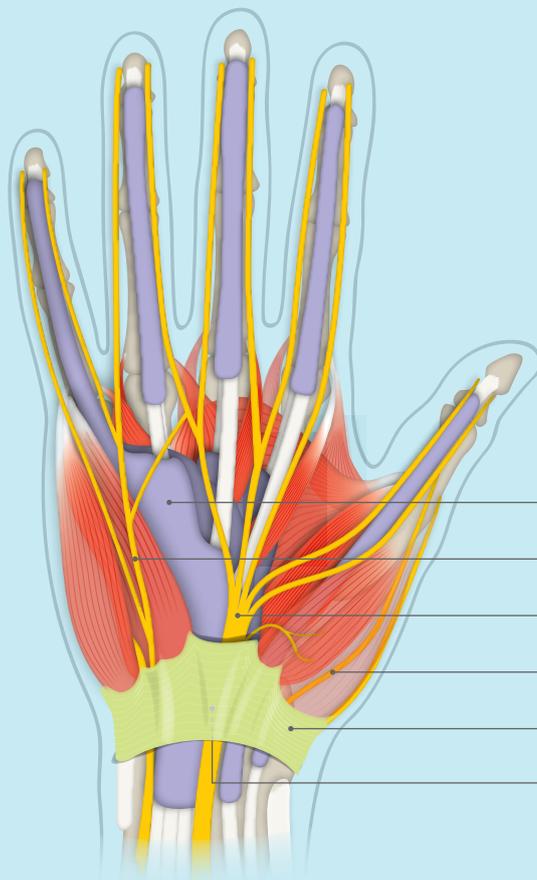

LE POIGNET

Le poignet est un élément clé du fonctionnement de la main, il permet sa mobilité par rapport à l'avant-bras. Il englobe la partie basse des deux os de l'avant-bras (Radius 1 et Cubitus 2) et les huit os du Carpe 3, disposés en deux rangées. À partir de sa position de repos, il dispose de deux degrés de mobilité : les mouvements de latéralité (abduction et adduction) et les mouvements axiaux (flexion et extension).

Fig. Main droite, vue palmaire.

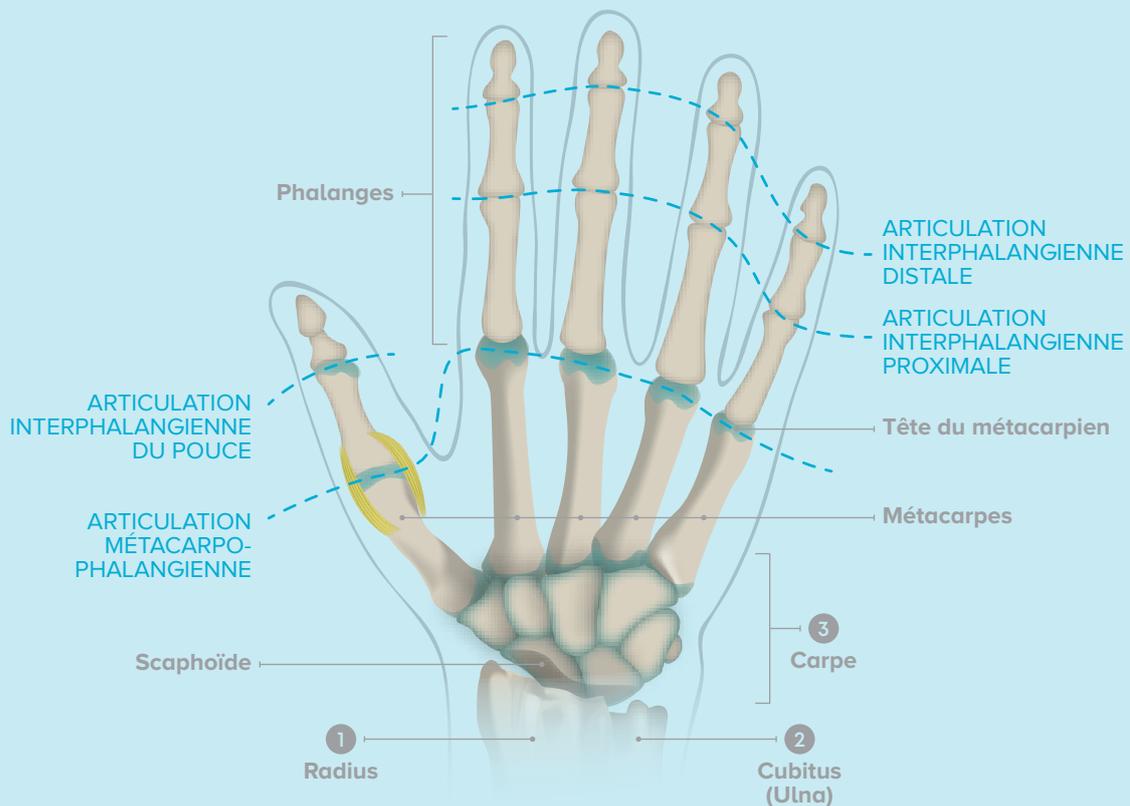

os de la main et du carpe.

2.3 Anatomie

Genou

CONNAÎTRE L'ESSENTIEL POUR BIEN L'EXPLIQUER

LE GENOU

L'articulation du genou est l'une des plus complexes de l'organisme et certainement l'une des plus importantes avec celle de la cheville. Elle doit en effet soutenir une grande partie du poids du corps, tout en lui apportant stabilité et mobilité.

Le genou met en relation 3 os : l'os de la cuisse (Fémur ①), l'os de la jambe (Tibia ②) et finalement, la Rotule ③.

Les mouvements du genou sont quasiment limités à la flexion (mouvement vers l'arrière rapprochant la jambe de la cuisse) et à l'extension (mouvement vers l'avant). Une légère rotation interne ou externe peut également se produire lors de la flexion.

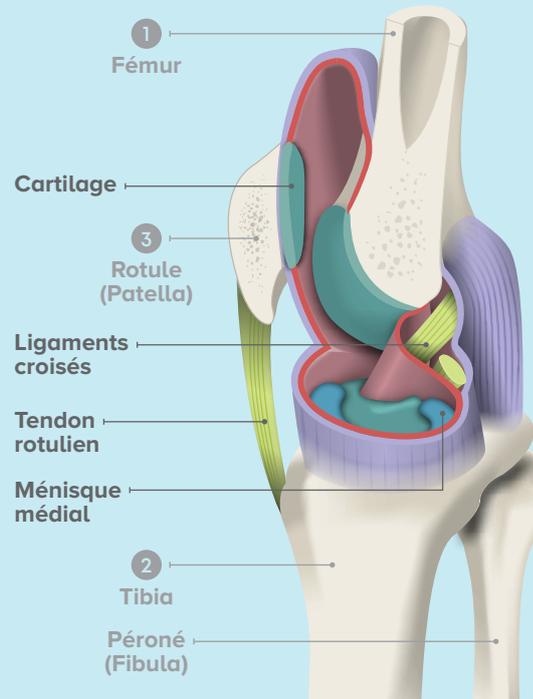


Fig. Articulation du genou, schéma de la capsule.

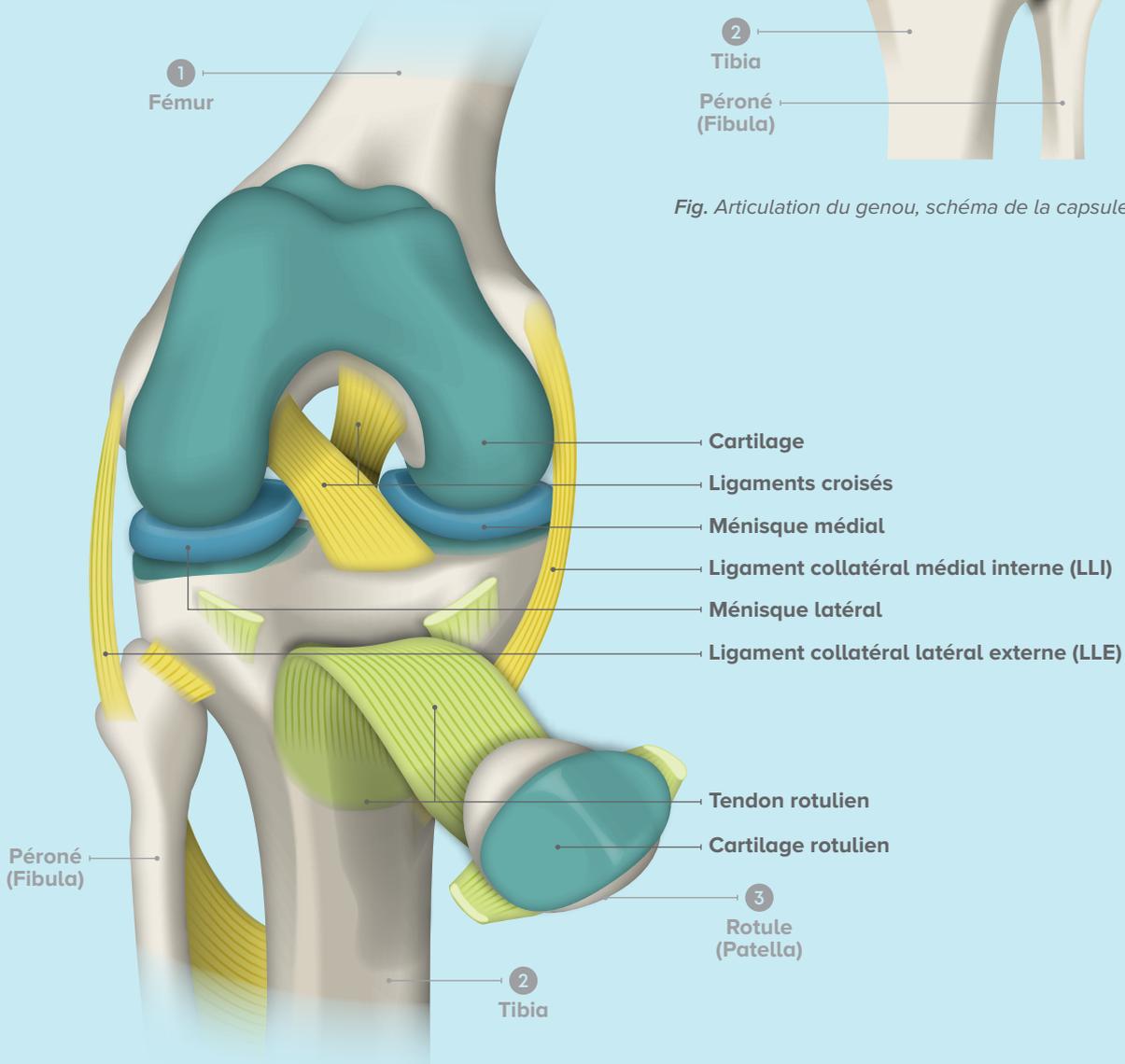


Fig. Genou droit ouvert, vue antérieure.

2.3 Anatomie Cheville & Pied

CONNAÎTRE L'ESSENTIEL POUR BIEN L'EXPLIQUER

LA CHEVILLE

La cheville est l'articulation du membre inférieur qui relie la jambe (parties inférieures du Tibia ① et du Péroné ②) au pied (Astragale). Elle constitue le point d'attache entre l'axe vertical du corps et l'axe horizontal du pied, permettant le mouvement articulaire de ce dernier. Comme le genou, elle a un rôle stratégique puisqu'elle supporte le poids du reste du corps tout en le maintenant en équilibre.



Fig. Pied droit, vue latérale.

LE PIED

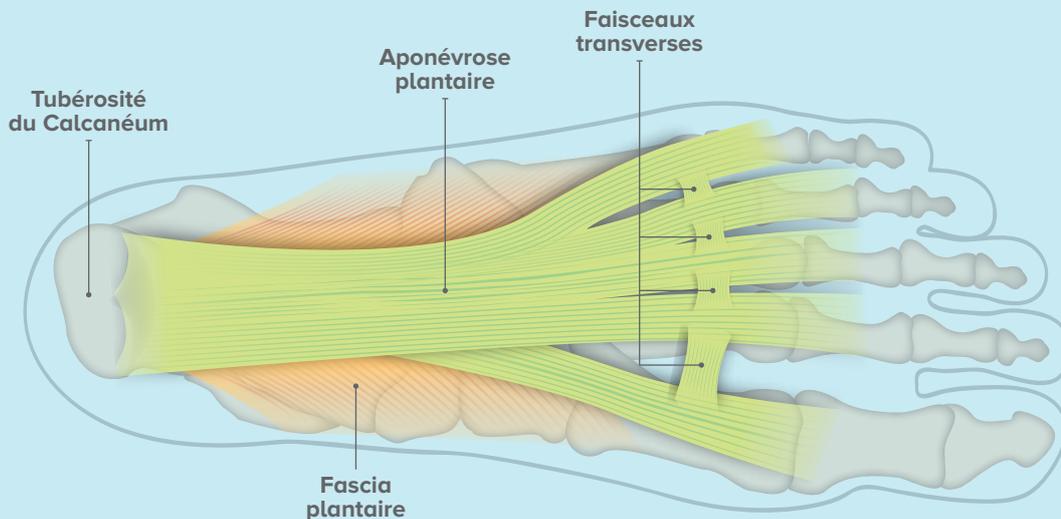


Fig. Pied droit, vue plantaire.

2.4 | Lexique pathologie

Arthrose

L'arthrose découle de la dégradation du cartilage qui recouvre et protège les os. C'est le résultat d'un déséquilibre du maintien de la structure du cartilage et sa destruction par des enzymes sécrétées en excès. Lorsque le cartilage ne se reconstitue pas assez vite, il va progressivement s'amincir et ne pourra plus jouer son rôle d'amortisseur. Les os vont alors frotter l'un contre l'autre, provoquer des douleurs et endommager les structures qui les entourent.

Stades d'évolution de l'arthrose

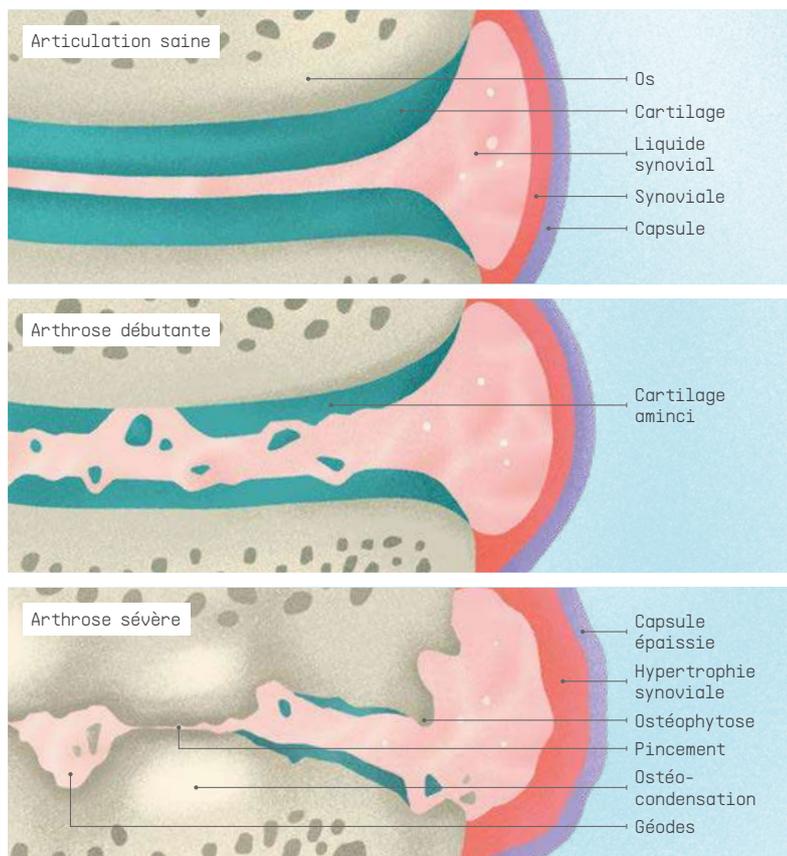


Illustration © Cassandra Vion

Arthrose cervicale (Cervicarthrose)

• Collier C1 (débutante)	54
• Collier C2 (confirmée)	54
• Collier C2 évolutif	55

Arthrose lombaire (Lombarthrose)

• Dynamic Fix®	60
• Lombobelt Activ®	61

Conseil associé

- Compresses chaud/froid 219
- Compléments alimentaires
- Proposez un rendez-vous de suivi dans 15 jours.

Arthrose du pouce (Rhizarthrose)

• Neo Rhizo Confort®	100
• Manutec® Pouce	101
• Rhizo MP®	103

Arthrose du genou (Gonarthrose)

• Genulig Stab®	115
• Gonartec Plus®	121

Symptômes :

- Douleur localisée.
- Gêne et/ou perte de la fonction articulaire.
- Douleur mécanique avec périodes inflammatoires (poussées inflammatoires).
- Difficulté à réaliser des gestes simples.
- Amplitude des mouvements limitée.
- Gonflement de l'articulation.
- Déformation de l'articulation (bosses osseuses).
- Perte de force.
- Douleur nocturne ou réveil nocturne.

Facteurs de risque :

- Antécédent traumatique ou utilisation excessive de l'articulation.
- Vieillesse.
- Antécédent familial, génétique et/ou d'intervention chirurgicale.
- Activités professionnelles.
- Surpoids.
- Ménopause.
- Sport.

Profil patient :

Ensemble de la population avec une prévalence pour les personnes âgées. L'arthrose est un processus naturel qui peut se déclarer à partir 40 ans, avec une prédominance chez les femmes.

Pourquoi une attelle ?

Objectifs :

- Éviter le conflit articulaire douloureux.
- Limiter la déformation articulaire.
- Encourager l'activité afin d'éviter la perte musculaire, la perte de mobilité et une mauvaise posture.
- Apporter un effet antalgique.


Actions :

- Limiter les frottements osseux.
- Guider et/ou corriger l'articulation.
- Apporter une action antalgique.
- Mettre au repos ou soutenir l'articulation.

2.4 | Lexique pathologie

Lombalgie

La lombalgie n'est pas une maladie, mais un symptôme. Ce terme global qualifie une douleur située dans la région basse du dos, au niveau des cinq vertèbres et/ou muscles lombaires et qui ne comporte pas de signaux d'alerte. Forme la plus courante des maux de dos, la lombalgie est bénigne dans la majorité des cas. Mais si la douleur n'est pas proportionnelle à la gravité des lésions, elle peut cependant s'installer et rendre les activités quotidiennes difficiles et altérer la qualité de vie.

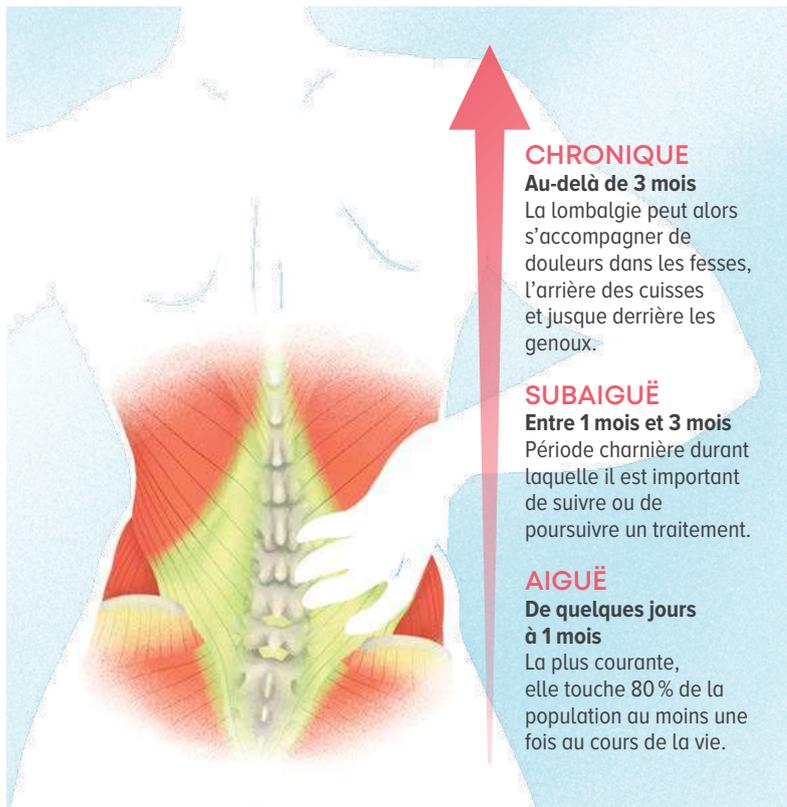

Fatigue musculaire passagère / Déficience musculaire

- **Lombobelt®**
(loisirs & prévention) 65
- **Lombotherm®**
(repos et activités d'intérieur) 65

Lombalgie chronique

- **Lombobelt Renfort®**
(efforts soutenus) 62
- **L'Évolutive®**
(activités tertiaires) 63
- **Lombosoft®**
(activités quotidiennes) 64

Conseil associé

- Compresses chaud/froid 219
- Application Mon dos & Moi® 43
- **Proposez un rendez-vous de suivi dans 15 jours.**

Lombalgie aiguë / Lumbago

- **Dynamic Fix®**
(repos pro./activités tertiaires) 60
- **Ceinture corset Fixquick**
(repos pro./activités tertiaires) 60
- **Lombobelt Activ®**
(douleurs intenses) 61

Discopathie / Hernie discale / Tassements vertébraux

- **Dynamic Fix®**
(repos pro./activités tertiaires) 60
- **Ceinture corset Fixquick**
(repos pro./activités tertiaires) 60

Symptômes

- Douleur dans le bas du dos, modérée à intense.
- Douleur localisée au niveau des muscles lombaires.
- Contracture musculaire.
- Courbature.
- Fragilité musculaire.

Facteurs de risque

- Sédentarité.
- Travail physique, manutention.
- Anxiété, stress.
- Grossesse.
- Mauvaise posture, chute, faux mouvement.
- Tabagisme.
- Antécédents de lombalgie.
- Surpoids ou maigreur.

Profil patient

Ensemble de la population.

Pourquoi une ceinture de soutien lombaire ?

Objectifs :

- Adopter les bonnes postures et diminuer la pression sur les disques intervertébraux.
- Stabiliser la zone en souffrance.
- Décontracter les muscles.
- Apporter un soulagement immédiat.

Actions d'une ceinture de soutien lombaire :

- Augmenter la pression intra-abdominale pour obtenir une correction posturale correcte.
- Soutenir et corriger la courbure de la colonne vertébrale.
- Renforcer le verrouillage vertébral par une posture correcte.
- Réduire la force de compression des disques.
- Apporter une contention progressive.
- Action curative ou préventive.

Actions d'une ceinture corset :


- Réduire le périmètre abdominal pour avoir un effet corset et ainsi stabiliser le rachis.
- Réduire les pressions exercées sur les disques intervertébraux.
- Rééquilibrer les pressions et les charges sur les disques intervertébraux.
- Éviter le conflit douloureux.

2.4 | Lexique pathologie

Entorse

L'entorse est une lésion traumatique se caractérisant par un étirement ou une déchirure (partielle ou totale) d'un ou plusieurs ligaments d'une articulation. Les ligaments sont les faisceaux de bandes de tissus fibreux, très résistants et peu extensibles, qui unissent les os entre eux, assurent la stabilité aux articulations et évitent les mouvements excessifs.

Degrés de gravité de l'entorse

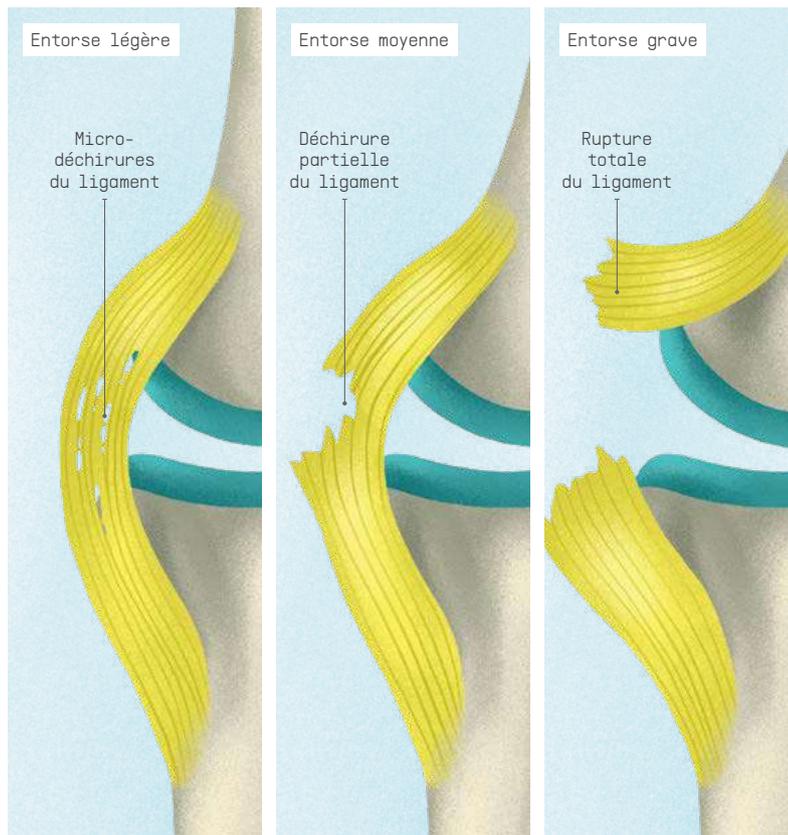

Entorse du poignet

• Neo Confort®	88
• Manutec® Poignet	89
• Manu Easy® Poignet	89
• Fixquick Poignet	91

Entorse de la cheville

• Fixquick Max	132
• Chevistrap®	133
• Memostab®	133
• Memoforme®	134
• Botimed®	136

Conseil associé

• Compresses de froid	219
• Expliquez le protocole GREC	213
• Proposez un rendez-vous de suivi dans 15 jours.	

Entorse du pouce

• Neo Rhizo Confort®	100
• Manutec® Pouce	101

Entorse du genou

• Rotulig Motion®	114
• Genulig Stab®	115
• Altitude®	119
• Genurom Neo®	120
• Genu'R®	123
• 3 Pans	124

Symptômes

Entorse légère :

- Douleur modérée.
- Limitation dans les mouvements.
- Apparition d'un gonflement.

Entorse moyenne :

- Douleur intense.
- Réduction de la mobilité : appui douloureux, voire impossible.
- Laxité.
- Œdème (dans les heures suivantes).
- Hématome.

Entorse grave :

- Douleur violente et intense.
- Sensation de craquement et/ou de déchirement au moment du traumatisme.
- Perte temporaire de la mobilité : appui impossible.
- Œdème (dans les minutes suivantes).
- Hématome.

Facteurs de risque

- Antécédent traumatique de l'articulation.
- Sport.
- Surpoids.
- Vieillesse.
- Mauvaise coordination physique.

Profil patient

Personne réalisant une activité à risque de traumatisme.

Pourquoi une attelle ?

Objectifs :

- Favoriser la cicatrisation ligamentaire.
- Limiter les mouvements suivant le ligament lésé.
- Apporter un soutien lors de la reprise d'activités quotidiennes ou sportives.
- Apporter un effet antalgique.

Actions :


- Immobilisation stricte ou relative, voire limitation de l'amplitude articulaire, en fonction du degré de gravité de la pathologie.
- Apporter une stabilité ligamentaire active.
- Agir localement au niveau de la douleur.

2.4 | Lexique pathologie

Tendinite / Tendinopathie

Une tendinite correspond à une inflammation aiguë ou chronique touchant les tendons au niveau de leurs insertions osseuses (enthésopathie) pouvant s'étendre à leurs gaines ou enveloppes protectrices (ténosynovite) et aux bourses séreuses (bursite). Le tendon est un élément de liaison entre un muscle et un os dont le rôle est de transmettre la force musculaire servant à créer le mouvement. Si le tendon a été trop ou mal sollicité, lui ou sa gaine s'enflamme et crée une tendinite.

Localisations de l'inflammation

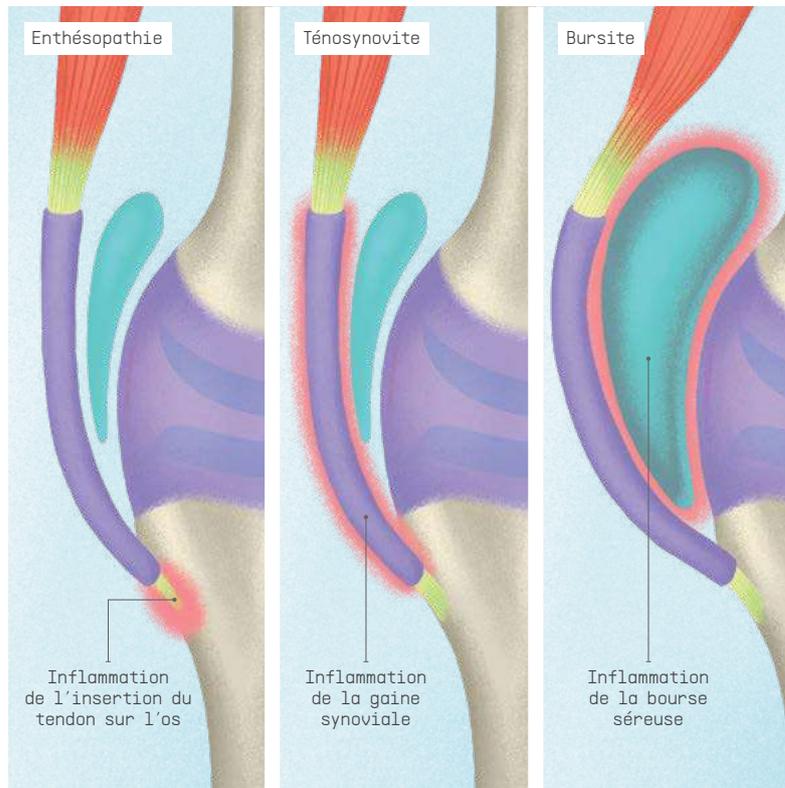

Symptômes :

- Sensation d'accrochage du tendon.
- Douleur localisée au niveau d'un tendon.
- Rougeur.
- Œdème.

On distingue différents degrés de douleur d'une tendinite :

- **Niveau 1 :** douleur uniquement après une période d'activité.
- **Niveau 2 :** douleur au début de la sollicitation, s'estompant pendant l'exercice et réapparaissant au repos.
- **Niveau 3 :** douleur permanente (présente au réveil et pendant l'exercice). Présence d'un gonflement du tendon (des nodules).

Facteurs de risque :

- Gestes répétitifs au travail (vibrations, mauvaise posture ou maintien prolongé).
- Vieillesse.
- Sport intensif.
- Surpoids.
- Microtraumatismes répétés.
- Ménopause.
- Grossesse.

Profil patient :

Ensemble de la population : prédominance chez les personnes avançant dans l'âge, les sportifs et les femmes enceintes.

Tendinite du poignet

- Neo Soft® 92
- Manutec Soft® Poignet 93
- Manu Easy Soft® Poignet 94

Tendinite de De Quervain

- Manu Easy® Poignet-pouce 99
- Manutec Soft® Poignet-pouce 99

Tendinite du tendon d'Achille

- Chevi Achillo® 130

Conseil associé

- Compresse de froid 219
- Proposez un rendez-vous de suivi dans 15 jours.

Tendinite du coude

(Épicondylite, Épitrachléite)

- Fixquick
sangle anti-épicondylite 82
- Epi'R® 82
- Mouv'N Fit® 83
- Epi Control® 83

Tendinite du genou

(Tendinite rotulienne de la patte d'oie, Tendinite du fascia lata...)

- Patel'R® 112
- Genulig Stab® 115

Pourquoi une attelle ?


Objectifs :

- Réduire l'inflammation du tendon.
- Favoriser la cicatrisation.
- Continuer une activité tout en reposant le tendon.
- Apporter un effet antalgique.

Action :

- Mise au repos du tendon.

2.5 Méthodologie d'un entretien patient

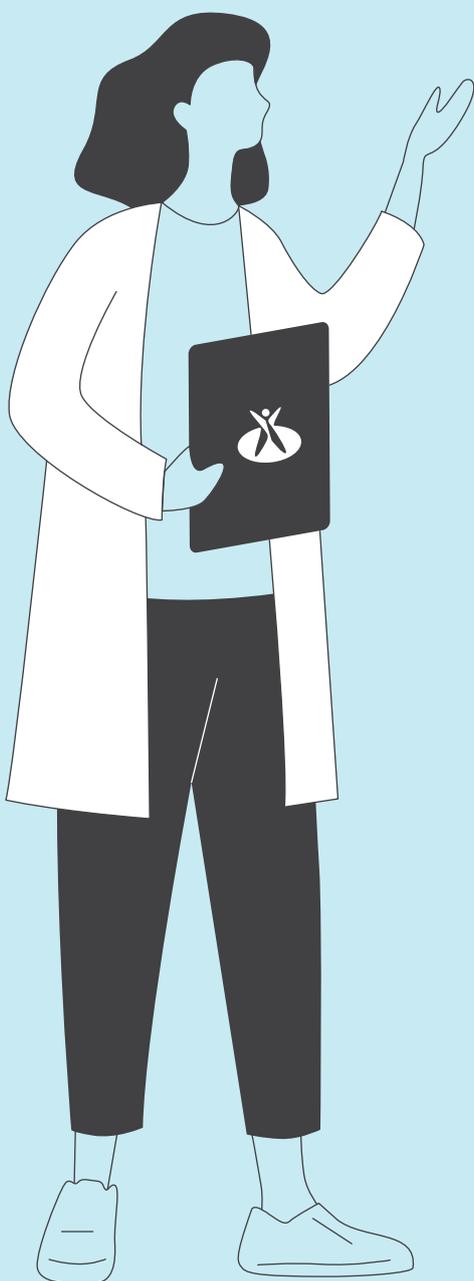

1 IDENTIFIER

le cas de comptoir

- Prescription d'attelle de traumatologie,
- Prescription mal définie,
- Patient se présentant sans prescription,
- Patient souhaitant une solution pour de la prévention.



2 QUESTIONNER

votre patient

- Quelle est l'indication du médecin ?
- Comment la douleur ou les symptômes sont-ils apparus ?
- Quelles sont ses activités quotidiennes ?...



3 EXPLIQUER

à votre patient

- L'articulation touchée et la pathologie associée,
- Les objectifs orthopédiques,
- Les éléments mécaniques des produits et les actions recherchées...



4 DÉLIVRER

une solution à votre patient

À l'aide des guides de délivrance, des guides synthétiques et des arbres décisionnels.



5 CONSEILLER

un produit de relais ou associé

- Les produits de cryothérapie et de thermothérapie,
- Les bandes de contention Neostrap®,
- Les gammes spécialisées Orliman® Maternity, Orliman® FeetPAD, Orliman® Sport,
- Les autres produits disponibles dans votre officine.

2.6 | Fiche patient Sportif

Du simple jogging au tournoi de football en passant par un cours de Zumba®, le sport est devenu un véritable phénomène de société. Les pathologies sportives sont de plus en plus abordées dans la prise en charge et la délivrance des attelles orthopédiques. La prise en charge en pharmacie intervient couramment avant la consultation d'un médecin.



LA PRATIQUE SPORTIVE EN QUELQUES CHIFFRES

70 %⁽¹⁾

des Français ont pratiqué **au moins une activité physique et sportive** au cours des douze derniers mois.

910 000

accidents annuels sont liés à l'activité physique et sportive amateur, selon l'Institut de veille sanitaire (InVS).

6 000⁽²⁾

Français consultent **chaque jour** pour une entorse de la cheville.

25 %⁽³⁾

des hommes âgés entre 20 et 40 ans sont **sujets à la récidence**.

⁽¹⁾ Baromètre national des pratiques sportives 2023 - vie-publique.fr

⁽²⁾ Reconnaître une entorse de la cheville - ameli.fr

⁽³⁾ Activité physique : contextes et effets sur la santé - inserm.fr

LES PRINCIPAUX TROUBLES DU SPORTIF

ORIGINE CHRONIQUE

Contrainte imposée durant un certain temps, séries de petites lésions...

Articulation : Arthrose, Pré-arthrose.

Os : Fracture de fatigue.

Tendon : Tendinite, bursite.

Muscle : Syndrome des loges.

- **Apparition de la douleur** : progressive (sans événement déclencheur identifié), douleur survenant à l'effort.

ORIGINE TRAUMATIQUE

Événement accidentel, blessure survenant brutalement...

Articulation / Ligament : Entorse, Luxation.

Os : Contusion, Fracture.

Muscle : Élongation, Claquage, Déchirure, Rupture, Contracture, Contusion, Crampe, Syndrome des loges.

Peau : Éraflures, Ampoules, Brûlures, Plaie, Contusion.

- **Apparition de la douleur** : accidentelle, brutale et immédiate à la suite d'un événement, lésion délimitée avec apparition des symptômes classiques (hématome, rougeur, incapacité fonctionnelle...).




► Orliman® Sport et Skintape® vous proposent une sélection de produits performants, tendances et abordables afin de développer votre accompagnement. **Page 165.**

2.6 | Fiche patient Femme enceinte

Tiraillements, fatigue musculaire, déséquilibre articulaire... Certains maux inhérents à la grossesse peuvent ternir le quotidien des futures mamans. À la recherche de soulagement et de confort, elles démontrent une réelle attente pour des solutions simples et non-médicamenteuses qui leur permettront de vivre plus sereinement leur grossesse.



LA MATERNITÉ EN QUELQUES CHIFFRES

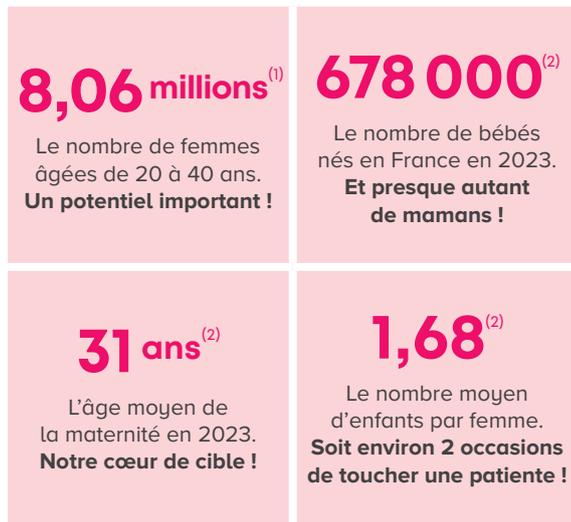

⁽¹⁾ Population par sexe et groupes d'âges, 2024, INSEE.

⁽²⁾ Bilan démographique 2023, INSEE.

LES PRINCIPAUX MAUX LIÉS À LA GROSSESSE

AU 1^{er} TRIMESTRE

- **Fatigue musculaire** : douleurs musculaires dorsales consécutives à une mobilisation brusque, forcée ou inadaptée.
- **Lombalgie** : douleur située dans la région basse du dos, au niveau des cinq vertèbres lombaires.
- **Douleurs ligamentaires** : tiraillements dans le bas du ventre et le haut des jambes pouvant être diffus ou localisés.

AU 2^e TRIMESTRE

- **Sciaticque** : pincement ou irritation du nerf sciatique.
- **Douleurs aux pieds** : hallux valgus, aponévrosite plantaire, métatarsalgie, affaissement de la voûte plantaire, tendinite de la cheville...

AU 3^e TRIMESTRE

- **Pubalgie** : tiraillements et douleurs au niveau du pubis.
- **Syndrome du canal carpien** : compression du nerf médian qui passe par le canal carpien.
- **Insuffisance veineuse** : mauvais retour veineux du sang circulant dans les veines des membres inférieurs.

POST-ACCOUCHEMENT

- **Diastasis** : élargissement de la séparation entre les muscles abdominaux, entraînant un relâchement de la sangle abdominale et laissant un ventre distendu.
- **Prolapsus** : descente d'un ou plusieurs organes (vagin, vessie, utérus, rectum, intestin) hors du petit bassin.

► **Orliman® Maternity** vous propose une gamme globale de solutions pour accompagner les femmes enceintes durant toute la durée de leur grossesse et après l'accouchement. **Page 151.**



Fiche Patient

2.6 | **Personne en surpoids**


En France, un adulte sur deux est en surpoids ou obèse. En 2020, 39,6% des hommes et 23,9% des femmes étaient concernés (IMC ≥ 25). Parmi eux, 17% des adultes (8,5 millions de personnes) souffrent d'obésité.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Surpoids et obésité de l'adulte : définition, causes et risques. mars 2024. ameli.fr



LES FACTEURS DE RISQUE

L'obésité est une maladie multifactorielle caractérisée par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle. Sa cause fondamentale est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et celles dépensées, en partie due à notre mode de vie sédentaire et à l'augmentation de la consommation d'aliments riches en sucres et en lipides. Elle a des effets négatifs sur le corps et est un facteur de risque majeur pour certaines maladies.

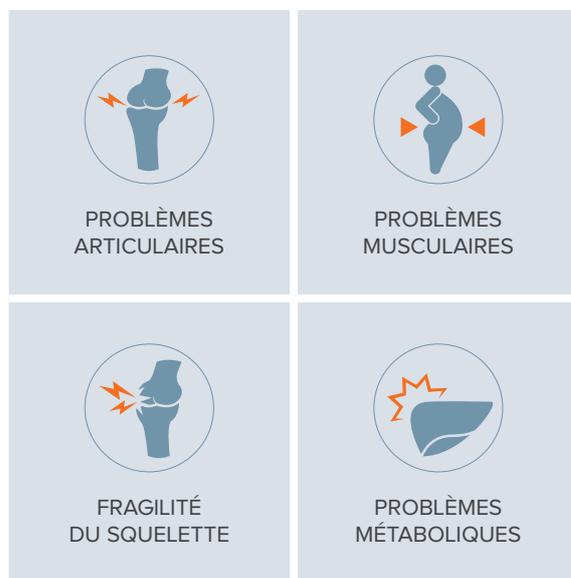

LES COMPLICATIONS ORTHOPÉDIQUES LIÉES À L'OBÉSITÉ



MEMBRES SUPÉRIEURS

- Fracture.

RACHIS LOMBAIRE

- Hyperlordose lombaire et Lombalgie.
- Ostéoporose et Fractures ostéoporotiques.
- Arthrose.

MEMBRES INFÉRIEURS

- Désalignement du genou.
- Ostéoarthrite du genou.
- Pronation du pied/pied plat.
- Arthrose.

Un poids plus important exercé sur les articulations est une charge supplémentaire, ce qui provoque l'aggravation des pathologies possibles telles que l'arthrose, en particulier au niveau des hanches, des genoux et des chevilles.

La détérioration des articulations est renforcée, en particulier celles qui subissent le plus de pression dans notre organisme telles que la colonne lombosacrée, les hanches, les genoux et les chevilles.




► Orliman® One Plus vous propose des solutions adaptées aux patients nécessitant un traitement particulier lié à leurs caractéristiques physiques et morphologiques spécifiques. **Page 157.**

3. Visibilité



3.2 | PLV & Merchandising

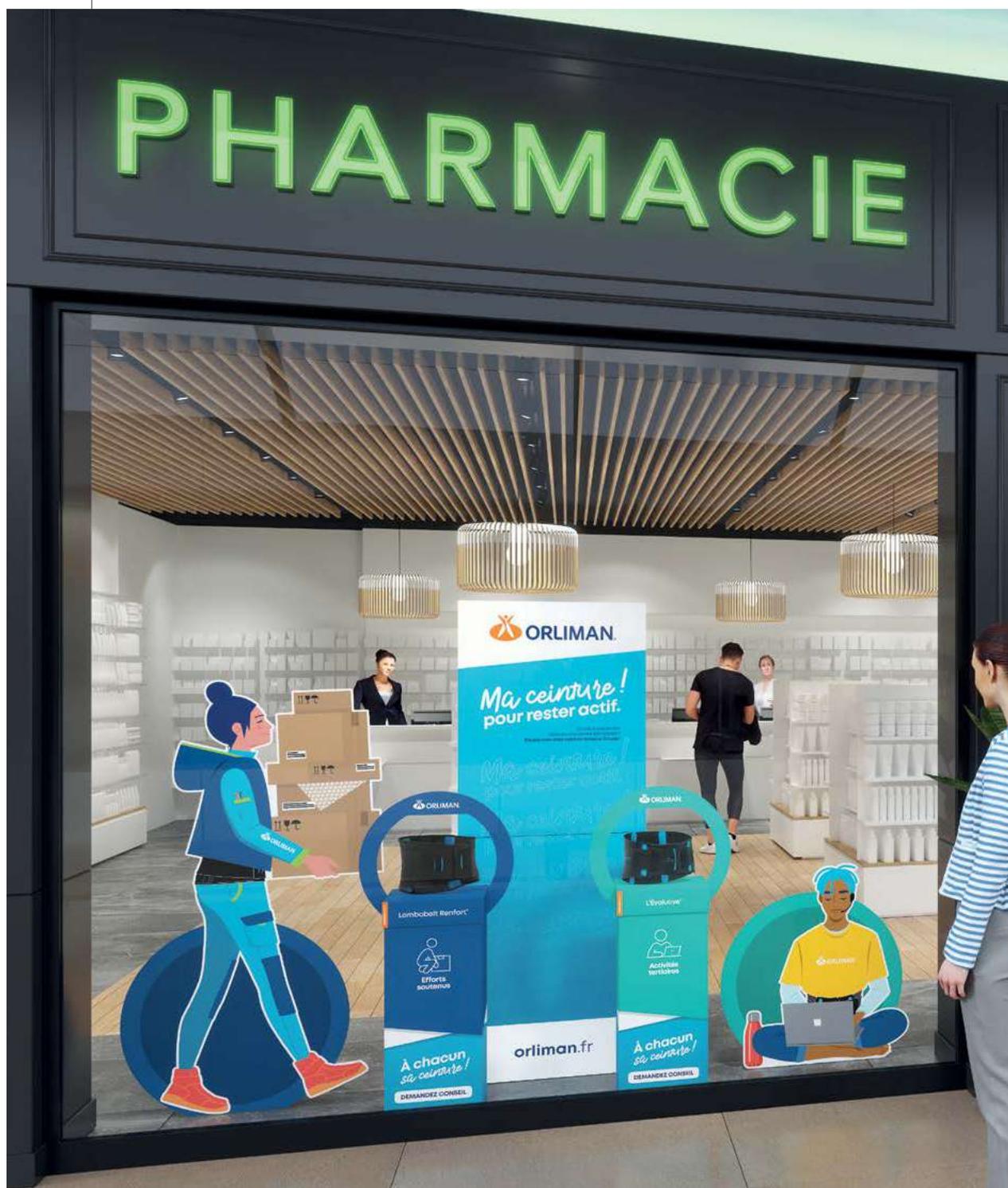

Ensemble, partageons le plaisir de satisfaire vos patients, de gagner en expertise et d'accroître votre visibilité.




Afin de développer votre expertise et de mettre en avant vos solutions d'orthopédie et de podologie, nous vous proposons divers outils, permanents ou saisonniers, pour l'équipe officinale ou vos patients.

Activités sportives, Lombalgie, TMS... vos patients sont toujours à la recherche de conseils et d'informations, ils comptent donc sur votre expertise pour les guider et leur délivrer le produit qui leur sera le plus adapté.

En parallèle, la catégorie de l'orthopédie est en plein essor et de plus en plus visible : elle nécessite une segmentation claire et impactante, pour que chacun puisse y trouver la solution adéquate.

Totems, affiches, réglottes, conseils de merchandising... nous vous accompagnons dans la mise en avant de votre rayon afin que votre expertise soit valorisée.

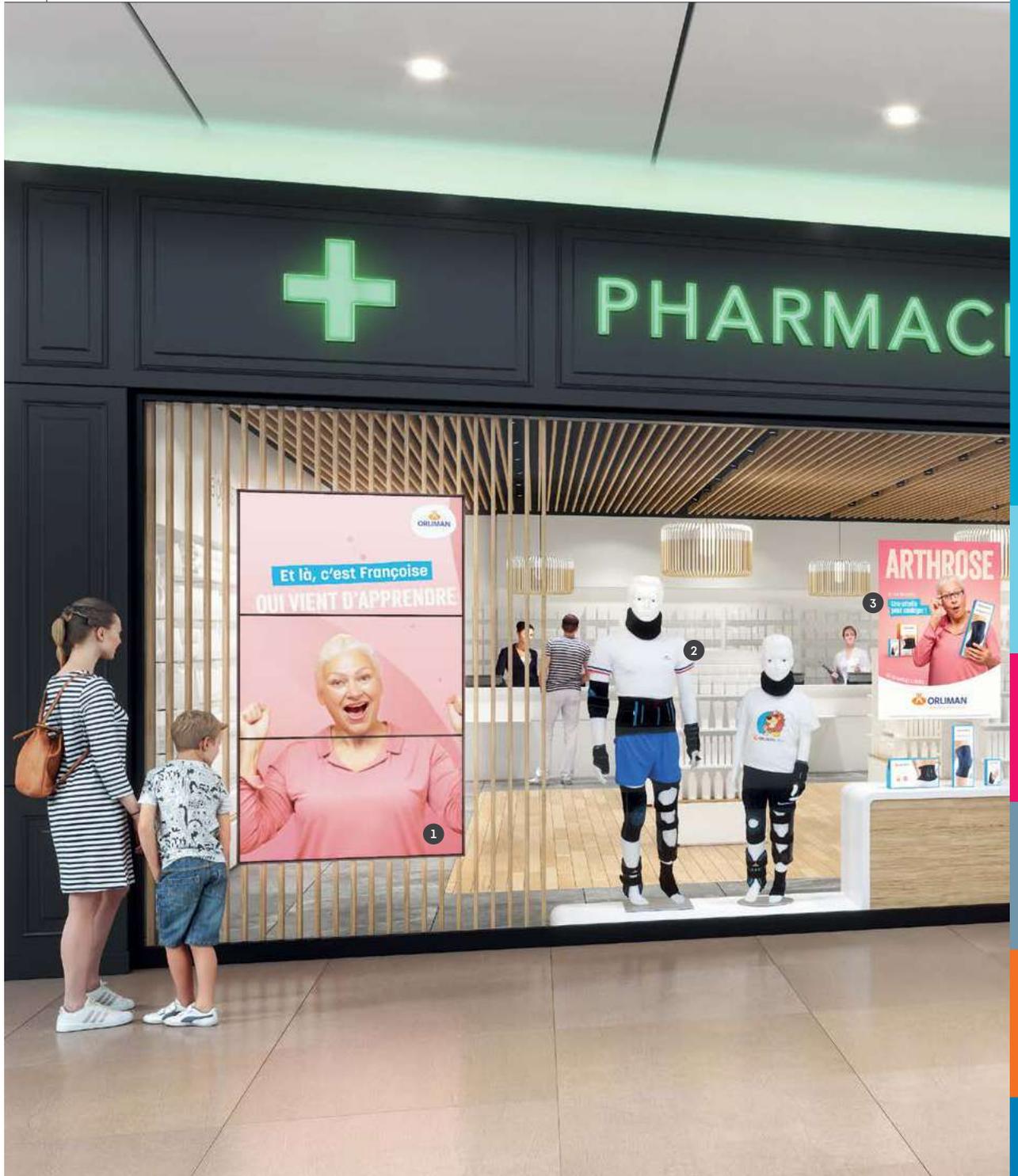

Toute l'année, nous disposons d'outils thématiques afin de dynamiser et animer votre espace de vente.



DES OUTILS DE VISIBILITÉ PERMANENTS

1. Écran : Des vidéos régulièrement mises à disposition pour animer vos écrans, à télécharger librement sur pro.orldiman.fr. **2. Mannequins** : Adulte ou Enfant, présentez une sélection de produits portés. **3. Affiches** : Parlez de l'orthopédie toute l'année. **4. Covering** : Cadre de vitrine, Post-it, Habillage de porte ou Full covering, choisissez le format qui vous convient !

DES OUTILS ACCOMPAGNANT UN LANCEMENT PRODUIT

Exemple : genouillères en tricot.



Brochure de lancement



Questionnaires



Orlimag



Poster de délivrance



Totem

DES OUTILS THÉMATIQUES OU SAISONNIERS

Exemple : campagne Sports d'Hiver.



Carte postale



Guide de prescription / délivrance



Affiche

Renseignez-vous auprès de votre technico-commercial(e).

Mise à disposition des outils selon proposition commerciale et dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels. Exemple d'assortiment d'outils.

DES OUTILS DE DIFFÉRENCIATION



CHUT



Affiche



Dépliant patients



Prise de mesures



Réglettes



Présentoir

PODOLOGIE



Affiche




Présentoir de comptoir




Orlimag



Pas au sol

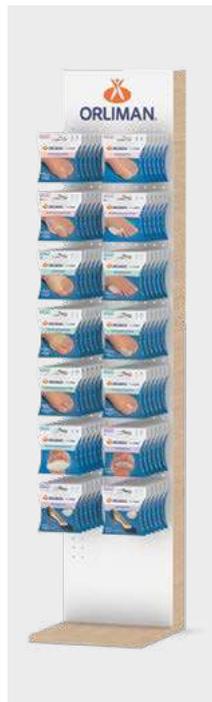

Présentoir

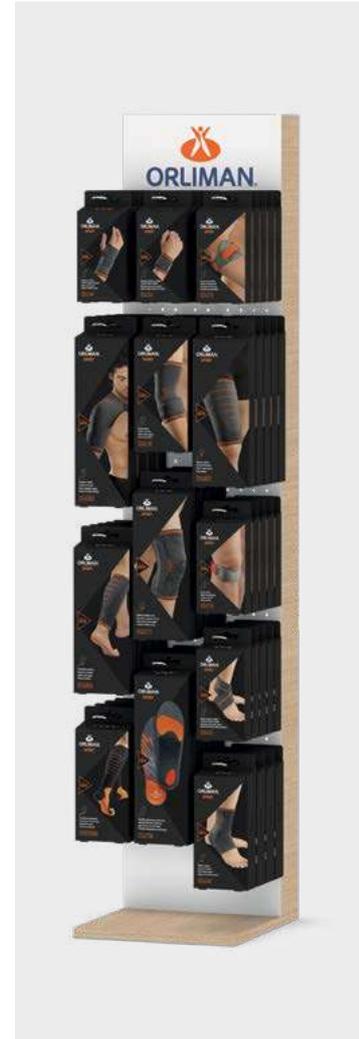

Avec un espace dédié au soin des sportifs, nous vous accompagnons dans une démarche catégorielle regroupant des produits liés à la pratique sportive. Pour plus d'informations, rendez-vous page 44 !

Les campagnes thématiques

3.2 | Pochette lombalgie, Chevibox® ...



Une campagne thématique, c'est quoi ?

Une communication ciblée et des outils adaptés aux besoins de votre officine.

DES SUPPORTS DE VISIBILITÉ POUR VOTRE OFFICINE



1. Théâtralisation : totem, stèles, silhouettes...
2. Balisage de linéaire : fronton, pop-up...
3. Vitrophanies.
4. Affiches vitrine.

Renseignez-vous auprès de votre technico-commercial(e).

Mise à disposition des outils selon proposition commerciale et dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels. Exemple d'assortiment d'outils.

DES OUTILS POUR VOUS



5. Argumentaire de vente.
6. Brochure de formation.
7. Blocs questionnaires.
8. Goodies utiles.

DES OUTILS POUR VOS PATIENTS



9. Magazines « Orlimag ».
10. Incollables.

Mon dos & moi®

3.3 | App' mobile pour les patients



80% des Français vont présenter au moins un épisode lombalgique dans leur vie¹ !

Face à la lombalgie, certain(e)s de vos patient(e)s ont pour réflexe de cesser toute activité physique par peur d'avoir encore plus mal. Il peut en résulter une perte d'adaptation à l'effort voire un renfermement sur soi. Malgré les idées reçues, conserver une activité physique est essentiel afin de (re)muscler le dos. Comme l'indique la HAS (Haute Autorité de Santé) : « L'activité physique est le traitement principal permettant une évolution favorable de la lombalgie et d'éviter une récédive ».



L'APPLICATION CONTRE LE MAL DE DOS !

Orliman® vous présente son application mobile **Mon dos & moi®**, tout spécialement développée pour accompagner vos patient(e)s au quotidien durant leurs problèmes de dos.

Au travers d'un contenu riche et varié et d'exercices physiques à pratiquer en toute sécurité, vos patient(e)s apprendront à prendre soin de leur dos au quotidien !



CONSEILS & ASTUCES

Les bons gestes et les bonnes postures du quotidien à adopter pour reprendre de bonnes habitudes.



EXERCICES

Des exercices de musculation, étirement, relaxation... À pratiquer à sa convenance et à programmer pour bénéficier d'un véritable coaching.



BOÎTE À INFOS

De nombreux articles pour en apprendre davantage sur la lombalgie et même des quiz pour tester ses connaissances.



PROFIL

Une courbe de profil à renseigner régulièrement pour garder le contrôle et échanger plus facilement avec son professionnel de santé.




Scannez-moi
pour télécharger
directement l'app' !

Mon dos & moi® est une application de conseils, les informations et les services proposés ne doivent en aucun cas se substituer à une consultation, une visite ou un diagnostic formulé par un professionnel de santé. En cas de doute ou de douleur, demandez conseil à un professionnel de santé. ¹ Source : La lombalgie, un enjeu de Santé publique - ameli.fr - Décembre 2020.

3.4 Démarche catégorielle

Soin des Sportifs

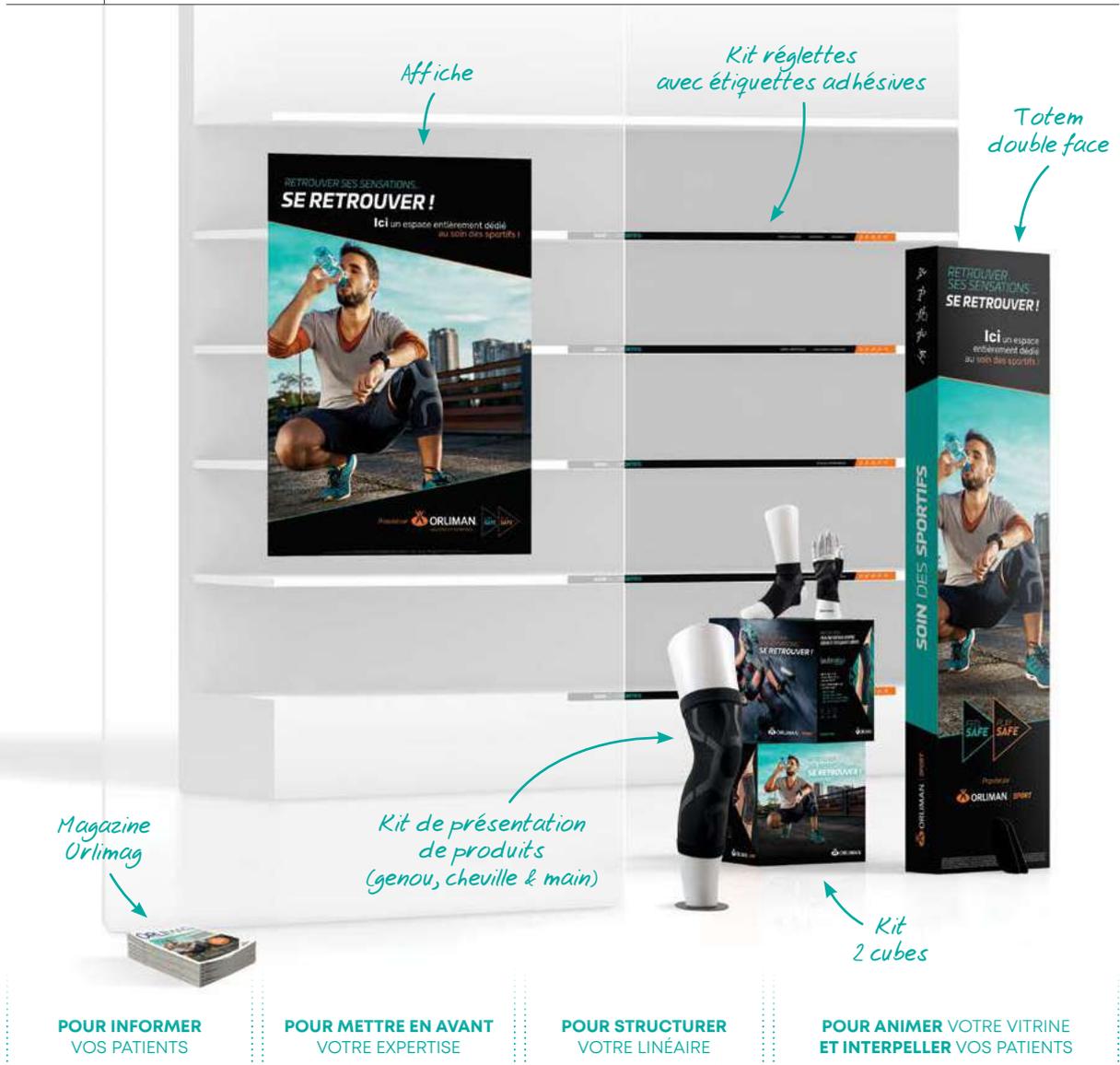

UNE OFFRE DE COMMUNICATION GLOBALE

Attentifs à l'offre en pharmacie et aux besoins des patients, nous avons renouvelé une démarche catégorielle regroupant des produits liés à la pratique sportive :

- Proposez une offre de produits globale (grâce à un plan complet),
- Rendez votre expertise visible (différents outils de visibilité),
- Gagnez en expertise (outil de formation)...



Découvrez l'offre **BOX Orliman® Sport** auprès de votre technico-commercial(e).

Mise à disposition des outils selon proposition commerciale et dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

Démarche catégorielle Arthrose



UNE APPROCHE GLOBALE

L'association de différentes solutions est indispensable pour ralentir l'évolution de la pathologie, réduire les douleurs et continuer de bien vivre au quotidien.

Orliman® vous accompagne pour valoriser ces différentes solutions dans votre officine grâce à un balisage du linéaire modulable :

- Mettre en avant votre positionnement d'expert,
- Accroître votre visibilité et dynamiser votre officine,
- Développer vos ventes.



Découvrez une offre dédiée aux problématiques de l'arthrose auprès de votre technico-commercial(e).

Mise à disposition des outils selon proposition commerciale et dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

4. Offre produits



4.1 | Référencement adapté à **votre profil d'officine**

Profil #1

Petits espaces, pas de stock...



Produits en taille unique et/ou bilatéraux :
Neo Confort®, Manutec®...

Produits polyvalents et/ou évolutifs :
Genulig Stab®, L'Évolutive®...

Profil #2

Offrir du choix !



Éventail de solutions produits :
Manu Easy® Poignet, Manutec® Poignet,
Rotulig Motion®, Memostab®, CheviX®...

Profil #3

Leader du marché, gammes Premium...



Produits différenciants :
Technologie BOA® (Fixquick), Impression 3D (Rhizo 3D®)...

Gammes complémentaires :
Orliman® Maternity, Kids, One Plus...

4.2 | Référencement évoluant avec **vos compétences**

Acteur +++

en Orthopédie

Vous êtes force de proposition
au comptoir.



Neo Boxer®, Genuflex Rom®,
Gamme One Plus, Gamme Kids...

Acteur ++

en Orthopédie

Vous êtes engagé dans la délivrance
des produits d'orthopédie.



Fixquick Poignet, Dynamic Fix®,
Rotulig Motion®, CheviX®...

Acteur +

en Orthopédie

Vous savez répondre à la prescription.



Manu Easy®, Lombobelt Renfort®,
Genulig Stab®, Memoforme®...

4.3 | Notre recommandation de partenariat

TRONC & RACHIS

Rachis cervical

○ Collier C1	54
○ Collier C2	54
○ Collier C2 évolutif	55
○ Collier C3	56
○ Collier C4	56

Rachis lombaire

○ Dynamic Fix®	60
○ Ceinture Fixquick	60
○ Dorso Evotec®	61
○ Lombobelt Activ®	61
○ Lombobelt Renfort®	62
○ L'Évolutive®	63
○ Mouv'N Fit®	63
○ Lombosoft®	64
○ Lombofit®	64
○ Lombobelt®	65
○ Lombotherm®	65
○ Dorso Lead®	68
○ Abdobelt®	68
○ Abdobelt Stomie®	69

ÉPAULE & BRAS

○ Should Sport®	74
○ Should 90®	74
○ Should 15-30®	76
○ ShouldOp®	
(avec coussin 30°)	76
○ Should 30-45®	77
○ ShouldOp® (sans coussin)	78
○ Bandage d'immobilisation d'épaule	78
○ Should'R®	79
○ Écharpe universelle d'épaule	79
○ Écharpe de contention de bras	80
○ Écharpe de bras maille filet	80
○ Anneaux claviculaires	81
○ Elbowlution®	81
○ Fixquick Sangle anti-épicondylite	82
○ Epi'R®	82
○ Mouv'N Fit® Coudière anti-épicondylite	83
○ Epi Control®	83

POIGNET & MAIN

Poignet

○ Neo Confort®	88
○ Neo Immo®	88
○ Manutec®	89
○ Manu Easy®	89
○ Confort Plus®	90
○ Confort Plus® 27 cm	90
○ Fixquick	91
○ Neo Soft®	92
○ Neo Flex®	92
○ Mouv'N Fit®	93
○ Manutec Soft®	93
○ Manu Easy Soft®	94
○ Epi Control®	94

Poignet-pouce

○ Confort Plus®	96
○ Fixquick	96
○ Manu Easy® Long	98
○ Manutec®	98
○ Manu Easy®	99
○ Manutec Soft®	99

Pouce

○ Neo Rhizo Confort®	100
○ Mouv'N Fit®	100
○ Manutec®	101
○ Manu Easy®	102
○ Rhizo 3D®	102
○ Rhizo'R®	103
○ Rhizo MP®	103

Main/Doigts

○ Neo Boxer®	
4° et 5° métacarpes	104
○ Neo Boxer®	
2° et 3° métacarpes	104
○ Manu Easy Boxer®	
4° et 5° métacarpes	105
○ Manu Easy Boxer®	
2° et 3° métacarpes	105
○ Neo Manufinger®	106
○ Neo Finger®	106

GENOU

○ Patel'R®	112
○ Genuforte®	112
○ Genuforte Max®	113

○ Rotulig Move®	113
○ Rotulig®	114
○ Rotulig Motion®	114
○ Genuilig Stab®	115
○ Rotulig Stab®	116
○ Flexilig®	118
○ Altitude®	119
○ Genurom Neo®	120
○ Gonartec Plus®	121
○ Genuflex Rom®	122
○ Genu'R®	123
○ Genu'R® 20°	123
○ Monobloc	123
○ 3 Pans	124
○ 3 Pans 20°	124

CHEVILLE & PIED

○ Cheviforte®	130
○ Chevi Achillo®	130
○ Chevilig®	131
○ CheviX®	131
○ Fixquick Max	132
○ Chevistrap®	133
○ Memostab®	133
○ Memoforme®	134
○ Memoforme® Air	134
○ Botimed®	136
○ Botimed® Air	136
○ Botimed® Articulée	137
○ Chaussure à décharge de l'avant-pied	138
○ Chaussure de marche Basse	138
○ Chaussure post-opératoire	139
○ Chaussure pour pied diabétique	139
○ Boxia®	140
○ Boxia® Plus	140
○ Releveur de pied	141

KIDS

○ Collier C1	144
○ Collier C2	144
○ Neo Rhizo Confort®	144
○ Confort Plus® Poignet	145
○ Confort Plus® Poignet-pouce	145
○ Bandage d'immobilisation d'épaule	146
○ Anneaux claviculaires	146

○ Rotulig®	147
○ 3 Pans	147
○ Genu'R®	147
○ Genu'R® 20°	147
○ Chevilig®	148
○ Chevistrap®	148
○ Memoforme®	149
○ Memostab®	149
○ Botimed® Pédiatrique	149

MATERNITY

○ Monaë light®	152
○ Ninaë casual®	152
○ Ninaë evolution®	153
○ Monaë activ®	154
○ Lilaë move®	154
○ Lilaë protect®	155
○ Lilaë soft®	155

ONE PLUS

○ Collier C2	158
○ Ceinture de soutien lombaire	159
○ Ceinture de soutien abdominal	159
○ Attelle de poignet	160
○ Attelle de poignet-pouce	160
○ Attelle de pouce	161
○ Genouillère ligamentaire articulée	162
○ Genouillère ligamentaire articulée réglable	162
○ Attelle de genou articulée	163
○ Attelle de cheville	163

SPORT

○ Épaulière élastique	166
○ Coudière élastique	167
○ Sangle anti-épicondylite	167
○ Attelle de poignet élastique	167
○ Poignet élastique réglable	167
○ Genouillère élastique courte	168
○ Sangle infra-patellaire	168
○ Cuissard élastique	168
○ Molletière élastique	168

○ Chevillère élastique	169
○ Chevillère élastique réglable	169
○ Chaussettes de compression	169
○ Semelles sportives à décharge	169

Skintape®

○ Coudière	172
○ Poignet-Pouce	172
○ Cuissard	173
○ Genouillère	173
○ Molletière	173
○ Chevillère	173

PODOLOGIE

○ Correcteur nocturne Hallux Valgus	176
○ Écarteur & Protecteur Hallux Valgus	176
○ Écarteur de doigts Hallux Valgus	176
○ Séparateur Gel Demi-Lune	177
○ Séparateur & Protecteur 4 ^e et 5 ^e orteils	177
○ Coussinet Gel Talon	178
○ Coussinet Gel Métatarses	178
○ Coussinet Gel Orteils	178
○ Protecteur Hallux Valgus et Cors	179
○ Protection plantaire Métatarses	179
○ Protection plantaire Gel Métatarses	179
○ Protection Gel Talon	180
○ Tube protecteur Gel Orteils et doigts	180
○ Tube protecteur Gel & Tissu Orteils et doigts	180
○ Doigtier protecteur Orteils et doigts	181
○ Protecteur Gel Petit orteil	181
○ Semelles Cosy à mémoire de forme	182
○ Semelles Fines Silicone & tissu	182
○ Semelles Extra Fines Silicone & tissu	183
○ Semelles Invisibles Gel	183
○ Semelles Silicone	184

○ Semelles thermoformables	184
○ Talonnettes insert central	185
○ Talonnettes insert latéral	185
○ Talonnettes plates insert central	185
○ Chaussettes "Voyage"	186
○ Chaussettes Daily "Pieds diabétiques"	187
○ Chaussettes Relax "Pieds diabétiques"	187

CHUT

○ CHUT	189
--------------	-----

CRYO & BANDES

Cryotec®

○ Genulig®	214
○ Kit Compressive	215
○ Kit dentaire	215

Cryopump®

○ Épaulière	216
○ Genouillère	217
○ Genouillère articulée	217
○ Attelle de genou évolutive	218
○ Chevillère	218

Divers


○ Compresse de froid	219
○ Compresse chaud/froid Thermopad	219
○ Bandes de contention Neostrap®	220

AXESS

○ Collier cervical	222
○ Ceinture lombaire	222
○ Attelle de genou	222
○ Attelle de genou aérée	222
○ Attelle de poignet	223
○ Attelle de poignet-pouce	223
○ Attelle de cheville mousse	223

Date de l'audit :

..... / /

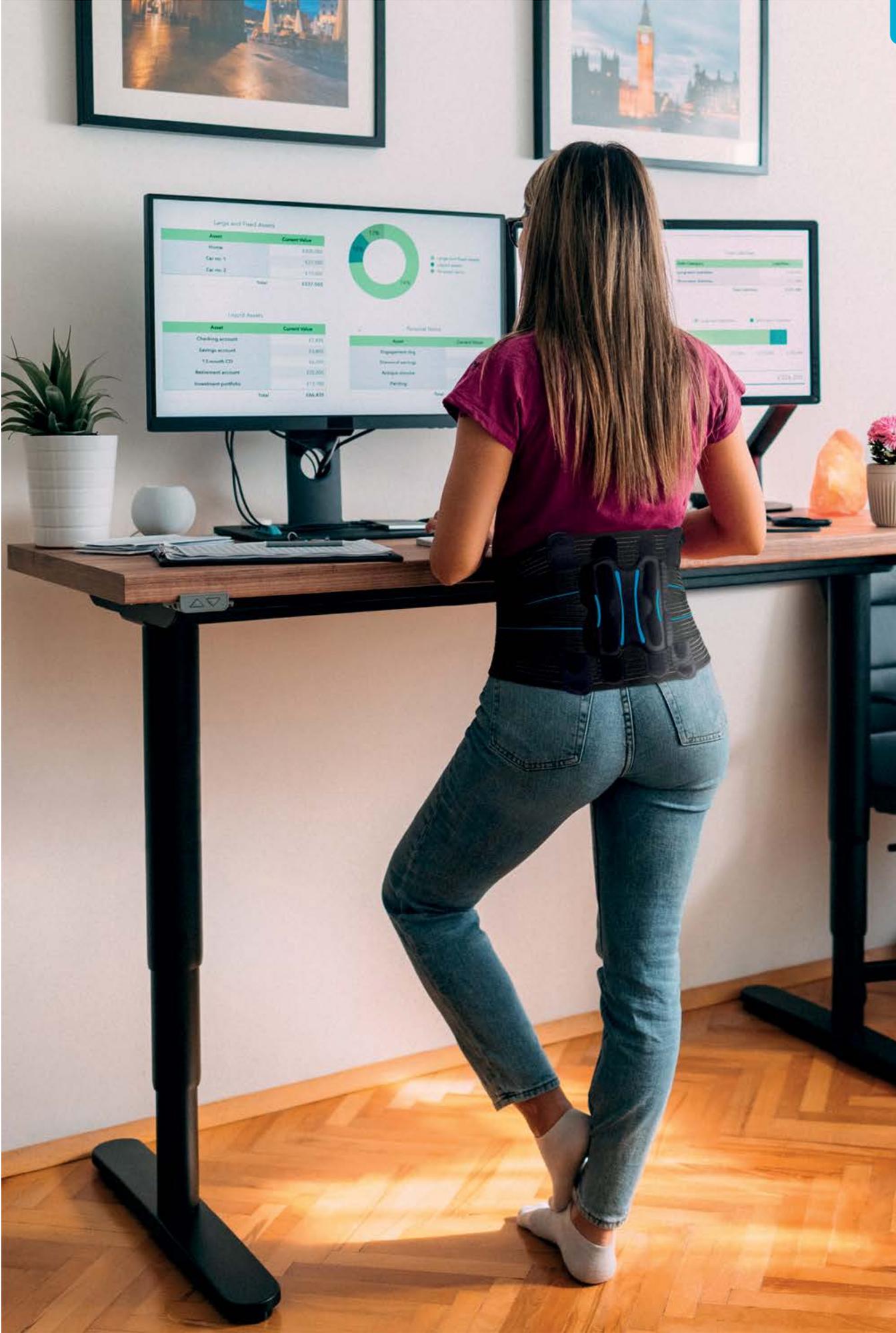

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

AUTRES
GAMMES



TRONC & RACHIS

La colonne vertébrale (rachis) représente la charpente du tronc du corps humain.

Elle est formée par la superposition des vertèbres (7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires), du sacrum et du coccyx. Ces vertèbres sont articulées entre elles par les disques intervertébraux et les éléments associés tels que les muscles et les ligaments.

Les disques intervertébraux permettent la mobilité de la colonne vertébrale (flexion, torsion, rotation) et amortissent les chocs dus aux mouvements du corps tout en répartissant les forces exercées sur les vertèbres. Ce sont de véritables coussinets flexibles permettant aux vertèbres de bouger.

La colonne vertébrale possède deux fonctions essentielles :

Mécanique : Elle possède 3 mouvements de liberté : la flexion/extension dans le plan sagittal (ou longitudinal), l'inclinaison dans le plan frontal (perpendiculaire au plan sagittal) et la rotation axiale.

Neurologique : Les vertèbres protègent la moelle épinière qui chemine dans le canal rachidien et dont le rôle est central dans le système nerveux.

COLLIER CERVICAL SOUPLE

Collier C1


CHRONIQUE

INDICATIONS :

Torticolis, Cervicarthrose débutante.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système double densité «serpentine» : densité de mousse optimisée pour un port prolongé conservant sa qualité dans le temps,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Densité 32 kg/m³.

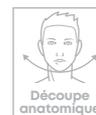


Découpe anatomique



CONFORT

Forme anatomique
bonne repose au niveau des maxillaires et du larynx.

Plusieurs hauteurs disponibles
pour une meilleure adaptation morphologique.

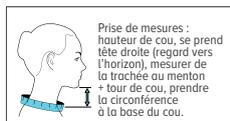

Prise de mesures : hauteur de cou, se prend tête droite (regard vers l'horizon), mesurer de la trachée ou menton + tour de cou, prendre la circonférence à la base du cou.

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 5 cm		HAUTEUR DE COU 6,5 cm		HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	8435025933750	6034526	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfant	29 - 34 cm	-	-	8435025933767	6034527	-	-	-	-	-	-
1	30 - 34 cm	-	-	-	-	8435025933774	6034545	8435025933811	6034530	8435025933712	6034538
2	35 - 39 cm	-	-	-	-	8435025933781	6034547	8435025933828	6034531	8435025933729	6034540
3	40 - 44 cm	-	-	-	-	8435025933798	6034548	8435025933842	6034533	8435025933736	6034541
4	45 - 50 cm	-	-	-	-	8435025933804	6034549	8435025933866	6034535	8435025933743	6034544

LPPR : 7132704 / 9,25€^{TTC}

Prescrire : Collier C1 - Orliman®

COLLIER CERVICAL SEMI-RIGIDE

Collier C2

TRAUMATIQUE


CHRONIQUE

INDICATIONS :

Névralgie cervico-brachiale, Cervicarthrose aiguë, Entorse légère.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système double densité «serpentine» : densité de mousse optimisée pour un port prolongé conservant sa qualité dans le temps,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Renfort intégré inamovible en plastique,
- Densité 32 kg/m³.

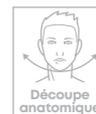


Découpe anatomique



CONFORT

Forme anatomique
bonne repose au niveau des maxillaires et du larynx.

Plusieurs hauteurs disponibles
pour une meilleure adaptation morphologique.

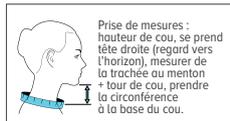

Prise de mesures : hauteur de cou, se prend tête droite (regard vers l'horizon), mesurer de la trachée ou menton + tour de cou, prendre la circonférence à la base du cou.

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 5 cm		HAUTEUR DE COU 6,5 cm		HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	8435025933934	6034502	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfant	29 - 34 cm	-	-	8435025933941	6034503	-	-	-	-	-	-
1	30 - 34 cm	-	-	-	-	8435025933958	6034504	8435025933989	6034509	8435025933897	6034516
2	35 - 39 cm	-	-	-	-	8435025933965	6034505	8435025933996	6034510	8435025933903	6034518
3	40 - 44 cm	-	-	-	-	8435025933972	6034507	8435025934009	6034512	8435025933910	6034519
4	45 - 50 cm	-	-	-	-	-	-	8435025934016	6034513	8435025933927	6034522

LPPR : 7132733 / 13,10€^{TTC}

Prescrire : Collier C2 - Orliman®

COLLIER CERVICAL C2 ÉVOLUTIF EN C1


Collier C2 évolutif

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :**Sans renfort :** Torticolis, Cervicarthrose débutante.**Avec renfort :** Névralgie cervico-brachiale, Cervicarthrose aiguë, Entorse légère.**CARACTÉRISTIQUES :**


- Modèle 2 en 1 évolutif grâce à son renfort amovible permettant le passage d'un collier semi-rigide C2 à un collier souple C1,
- Découpe anatomique qui améliore le maintien vertical et limite le mouvement de rotation de la tête,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Densité 50 kg/m³.

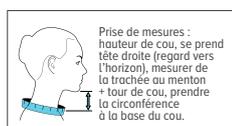HAUTEUR DE COU
7,5 cmHAUTEUR DE COU
9,5 cmHAUTEUR DE COU
10,5 cm

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	30 - 34 cm	8435025934160	6323280	8435025934207	6323285	8435025934085	6323289
2	35 - 39 cm	8435025934177	6323281	8435025934443	6323286	8435025934092	6323290
3	40 - 44 cm	8435025934184	6323283	8435025934450	6323287	8435025934108	6323291
4	45 - 50 cm	8435025934191	6323284	8435025934467	6323288	8435025934115	6323292

LPPR : 7132733 / 13,10€^{TTC}

Prescrire : Collier C2 évolutif - Orliman®

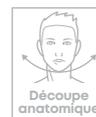

Découpe anatomique



ÉVOLUTIF

Insertion du renfort
par l'intérieur du collierFixation auto-agrippante
au design premium
pour faciliter la mise en place.

oneplus COLLIER CERVICAL SEMI-RIGIDE

Collier C2

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme léger des parties osseuses (apophyse épineuse et transverse) et molles (coup du lapin), Soins post-opératoire, Torticolis, Cervicalgie, Cervicobrachialgie, Syndrome de compression, Affection rhumatismale et/ou dégénérative.

CARACTÉRISTIQUES :

- Découpe anatomique améliorant le maintien vertical et limitant le mouvement de rotation de la tête pour une bonne repose au niveau des maxillaires et du larynx,
- Renfort plastique inamovible pour assurer un port stable,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Densité 50 kg/m³.

HAUTEUR DE COU
6,5 cmHAUTEUR DE COU
7,5 cmHAUTEUR DE COU
9,5 cmHAUTEUR DE COU
10,5 cm

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 6,5 cm		HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	50 - 53 cm	8435025935556	6323259	8435025935587	6323270	8435025935617	6323273	8435025934474	6323274
2	53 - 56 cm	8435025935563	6323268	8435025935594	6323271	8435025935624	6323278	8435025934481	6323275
3	56 - 59 cm	8435025935570	6323269	8435025935600	6323272	8435025935631	6323279	8435025934757	6323277

LPPR : 7132733 / 13,10€^{TTC}

Prescrire : Collier C2 One Plus - Orliman®



Grandes tailles



SPÉCIFIQUE

Bords arrondis
améliorant le confort.Fixation auto-agrippante
au design premium
pour faciliter la mise en place.

COLLIER CERVICAL RIGIDE

Collier C3

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme cervical, Entorse moyenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Réglable en hauteur par fixation auto-agrippante,
- Structure plastique.




Bords du collier recouverts
d'un capitonnage
en simili-cuir

TAILLE	TOUR DE COU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	36 - 40 cm	8435025933668	4640802
2	41 - 45 cm	8435025933675	4640819
3	46 - 50 cm	8435025933682	4640825

LPPR : 7132650 / **15,71€^{TTC}**

Prescrire : Collier C3 - Orliman®

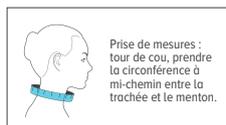

COLLIER CERVICAL RIGIDE

Collier C4

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse grave, Trachéotomie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Appui sternal (mentonnier) et occipital,
- Immobilisation du rachis cervical avec ouverture trachéale,
- Structure plastique avec plaque perforée permettant la prise de pouls et un passage de canule pour une trachéotomie.




Mentonnière permettant
de limiter le mouvement
de la tête

TAILLE	TOUR DE COU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	28 - 33 cm	8435025933699	9767950
2	33 - 43 cm	8435025933705	9767967

LPPR : 7132868 / **18,77€^{TTC}**

Prescrire : Collier C4 - Orliman®

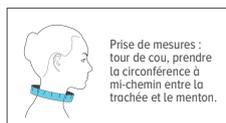

La LOMBALGIE

Fléau du siècle, symptôme d'une société malade de sa sédentarité, expression de l'accumulation du stress...

Le mal de dos, et tout particulièrement sa forme la plus fréquente, la lombalgie, est un véritable enjeu de santé publique.



des Français souffriront un jour de lombalgie commune.¹



1 personne sur 2

connaît une récurrence dans l'année.²

50-55 ans


est la tranche d'âge recensant les personnes les plus à risque de souffrir de lombalgie.³

LA CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Une aide précieuse pour préserver & accompagner la mobilité.

SON ACTION




- ✓ Soutient le bas du dos.
- ✓ Sécurise et limite les mouvements extrêmes.
- ✓ Compense les déséquilibres temporaires.
- ✓ Permet d'adopter une posture adaptée au bien-être.
- ✓ Réduit la peur de la douleur et donc la contraction musculaire.

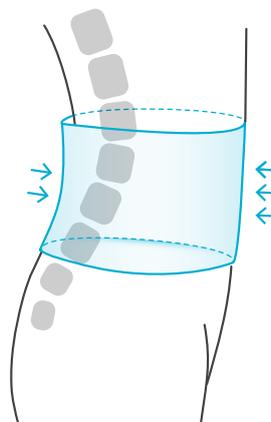

Sources : ¹Lombalgie ou mal de dos, de quoi parle-t-on ? L'Assurance Maladie, décembre 2023. ameli.fr - ²Mal de dos (lombalgie). Vidal, janvier 2024. vidal.fr - ³Lombalgie. Organisation Mondiale de la Santé, juin 2023. who.int

Dos

Guide de délivrance

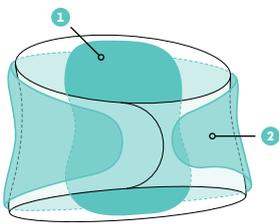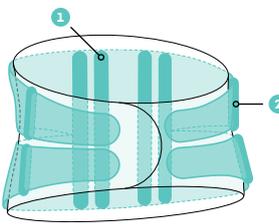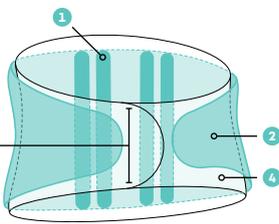	Discopathie. Hernie discale. Lombarthrose. Spondylarthrose. Tassement lombaire non déplacé. Stabilisation lombaire. Lumbago.	Lombalgie commune (aiguë, subaiguë, chronique). Hernie discale. Protrusion discale. Sciatique. Cruralgie. Syndrome sacro-iliaque. Stabilisation lombaire.	Lombalgie commune (aiguë, subaiguë, chronique). Lumbago. Sciatique. Cruralgie.		
OBJECTIF	Immobiliser et stabiliser la zone en souffrance.	Adopter les bonnes postures et diminuer la pression sur les disques intervertébraux.			
ACTION	Réduction du périmètre abdominal pour avoir un effet corset.	Augmentation de la pression intra-abdominale pour obtenir une correction posturale correcte.			
ÉLÉMENT MÉCANIQUE	 <p>Coque rigide ou souple ¹ + système de serrage type corset ²</p>	 <p>Baleines dorsales ¹ + sangles de serrage combinées à un système de boucles ²</p>	 <p>Baleines dorsales ¹ + système de renfort et rappel postural ² + plastron abdominal ³ + tissu élastique ⁴</p>		
PROFIL PATIENT TYPE D'ACTIVITÉS	PERSONNE ACTIVE TRÈS ALGIQUE		PERSONNE ACTIVE		
	 Repos professionnel ou activités relevant du secteur tertiaire	 Douleurs intenses	 Efforts soutenus	 Activités tertiaires	
DÉLIVRANCE PRODUIT	 Dynamic Fix® p.60 ÉVOLUTIF	 Fixquick p.60 TENDANCE	 Lombobelt Activ® p.61 CONFORT	 Lombobelt Renfort® p.62 CONFORT	 L'Évolutive® p.63 ÉVOLUTIF

← CEINTURES CORSET →

ADAPTER LA DÉLIVRANCE À LA MORPHOLOGIE DU PATIENT

TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR DE LA CEINTURE
< 160 cm	H21 • H23 cm
> 160 cm	H26 • H28 cm

► Indépendamment de la taille du patient, sa posture lors de son activité professionnelle ou de loisir peut avoir un impact sur le choix de la hauteur de sa ceinture :





Posture principale
ACCROUPEE

H21 ou H23
possible



Posture principale
DEBOUT

H26 ou H28
possible

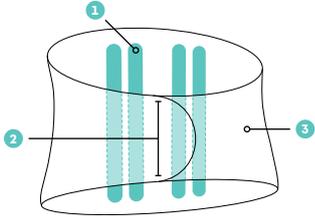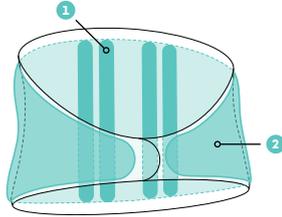Lombalgie commune (aiguë, subaiguë, chronique). Fatigue musculaire passagère. Déficience musculaire.		Lombalgie passagère liée à la grossesse.	
Adopter les bonnes postures et diminuer la pression sur les disques intervertébraux.	Décontracter les muscles.	Adopter les bonnes postures et diminuer la pression sur les disques intervertébraux.	Recentrer et restaurer l'équilibre naturel.
Augmentation de la pression intra-abdominale pour obtenir une correction posturale correcte.		Soutien musculaire en transférant le poids du bébé sur les hanches.	
 <p>Baleines dorsales ¹ + plastron abdominal ² + tissu élastique ³</p>		 <p>Baleines dorsales ¹ + système de rappel postural ²</p>	
PERSONNE ACTIVE		PERSONNE MODÉRÉMENT ACTIVE & SÉNIOR	
 Activités quotidiennes	 Repos & activité d'intérieur	 Loisirs & prévention	 Durant la grossesse et après l'accouchement
 Lombosoft® p.64 LÉGÈRETÉ	 Lombotherm® p.65 CONFORT	 Lombobelt® p.65 CONFORT	 Ninaë evolution® p.66 ÉVOLUTIF

CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE

TYPE DE LOMBALGIE
SELON LA DURÉE DES SYMPTÔMES



CEINTURE CORSET

Dynamic Fix® 23 & 28 cm

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tassements vertébraux, Métastases vertébrales, Spondylolyse, Spondylarthrite, Discarthrose, Post-opératoire, Lombarthrose, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Ostéoporose, Stabilisation lombaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur du plastron abdominal :
14 cm sur le modèle hauteur 23 cm,
18 cm sur le modèle hauteur 28 cm.




Fournie avec 2 coques interchangeables
(thermoformable ou semi-rigide) pour adapter la ceinture aux différentes pathologies du patient (immobilisation renforcée à modérée).



Système multi-poulies au dos associé au réglage par fils permet une contention homogène et un serrage sans effort.

HAUTEUR 23 cm				HAUTEUR 28 cm	
TAILLE	TOUR DE TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	75 - 85 cm	8435025938526	6040808	8435025938571	6018166
2	85 - 95 cm	8435025938533	6040809	8435025938588	6018167
3	95 - 110 cm	8435025938540	6040810	8435025938595	6018168
4	110 - 125 cm	8435025938557	6040811	8435025938656	6018169
5	125 - 140 cm	8435025938564	6040812	8435025938663	6018170

LPPR : 201E00.05 / **167,69€^{TTC}**

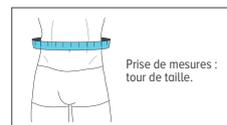

Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Dynamic Fix® - Orliman®

CEINTURE CORSET

Fixquick 26 cm

VIDÉO DE POSE



TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tassements vertébraux, Spondylolyse, Spondylarthrite, Discarthrose, Post-opératoire, Lombarthrose, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Ostéoporose, Stabilisation lombaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Coque rigide thermoformable offrant un maintien renforcé optimal de la région lombaire et la possibilité d'adapter la ceinture corset aux différentes morphologies tout en évitant les points de pression.



Plastron découpable et indémaillable + rappel postural amovible
pour adapter la ceinture corset à la taille du patient.




Système de fermeture Boa®



1 cran = 1 millimètre de serrage.

HAUTEUR 26 cm			
TAILLE	TOUR DE TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	85 - 140 cm	8435025938670	6297251

LPPR : 201E00.05 / **167,69€^{TTC}**

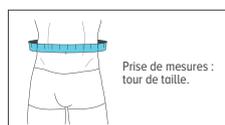

Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Ceinture corset Fixquick - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CEINTURE DE SOUTIEN THORACO-LOMBAIRE

Dorso Evotec® 26 cm

VIDÉO
DE POSE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lumbago, Lombosciatique, Hernie discale, Discopathie, Cruralgie, Spondylolyse et Spondylarthrite, Ostéoporose, Processus dégénératif, Attitude cyphotique, Muscles faibles et atones, Traitement pré et post-chirurgical.

CARACTÉRISTIQUES :**Système dorsal amovible et semi-rigide :**

maintient la colonne vertébrale et s'ajuste en fonction de la morphologie du patient.

Ceinture de soutien lombaire :

- Fine avec double serrage, elle permet de s'adapter aux différentes morphologies,
- Coutures sans fil pour éviter les points de frottement.



Personne très algique



ÉVOLUTIF

2 baleines dorsales amovibles


Matériau élastique dense pour un meilleur maintien dorso-lombaire.

2 sangles de maintien auto-agrippantes réglables pour une meilleure adaptabilité à la taille du patient.

4 baleines dorsales

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	63 - 75 cm	8435025938687	6295771
2	75 - 83 cm	8435025938694	6295772
3	83 - 91 cm	8435025938700	6295773
4	91 - 99 cm	8435025938717	6295774
5	99 - 107 cm	8435025938724	6295776
6	107 - 115 cm	8435025938731	6295777
7	115 - 123 cm	8435025938748	6295778

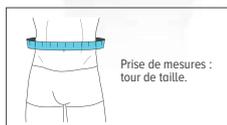LPPR : 201E00.041 / **89,70€^{TTC}**Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Dorso Evotec® - Orliman®

NOUVEAUX LOOK & TAILLANTS

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombobelt Activ® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lombalgie commune aiguë à chronique, Lumbago, Déficience musculaire, Lombarthrose, Hernie discale, Protrusion discale, Sciatique, Cruralgie, Syndrome sacro-iliaque, Stabilisation lombaire, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 baleines dorsales conformables, plus souples et indépendantes pour une meilleure adaptabilité morphologique et un serrage plus facile,
- 2 baleines antérieures souples,
- Découpe spécifique et matériaux confortables pour offrir un excellent confort,
- Plastron abdominal court sur les 2 hauteurs :
13 cm sur le modèle hauteur 21 cm,
15 cm sur le modèle hauteur 26 cm.



Douleurs intenses



CONFORT


4 sangles de serrage combinées à un système de boucles pour une correction posturale sans effort.

Réglage distinct dorso-lombaire et sacro-lombaire pour un maintien progressif diminuant les contraintes exercées sur les vertèbres lombaires.

HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)

HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)

TAILLE	TOUR DE TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	60 - 75 cm	8435025944633	6394659	8435025944589	6394665
2	75 - 90 cm	8435025944787	6394660	8435025944596	6394666
3	90 - 105 cm	8435025944794	6394662	8435025944602	6394667
4	105 - 120 cm	8435025944831	6394663	8435025944619	6394668
5	120 - 140 cm	8435025944848	6394664	8435025944626	6394669

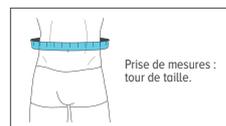LPPR : 201E00.021 / **47,19€^{TTC}**LPPR : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Lombobelt Activ® - Orliman®

Lombobelt Renfort® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lombalgie commune aiguë à chronique, Sciatique, Cruralgie, Hernie discale, Déficience musculaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 baleines antérieures souples,
- Matériau en tricot unidirectionnel très résistant,
- Tissu 3D aéré au niveau des baleines dorsales,
- Passe-doigts (des 2 côtés et aux 2 extrémités) et élastique de pré-positionnement au niveau du double serrage facilitant la mise en place,
- Plastron abdominal court sur les 2 hauteurs : 12 cm sur le modèle hauteur 21 cm, 15 cm sur le modèle hauteur 26 cm.




Double rappel postural fixe pour une contention uniforme et graduelle en fonction de l'effort à fournir.

4 baleines rigides conformables et indépendantes.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)		HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	60 - 75 cm	8435025944855	6394670	8435025945548	6394676
2	75 - 90 cm	8435025944862	6394671	8435025946859	6394677
3	90 - 105 cm	8435025944879	6394672	8435025946866	6394679
4	105 - 120 cm	8435025944886	6394673	8435025946873	6394680
5	120 - 140 cm	8435025945449	6394674	8435025946880	6394681
6	140 - 160 cm	8435025945456	6394675	8435025948259	6394786

LPPR : 201E00.021 / **47,19€^{TTC}** LPPR : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**

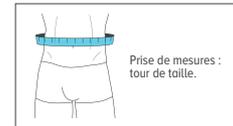

Prescrire : Lombobelt Renfort® - Orliman®



Ceinture de soutien lombaire 32 cm



CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lombalgie et sciatique, Hernie discale, Spondylolyse et spondylarthrite / arthrose, Tension ou déchirure des muscles ou des ligaments qui soutiennent les vertèbres lombaires,



Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :


- Système de 4 sangles semi-rigides et réglables dont 2 avec système de fermeture éclair,
- 3 renforts semi-rigides pour un maintien accru de la zone abdominale,
- Système de fixation auto-agrippant,
- Hauteur dorsale : 32 cm, Hauteur du plastron : 32 cm,
- Contient du latex.



Double bande de rappel postural en tissu élastique avec système de passe-main.

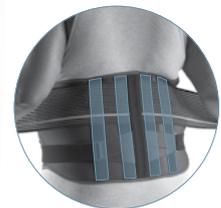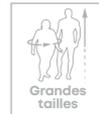


4 baleines dorsales en acier galvanisé.

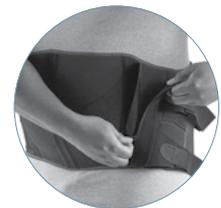

Fermeture éclair antéro-latérale facilitant le positionnement et le réglage de la ceinture.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 32 cm	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	132 - 142 cm	8435025936614	6037713
2	142 - 152 cm	8435025936621	6037715
3	152 - 162 cm	8435025936638	6037767
4	162 - 172 cm	8435025936645	6037770

LPPR : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**

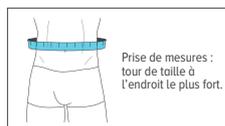

Prescrire : Ceinture de soutien lombaire One Plus - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

L'Évolutive® 21 & 26 cm



CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lombalgie commune aiguë à chronique, Sciatique, Cruralgie, Hernie discale, Déficience musculaire.

CARACTÉRISTIQUES :


- 4 baleines dorsales souples et indépendantes,
- 2 baleines antérieures souples,
- Matériaux fins et souples pour épouser la forme des hanches et garantir un port prolongé agréable,
- Fixation auto-agrippante n'abîmant pas les vêtements,
- Passe-doigts des 2 côtés facilitant la mise en place.

2 coloris disponibles

● noir ou ● gris



Plastron abdominal de 13 cm
pour plus de confort en position assise.

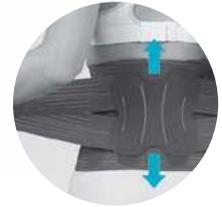

Système lombaire amovible
permet d'adapter le rappel postural et le niveau de maintien en fonction de la douleur et des activités à risque.



TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)		HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	60 - 75 cm	● 8435025947894 ● 8435025948266	● 6394494 ● 6394787	● 8435025948204 ● 8435025947849	● 6394504 ● 6394499
2	75 - 90 cm	● 8435025948167 ● 8435025947771	● 6394495 ● 6394490	● 8435025948211 ● 8435025947856	● 6394505 ● 6394500
3	90 - 105 cm	● 8435025948174 ● 8435025947788	● 6394496 ● 6394491	● 8435025948228 ● 8435025947863	● 6394506 ● 6394501
4	105 - 120 cm	● 8435025948181 ● 8435025947795	● 6394497 ● 6394492	● 8435025948235 ● 8435025947870	● 6394507 ● 6394502
5	120 - 140 cm	● 8435025948198 ● 8435025947832	● 6394498 ● 6394493	● 8435025948242 ● 8435025947887	● 6394509 ● 6394503
		LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}	

Prescrire : L'Évolutive® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Mouv'N Fit® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).

CARACTÉRISTIQUES :


- Matériaux fins et souples pour un port prolongé agréable,
- Fixation auto-agrippante n'abîmant pas les vêtements,
- Système de rappel postural amovible et ajustable en hauteur.



Plastron abdominal de 13 cm
pour plus de confort en position assise.



3 coloris disponibles

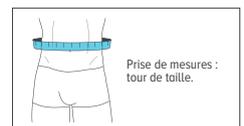

TAILLE	TOUR DE TAILLE	● BLEU MARINE / TURQUOISE		● BLEU MARINE / ORANGE		● BLEU MARINE / VERT		
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	
HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)	1	60 - 75 cm	8435025939332	6327421	8435025939431	6327428	8435025939561	6327433
	2	75 - 90 cm	8435025939349	6327424	8435025939448	6327429	8435025939578	6327434
	3	90 - 105 cm	8435025939356	6327425	8435025939455	6327430	8435025939585	6327435
	4	105 - 120 cm	8435025939363	6327426	8435025939462	6327431	8435025939592	6327436
	5	120 - 140 cm	8435025939370	6327427	8435025939479	6327432	8435025939646	6327437
HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)	1	60 - 75 cm	8435025939387	6327438	8435025939486	6327443	8435025939752	6327811
	2	75 - 90 cm	8435025939394	6327439	8435025939493	6327444	8435025939806	6327812
	3	90 - 105 cm	8435025939400	6327440	8435025939509	6327445	8435025939813	6327813
	4	105 - 120 cm	8435025939417	6327441	8435025939516	6327447	8435025939820	6327814
	5	120 - 140 cm	8435025939424	6327442	8435025939547	6327448	8435025939905	6327815

LPPR : H21 cm : 201E00.021 / **47,19€^{TTC}** / H26 cm : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**

Prescrire : Ceinture de soutien lombaire Mouv'N Fit® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombosoft® 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lombalgie, Lumbago, Sciatalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot 3D procurant une grande souplesse et agissant comme une seconde peau,
- Baleines souples permettant une parfaite adaptation morphologique,
- Baleines dorsales amovibles,
- Hauteur du plastron abdominal : 13 cm.



Tissu en maille aérée
ultra-respirant.



Activités quotidiennes



LÉGÈRETÉ


Système de passe-doigts
pour faciliter la mise en place.

Élasticité supérieure aux bords
pour un maximum de confort.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE HOMME	TOUR DE TAILLE FEMME	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	60 - 75 cm	55 - 65 cm	8435025936652	6040802
2	75 - 85 cm	65 - 75 cm	8435025936669	6040803
3	85 - 100 cm	75 - 90 cm	8435025936676	6040804
4	100 - 115 cm	90 - 100 cm	8435025936683	6040805
5	115 - 130 cm	100 - 115 cm	8435025936690	6040806
6	130 - 140 cm	115 - 125 cm	8435025936706	6040807

LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}

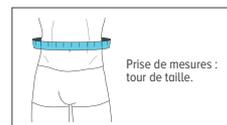

Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Lombosoft® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombofit® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lumbago, Fatigue musculaire,
Déficience musculaire,
Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissu souple,
- Tricot 3D respirant au niveau des baleines dorsales pour plus de confort,
- 3 tailles,
- Hauteur du plastron abdominal :
15 cm sur le modèle hauteur 21 cm,
17 cm sur le modèle hauteur 26 cm.



Activités quotidiennes



LÉGÈRETÉ

Système de passants latéraux
pour maintenir les sangles de rappel postural à portée de main.

Système de passe-main




HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)

HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)

TAILLE	TOUR DE TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	75 - 95 cm	8435025936553	6017609	8435025936584	6017612
2	95 - 120 cm	8435025936560	6017610	8435025936591	6017613
3	120 - 145 cm	8435025936577	6017611	8435025936607	6017614

LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}

LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}

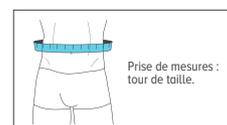

Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Lombofit® - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

NOUVEAUX LOOK & TAILLANTS

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombobelt® 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lombalgie commune aiguë à chronique,
Fatigue musculaire passagère,
Déficience musculaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 baleines dorsales conformables et indépendantes,
- 2 baleines antérieures souples,
- Tissu 3D aéré dans le dos,
- Double système de passe-main et simple serrage facilitant l'utilisation et la mise en place.



Plastron abdominal double angle

2/3 inférieur et 1/3 supérieur pour une meilleure adaptation à la morphologie du patient.


Matériau élastique

permettant d'augmenter la pression intra-abdominale et d'améliorer la correction posturale.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	60 - 75 cm	8435025944534	6394682
2	75 - 90 cm	8435025944541	6394683
3	90 - 105 cm	8435025944558	6394685
4	105 - 120 cm	8435025944565	6394686
5	120 - 140 cm	8435025944572	6394687

LPPR : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**

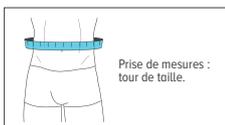

Prescrire : Lombobelt® - Orliman®

NOUVEAUX LOOK & TAILLANTS

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombotherm® 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lombalgie commune aiguë à chronique,
Fatigue musculaire passagère,
Déficience musculaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Compresse chaud/froid Thermopad fournie apportant une source de chaleur décontractante ou un effet antalgique par le froid en fonction du résultat recherché en diffusion progressive,
- 4 baleines dorsales conformables apportent un soutien musculaire durant les activités d'intérieur,
- 2 baleines antérieures souples,
- Système de maintien de la compresse réglable en hauteur permettant de conserver de la mobilité,
- Simple serrage pour faciliter l'utilisation et la mise en place.



Fixation auto-agrippante micro-injection

facilement repositionnable sans adhérer aux vêtements.


Tissu 3D aéré
dans le dos.

Matériau procurant un effet seconde peau

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	75 - 95 cm	8435025944374	6394688
2	95 - 120 cm	8435025944381	6394689
3	120 - 145 cm	8435025944527	6394691

LPPR : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**

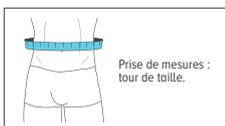

Fournie avec une compresse chaud/froid Thermopad
Possibilité de commander la compresse seule, voir page 219.



Prescrire : Lombotherm® - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Ninaë casual® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie et les douleurs pelviennes, Réduit l'inconfort postural durant l'activité, Atténue l'effet de pesanteur exercé sur le ventre en position debout.

Après l'accouchement : Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits).

CARACTÉRISTIQUES :

Conception en 2 parties amovibles pour un soutien lombaire optimal et un transfert du poids du bébé sur les hanches, sans pression sur le ventre :

- Bandeau lombaire avec 2 sangles de rappel postural dédoublées pour un ajustement personnalisé du serrage, 4 baleines souples disposées en éventail qui s'adapteront à la cambrure du dos et un tissage aéré pour plus de confort.
- Partie avant universelle, ajustable selon l'évolution de la grossesse (ligne dégagée à l'aîne), tissage extensible au niveau du pubis pour éviter toute pression superflue sur la vessie.



Partie avant amovible et évolutive
avec ligne dégagée à l'aîne.

Rappel postural ajustable

TAILLE	HAUTEUR 21 cm		HAUTEUR 26 cm	
	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025937895	6211573	8435025938496	6211574
LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}		

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Ninaë casual® - Orliman® Maternity

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE MODULABLE

Ninaë evolution® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie et les douleurs pelviennes, Réduit l'inconfort postural durant l'activité, Atténue l'effet de pesanteur exercé sur le ventre en position debout.

Après l'accouchement : Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits).

CARACTÉRISTIQUES :

- Bandeau lombaire avec 2 sangles de rappel postural dédoublées pour un ajustement personnalisé du serrage, 4 baleines souples disposées en éventail qui s'adapteront à la cambrure du dos et un tissage aéré pour plus de confort,
- **Bandeau intermédiaire souple avec pads de massage exerçant une pression douce sur les zones douloureuses dans le bas du dos,**
- Partie avant universelle, ajustable selon l'évolution de la grossesse, ligne dégagée à l'aîne, tissage extensible au niveau du pubis pour éviter toute pression superflue sur la vessie.



Rappel postural ajustable

Partie avant amovible et évolutive
avec ligne dégagée à l'aîne.

Bandeau souple avec pads de massage

TAILLE	HAUTEUR 21 cm		HAUTEUR 26 cm	
	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025938502	6211582	8435025938519	6211584
LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}		

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm



Design Switchsystem™
offrant plusieurs choix de combinaisons,
plus d'informations page 153.

Prescrire : Ninaë evolution® - Orliman® Maternity

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

BANDE PELVIENNE

Monaë light®

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie, les douleurs de la symphyse pubienne (pubalgies), les douleurs pelviennes et/ou sacro-iliaques, Protège le périnée, Prévient et soulage les douleurs sciatiques.

Après l'accouchement : Soulage les douleurs de la symphyse pubienne, Soutient le plancher pelvien, Permet une action complémentaire aux séances de rééducation périnéale (utilisable lors des activités quotidiennes et/ou en position debout prolongée).

CARACTÉRISTIQUES :

- Bande pelvienne avec système de sangle principale + 2 sangles latérales réglables offrant une contention ferme mais ajustable, sans risque de compression superflue,
- Bande antiglisse pour un bon maintien en position durant les activités quotidiennes.

Pads de massage amovibles
limitant la pression au niveau du coccyx.



Sangles latérales

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025938755	6211590

Non remboursé

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Monaë light® - Orliman® Maternity

CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINAL

Monaë activ® 22 cm

CHRONIQUE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits), Soulage la lombalgie, Soutient les muscles abdominaux lors de l'effort, Permet une action complémentaire aux séances de rééducation périnéale.

CARACTÉRISTIQUES :

- Plastron abdominal double accroche + zone de fixation étendue offrant un serrage toujours optimal, adapté selon l'évolution de la morphologie de la patiente,
- Tissu élastique aéré en partie arrière pour une contention homogène et plus de confort.



HAUTEUR 22 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	80 - 95 cm	8435025937864	6211575
2	95 - 110 cm	8435025937871	6211576
3	110 - 130 cm	8435025937888	6211578

LPPR : 201E00.031 / 57,54€^{TT}



Prescrire : Monaë activ® - Orliman® Maternity

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CORRECTEUR DE POSTURE

Dorso Lead®


CHRONIQUE

INDICATIONS :

Dorsalgie, Attitude cyphotique, Correction de mauvaises positions et défaut de posture.

CARACTÉRISTIQUES :

- Deux bandes supérieures passant sur les épaules, limitent le mouvement vers l'avant ainsi que la flexion de la colonne vertébrale et l'affaissement du corps,
- Son utilisation régulière permet d'acquérir de bons réflexes en matière de posture,
- Port discret sous un vêtement grâce à sa couleur blanche.

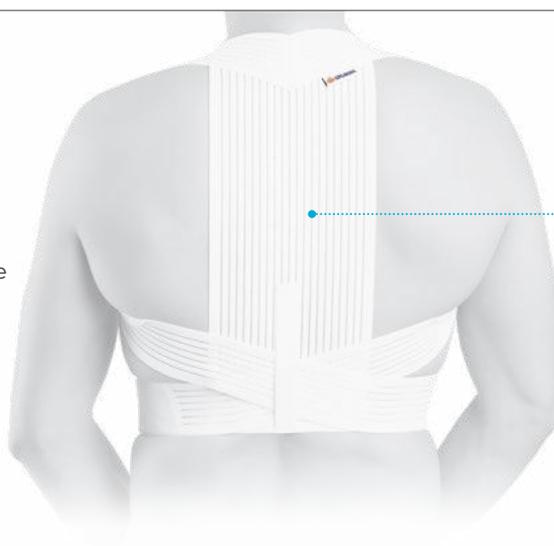

Activités tertiaires




LÉGÈRETÉ

Large bande dorsale en tissu élastique multibande respirant aide à harmoniser l'alignement de la colonne vertébrale avec les épaules et le bassin.

TAILLE	TOUR DE BUSTE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	70 - 80 cm	8435025925205	6296833
2	80 - 90 cm	8435025925212	6296834
3	90 - 100 cm	8435025925229	6296835
4	100 - 110 cm	8435025925236	6296836
5	110 - 120 cm	8435025925243	6296837

Non remboursé

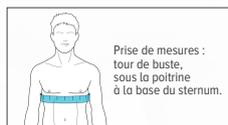

Prise de mesures :
tour de buste,
sous la poitrine
à la base du sternum.

Prescrire : Dorso Lead® - Orliman®

CEINTURE ABDOMINALE

Abdobelt® 18, 25 & 30 cm


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture des côtes (18 et 25 cm), Déficience de la paroi abdominale, Événtration, Post-opératoire, Chirurgie de l'obésité, Hernie simple.

CARACTÉRISTIQUES :

- Baleines souples,
- Plastron cicatriciel découpable et indémaillable en cas de stomie.

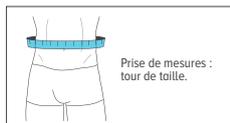

Prise de mesures :
tour de taille.

Tissu auto-agrippant élastique et aéré avec 2 ressorts spiraliums et 3 ressorts frontaux.



SPÉCIFIQUE



Patte hypogastrique amovible sur les hauteurs 18 et 25 cm.



Fracture des côtes

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 18 cm		HAUTEUR 25 cm		HAUTEUR 30 cm	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
2	70 - 85 cm	8435025937178	4722919	8435025937222	4722865	8435025937277	4722807
3	85 - 100 cm	8435025937185	4722925	8435025937239	4722871	8435025937284	4722813
4	100 - 115 cm	8435025937192	4722931	8435025937246	4722888	8435025937796	4722836
5	115 - 135 cm	8435025937208	4722948	8435025937253	4722894	8435025937802	4722842
6	135 - 150 cm	8435025937215	6010700	8435025937260	6010701	8435025937819	6010702

LPPR : 201E00.031 / 57,54€^{TTTC}

LPPR : 201E00.032 / 71,90€^{TTTC}

LPPR : 201E00.032
2x201E03.01 / 79,09€^{TTTC}

Prescrire : Abdobelt® - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CEINTURE ABDOMINALE

Abdobelt Stomie® 25 cm



INDICATIONS :

Traitement post-opératoire de colostomie et iléostomie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fournie avec un gabarit de découpe,
- Tissu élastique aéré avec 8 baleines souples.



Plastron cicatriciel
découvable et indémaillable.




Plaque de renfort
et une bande pour couvrir la poche.

HAUTEUR 25 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	75 - 85 cm	8435025937130	8138761
2	85 - 95 cm	8435025937147	8138778
3	95 - 105 cm	8435025937154	8138838
4	105 - 120 cm	8435025937161	8138873

LPPR : 201E00.032 / 71,90€^{TTC}

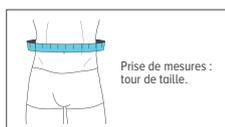

Prescrire : Abdobelt Stomie® - Orliman®

oneplus

Ceinture de soutien abdominal 29 cm


CHRONIQUE

INDICATIONS :


Contention d'hernies ventrales petites ou moyennes, Hypotonie abdominale, Traitement post-opératoire, Prophylaxie dans les professions ou les sports qui sollicitent excessivement la colonne lombo-sacrée, Lombalgie, Amélioration de la posture.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 baleines dorsales amovibles en acier galvanisé,
- 2 renforts souples sur la zone abdominale,
- Système de fermeture par bande auto-agrippante avec un système de passe-doigt,
- Hauteur dorsale : 29 cm,
Hauteur du plastron : 32 cm.

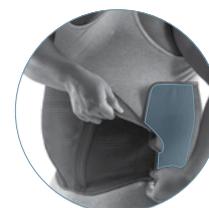

Large zone de tissu auto-agrippant
pour une adaptation morphologique optimale.

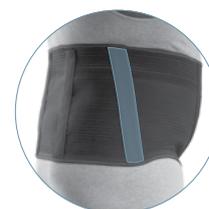


Renforts latéraux semi-rigides
pour une meilleure contention des tissus mous.

HAUTEUR 29 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	130 - 140 cm	8435025937826	6036089
2	140 - 150 cm	8435025937833	6036090
3	150 - 161 cm	8435025937840	6036091
4	161 - 172 cm	8435025937857	6036092

LPPR : 201E00.032 + 3x201E03.01 / 82,68€^{TTC}

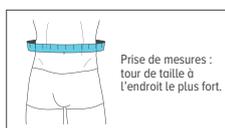

Prescrire : Ceinture de soutien abdominal One Plus - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES



AUTRES
GAMMES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS



ÉPAULE & BRAS





L'épaule et le coude sont des articulations complexes.

L'épaule permet de réaliser des mouvements dans les trois plans de l'espace (horizontal, frontal et sagittal) ainsi qu'un guidage précis des gestes du bras et de la main : mouvements d'abduction/adduction, de flexion/extension et de rotation externe ou latérale/interne ou médiale.

Le coude relie l'humérus (os du bras) aux deux os de l'avant-bras, le radius et l'ulna. Il offre une large amplitude de mouvements et remplit deux fonctions principales : la flexion (qui permet de plier le bras) et la pronation-supination (mouvements de rotation de l'avant-bras).

Épaule & Bras

Guide de délivrance

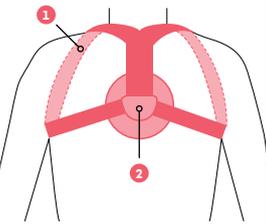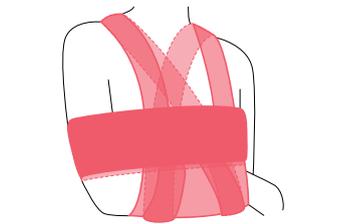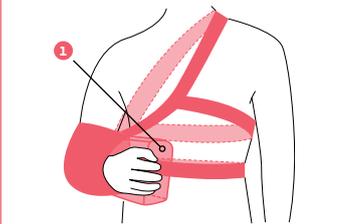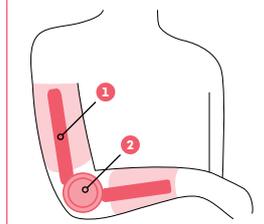← TRAUMATIQUE →						
	Fracture de la clavicule.	Entorse. Luxation. Fracture de l'épaule	Pathologie de la coiffe des rotateurs opérés.	Entorse. Luxation. Rupture ligamentaire. Post-opératoire du coude.		
OBJECTIF	Favoriser la consolidation osseuse.	Favoriser la cicatrisation des éléments articulaires et la consolidation osseuse.		Favoriser la cicatrisation des éléments articulaires.		
ACTION	Immobilisation stricte.			Immobilisation stricte ou relative.		
ÉLÉMENT MÉCANIQUE	 Sangles acromio-claviculaires 1 + système de traction réglable 2	 Système d'immobilisation coude au corps	 Système d'immobilisation d'épaule + coussin abduction 1	 Tiges télescopiques avec verrouillage 1 + cadran articulé 2		
DÉLIVRANCE PRODUIT	 Anneaux claviculaires p.81 LÉGÈRETÉ	 Should 90® p.74 CONFORT	 Bandage d'immo. d'épaule p.78 CONFORT	 Should 15-30® p.76 ÉVOLUTIF	 Should 30-45® p.77 ÉVOLUTIF	 Elbowlution® p.81 SPÉCIFIQUE
		 ShouldOP® (sans coussin) p.78 CONFORT	 Should'R® p.79 FACILE	 ShouldOP® (avec coussin 30°) p.76 ÉVOLUTIF		

← ANNEAUX CLAVICULAIRES × BANDAGES D'IMMOBILISATION × COUSSINS D'ABDUCTION × ATTELLE DE COUDE →


 Niveau d'immobilisation croissant des bandages d'épaule

CHRONIQUE

Paralysie. Hémiplégie

Améliorer le soutien et le confort.

Maintien du bras à angle droit.

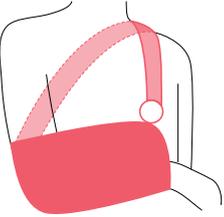



Support de bras en tissu / maille.



Should'R®
p.79
FACILE



Écharpe de contention de bras
p.80
CONFORT

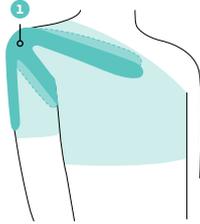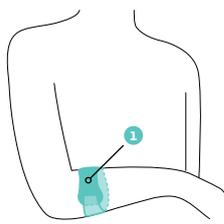Instabilité gléno-humérale et acromio-claviculaire.	Tendinite du coude.		
Recentrer et stabiliser l'articulation de l'épaule.	Réduire l'inflammation du tendon.		
Maintien et coaptation de l'épaule	Mise au repos du tendon.	Limiter l'effort musculaire et la mise en tension excessive des tendons.	
 Système Xstrap® 1	 Pad viscoélastique 1 + sangle	 Éclisse dorsale souple 1 + éclisse palmaire souple 2 + bras de levier court 3	
 Should Sport® p.74 TENDANCE	 Coudière Mouv'N Fit® p.83 TENDANCE	 Sangle Fixquick p.82 TENDANCE	 Epi'Control® p.83 ÉVOLUTIF

ÉPAULIÈRE

COUDIÈRE ET SANGLES

ATELLE DE POIGNET

ATELLE COMPLÉMENTAIRE

Pré et post-opératoire cryothérapie.



Épaulière CRYOPUMP®
p.75
CONFORT

ÉCHARPES

ÉPAULIÈRE

Should Sport®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lésion de la coiffe des rotateurs,
Instabilité gléno-humérale,
Instabilité acromio-claviculaire,
Reprise d'activité sportive.

CARACTÉRISTIQUES :


- Sangle Xstrap® brevetée apportant une contention efficace, empêchant une abduction et une rotation excessive et limitant les déséquilibres musculaires, source d'instabilité de l'épaule,
- Tricot 3D technique, extensible et respirant, limitant la transpiration pendant l'effort.



Système Xstrap®
permet de recentrer
l'articulation gléno-humérale
et de limiter l'instabilité
postérieure.

TAILLE	TOUR DE POITRINE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	84 - 94 cm	8435025924369	6183390
M	94 - 104 cm	8435025924376	2032257
L	104 - 114 cm	8435025924383	2032263
XL	114 - 126 cm	8435025924390	2032286

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TTC}

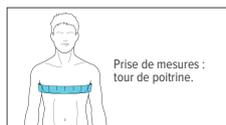

Prise de mesures :
tour de poitrine.

Sangle de maintien
pour une utilisation
de la phase
d'immobilisation
à la phase de reprise
d'activité.



Prescrire : Should Sport® - Orliman®

GILET D'IMMOBILISATION

Should 90®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Entorse acromio-claviculaire, Luxation et fracture de la clavicule (tête humérale, glène, trochiter), Post-opératoire, Neurologie : Paralytie, Hémiplegie.

CARACTÉRISTIQUES :


- Immobilisation spécifique en position coude au corps,
- Fixation auto-agrippante réversible,
- Modèle bilatéral.



Système de mise en place à 3 sangles

TAILLE	TOUR DE POITRINE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	71 - 85 cm	8435025924963	9802468
2	85 - 100 cm	8435025925014	9802474
3	100 - 115 cm	8435025925021	9802480
4	115 - 130 cm	8435025925038	9802497
5	130 - 145 cm	8435025925045	9802505

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TTC}

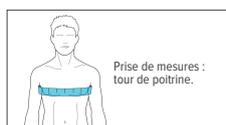

Prise de mesures :
tour de poitrine.

Prescrire : Should 90® - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Épaulière Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-opératoire et post-traumatique, Capsulite.

CARACTÉRISTIQUES :

- L'épaulière anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau de l'acromion pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses 3 sangles (dont une amovible) facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 sangle amovible,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025924406	6028940

LPPR : 6132607 / 15,24€ ^{TTC}

Prescrire : Épaulière Cryopump® - Orliman®

Comresse de gel anatomique pour une meilleure répartition du froid.



LE SAVIEZ-VOUS ?

33 %

des thérapeutes utilisent régulièrement la cryothérapie compressive en post-opératoire.

Source : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

AUTRES
GAMMES

COUSSIN D'ABDUCTION

Should 15-30®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fixation post-opératoire du membre supérieur,
Traumatologie du membre supérieur
scapulo-huméral, Pathologie de la coiffe
des rotateurs opérés.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins d'abduction d'épaule 15°
(joindre les 2 coussins pour obtenir
une abduction à 30°),
- Confortable grâce à une meilleure
répartition de la charge,
- Modèle bilatéral.



Réglage facile
par boucles et clip.




Balle d'exercice de la main
pour maintenir le tonus musculaire et
améliorer la circulation sanguine.

TAILLE	LONGUEUR DE L'AVANT-BRAS	TOUR DE POITRINE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	22 - 30 cm	56 - 84 cm	8435025924284	6034897
2	30 - 42 cm	76 - 104 cm	8435025924291	6034898
3	> 42 cm	92 - 120 cm	8435025924307	6034899

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TTC}

Prescrire : Should 15-30® - Orliman®

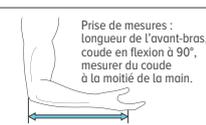

Prise de mesures :
longueur de l'avant-bras,
coude en flexion à 90°,
mesurer du coude
à la moitié de la main.

BANDAGE D'IMMOBILISATION

ShouldOp® (avec coussin 30°)

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fixation post-opératoire du membre supérieur,
Traumatologie du membre supérieur
scapulo-huméral, Pathologie de la coiffe
des rotateurs opérés.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Brevet déposé,**
- Modèle anatomique, proche du corps
et confortable au quotidien autorisant
la réalisation d'exercices de rééducation,
- La forme du coussin d'abduction permet
de positionner le bras dans diverses positions
de rotation et d'abduction,
- Mise en place aisée,
- Modèle bilatéral.



Livré avec un coussin
d'abduction 30°

Système de fixation
du bras à la ceinture abdominale.

Pas de passage de sangle
sur les épaules et les cervicales

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025924093	9641611

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TTC}

Prescrire : ShouldOp® (avec coussin 30°) - Orliman®

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

COUSSIN D'ABDUCTION

Should 30-45®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fixation post-opératoire du membre supérieur,
Traumatologie du membre supérieur
scapulo-huméral, Pathologie de la coiffe
des rotateurs opérés.

CARACTÉRISTIQUES :

- Coussin d'abduction d'épaule 30° ou 45°,
- Coussin anatomique en tissu Poromax® permettant d'éviter la transpiration,
- Confortable grâce à une meilleure répartition de la charge,
- Modèle bilatéral.



Réglage facile
par boucles et clip.



Balle d'exercice de la main
pour maintenir le tonus musculaire et
améliorer la circulation sanguine.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025924277	6034901
LPPR : 6132607 / 15,24€ ^{TT}		

Prescrire : Should 30-45® - Orliman®

LE SAVIEZ-VOUS ?

80%

des lésions de l'épaule touchent les structures autour de l'articulation ostéo-articulaire, en particulier les tendons.

Source : L'Assurance Maladie. Épaule douloureuse chronique : définition, causes, facteurs favorisants. www.ameli.fr

BANDAGE D'IMMOBILISATION

ShouldOp® (sans coussin)

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Immobilisation post-traumatique (entorse et luxation), Post-opératoire,
Neurologie : Paralytie, Hémiplegie.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Brevet déposé,**
- Modèle anatomique, proche du corps et confortable au quotidien,
- Mise en place aisée,
- Modèle bilatéral.



Système de fixation
du bras à la ceinture abdominale.

Pas de passage de sangle
sur les épaules et les cervicales

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025924109	9772709

LPPR : 6132607 / **15,24€^{TTC}**

Prescrire : ShouldOp® (sans coussin) - Orliman®



Bandage d'immobilisation d'épaule

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Immobilisation post-traumatique (entorse et luxation), Post-opératoire,
Neurologie : Paralytie, Hémiplegie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fixation auto-agrippante haute qualité pour un meilleur maintien,
- Modèle bilatéral.




Sangle scapulo-humérale
pour une immobilisation totale.

TAILLE	TOUR DE POITRINE + BRAS	LISÉ	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	< 65 cm	Rouge	8435025924031	4529594
2 / Enfant	65 - 90 cm	Bleu	8435025924048	4529602
3	90 - 105 cm	Violet	8435025924055	4529619
4	105 - 120 cm	Blanc	8435025924062	4529625
5	120 - 135 cm	Gris	8435025924079	4529588
6	135 - 150 cm	Vert	8435025924086	9809559

LPPR : 6132607 / **15,24€^{TTC}**

Prescrire : Bandage d'immobilisation d'épaule - Orliman®

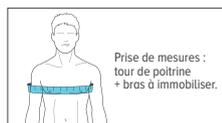

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

IMMOBILISATION D'ÉPAULE

Should'R®




TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Immobilisation post-traumatique (entorse et luxation), Post-opératoire,
Neurologie : Paralyse, Hémiplégie.

CARACTÉRISTIQUES :


- Pratique, modèle pouvant se mettre sans assistance,
- Modèle bilatéral.

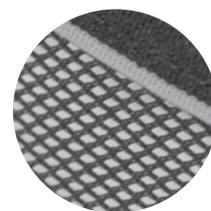

Maillé aérée
dans le dos pour plus de légèreté et de confort.

TAILLE	TOUR DE POITRINE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	< 95 cm	8435025925052	6034925
2	95 - 110 cm	8435025925069	6034926
3	110 - 130 cm	8435025925076	6034927

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TT}

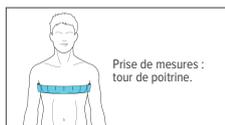

Prescrire : Should'R® - Orliman®

Écharpe universelle d'épaule

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Immobilisation post-traumatique (entorse et luxation), Post-opératoire,
Neurologie : Paralyse, Hémiplégie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fixation auto-agrippante micro-injection facilement repositionnable, sans adhérer aux vêtements,
- Modèle bilatéral,
- Taille unique.



1 sangle de support d'avant-bras
+ 1 sangle scapulo-humérale

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025924178	4660733

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TT}

Prescrire : Écharpe universelle d'épaule - Orliman®

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

Écharpe de contention de bras

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Soutien et maintien du bras,
Maintien post-traumatique (entorse et luxation),
Post-opératoire, Neurologie : paralysie, hémiplégié.

CARACTÉRISTIQUES :


- Sangle capitonnée pour un meilleur confort évitant l'effet de cisaillement,
- Languette de soutien du pouce,
- Modèle bilatéral.



Sangle réglable en hauteur
par boucle pour un ajustement adapté.

TAILLE	LONGUEUR COUDE-POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	15 - 21 cm	8435025924246	6034694
2	21 - 32 cm	8435025924253	6034695
3	32 - 43 cm	8435025924260	6034696

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TTC}

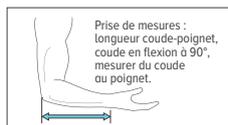

Prescrire : Écharpe de contention de bras - Orliman®

Écharpe de bras maille filet


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Soutien et maintien du bras,
Maintien post-traumatique (entorse et luxation),
Post-opératoire, Neurologie : paralysie, hémiplégié.

CARACTÉRISTIQUES :


- Capiton pour le confort de l'épaule,
- Languette de soutien du pouce,
- Sangle réglable en hauteur par boucle pour un ajustement adapté.

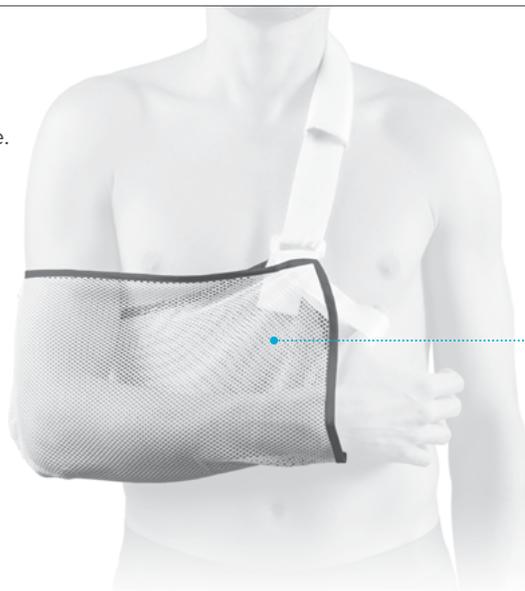

Maille filet aérée

TAILLE	LONGUEUR COUDE-POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	15 - 21 cm	8435025924215	9767973
2	21 - 32 cm	8435025924222	9767996
3	32 - 43 cm	8435025924239	9768004

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TTC}

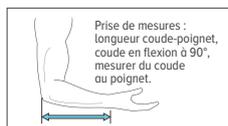

Prescrire : Écharpe de bras maille filet - Orliman®

Anneaux claviculaires


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture ou traumatisme de la clavicule avec ou sans déplacement.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle acromio-claviculaire avec système d'attaches dorsales auto-agrippantes,
- Traction réglable.

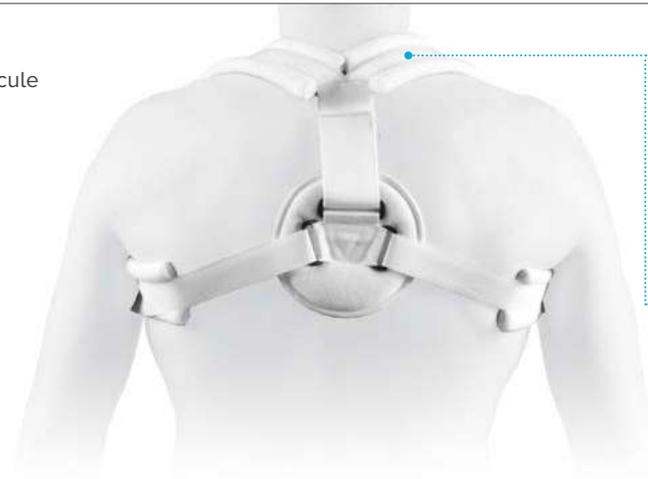

LÉGÈRETÉ

Épaulières molletonnées confortables

TAILLE	CARRURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	< 24 cm	8435025924314	4871476
2 / Enfant	25 - 30 cm	8435025924321	4871482
3	30 - 40 cm	8435025924338	4871499
4	40 - 50 cm	8435025924345	4871507
5	50 - 70 cm	8435025924352	4871513

Non remboursé



Prescrire : Anneaux claviculaires - Orliman®

ATELLE DE COUDE ARTICULÉE Elbowlution®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Entorse, Luxation, Rupture ligamentaire, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 enveloppes capitonnées,
- 4 sangles auto-agrippantes avec attache papillon,
- 1 cadran articulé gradué : flexion de 0° à 120° et extension de 0° à 90° (graduation tous les 15°).



SPÉCIFIQUE

2 tiges télescopiques réglables avec verrouillage par clip de sécurité pour une meilleure adaptabilité et un confort accru.

TAILLE	GAUCHE		DROIT	
	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025924956	9799424	8435025924949	9799418

Non remboursé

Prescrire : Elbowlution® - Orliman®

SANGLE DE COMPRESSION ANTI-ÉPICONDYLITE

Fixquick Sangle anti-épicondylite

CHRONIQUE

INDICATIONS :**Épicondylite, Épitrachéite,**
Prévention des lésions sportives.**CARACTÉRISTIQUES :**


- Mise en place rapide et ajustable,
- Patch amovible avec insert visco-élastique assurant une pression localisée sur le tendon et limitant les vibrations,
- Serrage et desserrage homogènes, sans point de pression et sans frottement.

**Système de fermeture Boa®**

1 cran = 1 millimètre
de serrage ou de desserrage.

TAILLE	TOUR DE L'AVANT-BRAS	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	22 - 27 cm	8435025924468	6123314
2	27 - 32 cm	8435025924475	6123315

Non remboursé

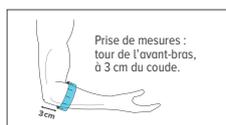

Prescrire : Sangle de compression anti-épicondylite Fixquick - Orliman®

NOUVEAU LOOK

SANGLE DE COMPRESSION ANTI-ÉPICONDYLITE

Epi'R®

CHRONIQUE

INDICATIONS :**Épicondylite, Épitrachéite,**
Prévention des lésions sportives.

Inserts antidérapants
garantissant un excellent maintien
de la sangle durant l'exercice.



**Sangle de réglage
graduée**
avec boucle anti-irritations.



**Patch amovible avec insert
visco-élastique**
assurant une pression
localisée sur le tendon
et limitant les vibrations.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025948464	6408084

Non remboursé

Prescrire : Épi'R® - Orliman®

Pour les sportifs :Produit également disponible
dans la gamme Orliman® Sport, page 167.

COUDIÈRE ANTI-ÉPICONDYLLITE

Mouv'N Fit®


CHRONIQUE

INDICATIONS :**Épicondylite, Épitrôchléite,**

Douleur liée aux gestes répétitifs.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot 3D multidirectionnel avec compression réduite aux extrémités. Idéal pour les activités quotidiennes impliquant des gestes répétitifs ou la pratique sportive, tel que le golf ou les sports de raquettes.
- 1 sangle de serrage amovible, permet d'exercer une pression ciblée et adaptée sur les muscles épicondyliens afin de diminuer la tension exercée sur ces derniers durant le mouvement.
- 2 inserts viscoélastiques avec picots, contournant l'épicondyle et l'épitrôchlée, permettent une décharge et une position optimale.

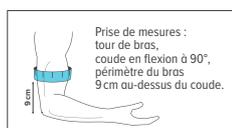**Pour les sportifs :**Produit également disponible dans la gamme **Orliman® Sport**, page 167.

● BLEU MARINE / TURQUOISE

● BLEU MARINE / ORANGE

● BLEU MARINE / VERT

TAILLE	TOUR DE BRAS	BLEU MARINE / TURQUOISE		BLEU MARINE / ORANGE		BLEU MARINE / VERT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	22 - 26 cm	8435025924819	6315282	8435025924857	6315286	8435025924901	6315291
2	26 - 29 cm	8435025924826	6315283	8435025924864	6315287	8435025924918	6315292
3	29 - 32 cm	8435025924833	6315284	8435025924888	6315289	8435025924925	6315293
4	32 - 36 cm	8435025924840	6315285	8435025924895	6315290	8435025924932	6315295

Non remboursé

Prescrire : Coudière anti-épicondylite Mouv'N Fit® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Epi Control®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinite ou tendinopathies du coude : Épicondylite et Épitrôchléite,
Tendinite ou tendinopathies du poignet : Tendons des muscles
extenseurs ou fléchisseurs du poignet ou du carpe.

Entorse ligamentaire antérieure ou postérieure du poignet et du carpe.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisses souples (dorsale et palmaire) amovibles, limitant la flexion et l'extension du poignet à 10°,
- Système de fermeture 1 point lacet sur la main permettant de contrôler la flexion et l'extension.

ÉPICONDYLLITE

Débutante Installée Phase de guérison

**ÉPITRÔCHLÉITE**


Débutante Installée Phase de guérison



TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	8435025931572	6287392
2	16 - 18 cm	8435025931589	6287393
3	18 - 20 cm	8435025931848	6287394

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TC}

Prescrire : Epi Control® - Orliman®

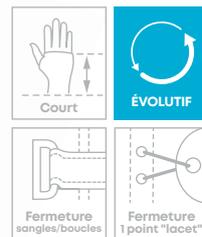

Système de fermeture
par sangles auto-agrippantes
 au niveau de l'avant-bras ainsi qu'au poignet
 afin d'optimiser l'action des éclisses.

**La première attelle de poignet qui agit sur le coude !**

Grâce à son système d'éclisses limitant la flexion/extension du poignet, l'attelle de poignet Epi Control® agit sur les pathologies du coude : l'épicondylite et l'épitrôchléite.



AUTRES
GAMMES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS



POIGNET & MAIN

La main (du latin manus) est située à l'extrémité des membres supérieurs. Complexe, elle est capable d'effectuer des actions et des mouvements différents.

Serrer, frapper, écrire, dessiner... la main est un véritable outil du quotidien qui compte 23 degrés de liberté.

Organe de la préhension, elle assure des fonctions essentielles, d'exploration, de sensibilité ou encore d'expression grâce à son agilité et sa dextérité.

La main possède 27 os répartis en trois catégories : les os du carpe, les métacarpiens et les phalanges.

Poignet & Main



Guide de délivrance

		← TRAUMATIQUE →				
		Fracture des métacarpes.	Luxation des doigts.	Entorse du poignet.	Entorse du poignet-pouce. Suspicion de fracture du scaphoïde.	Entorse du pouce.
	OBJECTIF	Favoriser la consolidation osseuse.	Favoriser la cicatrisation des éléments touchés.			
	ACTION	Immobilisation stricte.				
ÉLÉMENT MÉCANIQUE		 Éclisses dorsales 1 + éclisse palmaire 2	 Éclisse palmaire modelable 1	 Éclisse dorsale 1 + éclisse palmaire 2	 Éclisse latérale avec reposoir 1 + éclisse palmaire 2 + éclisse dorsale	 Système de mise au repos de l'articulation en position physiologique (par éclisse 1 ou attelle préformée)
DÉLIVRANCE PRODUIT		↓ ATTELLES DE POIGNET-DOIGTS Manu Easy Boxer® 4/5 p.105 FACILE Manu Easy Boxer® 2/3 p.105 FACILE	↓ ATTELLE DE DOIGTS Neo Finger® p.106 ÉVOLUTIF	↓ ATTELLES DE POIGNET LONG Neo Confort® p.88 CONFORT Neo Immo® p.88 CONFORT	↓ ATTELLES DE POIGNET-POUCE LONG Manu Easy® Poignet-pouce long p.98 FACILE Confort Plus® Poignet-pouce p.96 CONFORT	↓ ATTELLES DE POUCE Neo Rhizo Confort® p.100 CONFORT Mouv'N Fit® Pouce® p.100 TENDANCE
		 Neo Boxer® 4/5 p.104 CONFORT Neo Boxer® 2/3 p.104 CONFORT	 Neo Manufinger® p.106 CONFORT	 Confort Plus® Poignet p.90 CONFORT Manu Easy® Poignet p.89 FACILE Manutec® Poignet p.89 LÉGÈRETÉ Fixquick Poignet p.91 TENDANCE	 Manutec® Poignet-pouce p.98 LÉGÈRETÉ Fixquick Poignet-pouce p.96 TENDANCE	 Manutec® Pouce p.101 LÉGÈRETÉ

Poignet & Main

Guide de délivrance

CHRONIQUE

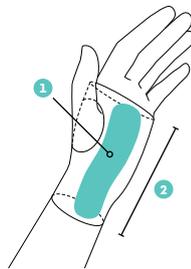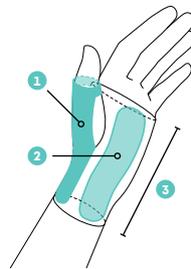Rhizarthrose confirmée.	Rhizarthrose débutante.	Arthrose du poignet.	Syndrome du canal carpien.	Tendinopathie du poignet.	Tendinite de De Quervain.
Éviter le conflit articulaire douloureux.			Éviter la compression.	Réduire l'inflammation du tendon.	
Limitation des frottements osseux.			Soutien / maintien de l'articulation.		
 <p>Système de mise au repos de l'articulation en position physiologique (par éclisse 1 ou attelle préformée)</p>			 <p>Éclisse palmaire 1 + bras de levier court 2</p>		 <p>Éclisse de pouce 1 + éclisse palmaire 2 + bras de levier court 3</p>
<p>↓</p> <p>ATTELLES DE POUCE</p>			<p>↓</p> <p>ATTELLES DE POIGNET COURT</p>		<p>↓</p> <p>ATTELLES DE POIGNET-POUCE COURT</p>
 <p>Manu Easy® Pouce p.102 FACILE</p>  <p>Mouv'N Fit® Pouce p.100 TENDANCE</p>  <p>Rhizo MP® p.103 CONFORT</p>			 <p>Mouv'N Fit® Poignet p.93 TENDANCE</p>  <p>Manutec Soft® Poignet p.93 LÉGÈRETÉ</p>		 <p>Manu Easy® Poignet-pouce p.99 FACILE</p>
 <p>Manutec® Pouce p.101 LÉGÈRETÉ</p>  <p>Neo Rhizo Confort® p.100 CONFORT</p>			 <p>Neo Soft® p.92 CONFORT</p>  <p>Neo Flex® p.92 CONFORT</p>		 <p>Manutec Soft® Poignet-pouce p.99 LÉGÈRETÉ</p>
 <p>Rhizo 3D® p.102 TENDANCE</p>  <p>Rhizo'R® p.103 LÉGÈRETÉ</p> <p>Niveau d'immobilisation croissant des attelles de pouce</p> 			 <p>Manu Easy® Soft Poignet p.94 FACILE</p>		

ATTELLE DE POIGNET

Neo Confort®

VIDÉO
DE POSE

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :


- Immobilisation totale en flexion palmaire et dorsiflexion,
- Facile à positionner grâce aux 3 sangles extensibles,
- Livrée avec gantelet en coton jersey,
- Modèle bilatéral,
- Taille unique.

**2 éclisses amovibles
repositionnables**
(palmaire et dorsale)
ajustables et auto-agrippantes.



Hauteur 22 cm
permettant un bras de levier
plus important et améliorant
ainsi la qualité de l'immobilisation.

Matière élastique
favorisant l'immobilisation
du poignet en apportant
un effet antalgique.

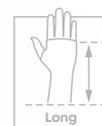

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025930490	6033020

LPPR : 7132791 / **56,64€^{TTC}**

Prescrire : Neo Confort® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Neo Immo®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :


- Immobilisation totale en flexion palmaire et dorsiflexion,
- Facile à positionner grâce aux 3 sangles extensibles,
- Modèle bilatéral.

**2 éclisses amovibles
repositionnables**
(palmaire et dorsale)
ajustables et auto-agrippantes.



Hauteur 22 cm
permettant un bras de levier
plus important et améliorant
ainsi la qualité de l'immobilisation.

**Tissu en tricot
respirant**
pour plus de confort
tout au long
de la journée.

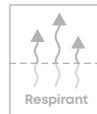

TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0	< 16 cm	8435025930018	6116181
Universelle	> 16 cm	8435025930025	6116169

LPPR : 7132791 / **56,64€^{TTC}**

Prescrire : Neo Immo® - Orliman®



ATTELLE DE POIGNET

Manutec® Poignet

TRAUMATIQUE


INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.

Immobilisation optimale du poignet
système de triple baleinage, 2 dorsales et 1 palmaire.

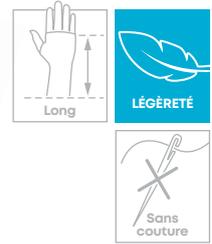

Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y à 2 points de fixation auto-agrippante.



Confort palmaire accru
système de réglage par double sangle auto-agrippante permettant l'ajustement en largeur de la zone métacarpienne.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	8435025930247	6010205
2	18 - 22 cm	8435025930254	6010201

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Manutec® Poignet - Orliman®



ATTELLE DE POIGNET

Manu Easy® Poignet


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 éclisses : 1 dorsale ajustable (2 fourreaux gauche/droit) et 1 palmaire,
- 1 sangle de serrage intermédiaire au niveau des doigts permettant de parfaitement solidariser les éclisses dorsale et palmaire au niveau de la main,
- Ergonomique et légère.

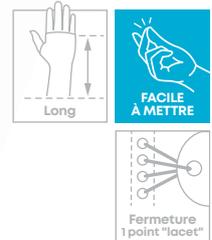

Découpe ergonomique
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	8435025930216	6034555	8435025930186	6034557
2	16 - 18 cm	8435025930223	6034556	8435025930193	6034558
3	18 - 20 cm	8435025930230	6034554	8435025930209	6034559

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Manu Easy® Poignet - Orliman®



ATTELLE DE POIGNET

Confort Plus® Poignet

TRAUMATIQUE


INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Légère et confortable,
- Boucles de serrage anti-vrilles,
- Se positionne et se règle d'une seule main,
- Existe en taille universelle.

Protection
de la commissure
du pouce

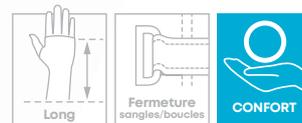

Éclisse dorsale
sur la taille universelle.



Éclisse palmaire amovible
en aluminium modelable.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	< 10 cm	8435025930803	6032982	8435025930728	6032973
Enfant	10 - 12 cm	8435025930797	6032980	8435025930711	6032972
1	12 - 16 cm	8435025930766	6032977	8435025930568	6032968
2	16 - 18 cm	8435025930773	6032978	8435025930605	6032970
3	18 - 20 cm	8435025930780	6032979	8435025930704	6032971
Universelle	> 16 cm	8435025930810	6032976	8435025930759	6032974

LPPR : 7132822 / 41,64€^{TTC}

Prescrire : Confort Plus® Poignet - Orliman®



ATTELLE DE POIGNET

Confort Plus® Poignet 27 cm


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Une éclisse palmaire amovible et modelable et 2 éclisses dorsales souples,
- Positionnement et réglage à une main grâce à son système de serrage 4 points avec boucles anti-vrilles,
- Légère et confortable.

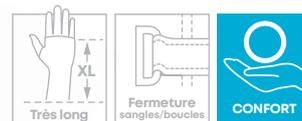

1 éclisse palmaire et 2 dorsales
allant du pouce jusqu'au milieu de l'avant bras
pour une immobilisation optimale.

Serrage 4 points
avec boucles anti-vrilles
pour une mise en place facile et un réglage
optimal selon la morphologie du patient.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	8435025930438	6031277	8435025930285	6031282
2	16 - 18 cm	8435025930476	6031278	8435025930414	6031283
3	18 - 20 cm	8435025930483	6031279	8435025930421	6031284

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Confort Plus® Poignet 27 cm - Orliman®



ATELLE DE POIGNET

Fixquick Poignet

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Serrage et desserrage homogènes, sans point de pression et sans frottement,
- Éclisse palmaire amovible en aluminium modelable,
- Deux baleinages dorsaux en plastique souple,
- Tissus intérieurs suédine et élasthanne testés et garantis non irritants pour la peau. ISO 10993-10/2010.

**Système de fermeture Boa®**

1 cran = 1 millimètre de serrage ou de desserrage.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	13,5 - 14,5 cm	8435025931121	6123296	8435025931084	6123290
2	14,5 - 16 cm	8435025931138	6123297	8435025931091	6123291
3	16 - 17,5 cm	8435025931145	6123299	8435025931107	6123294
4	17,5 - 19 cm	8435025931152	6123300	8435025931114	6123295

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Attelle de poignet Fixquick - Orliman®

oneplus

Attelle de poignet

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Entorse, Tendinite, Arthrose et arthrite, Syndrome du canal carpien, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Éclisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales souples,
- Boucles anti-vrilles.

Tissu élastique

sur la partie dorsale pour faciliter la mise en place.

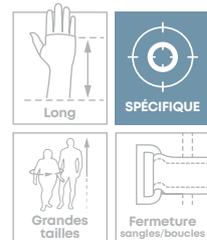

Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435025930919	6036046	8435025930889	6036042
2	21 - 23 cm	8435025930926	6036047	8435025930896	6036043
3	23 - 25 cm	8435025930933	6036048	8435025930902	6036044

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Attelle de poignet One Plus - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Neo Soft®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle très léger avec un bon maintien et soutien,
- Design anatomique permettant une grande liberté de mouvement des doigts,
- Éclisse palmaire en aluminium, modelable et amovible,
- Taille unique.

Mise en place aisée
grâce à la sangle de pré-positionnement.



Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 16 cm).

Matière élastique
favorisant le maintien du poignet en apportant un effet antalgique.



GAUCHE

DROIT

TAILLE	GAUCHE		DROIT	
	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025930278	6018540	8435025930261	6018539

LPPR : 7132822 / 41,64€^{TTC}

Prescrire : Neo Soft® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Neo Flex®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :



- Modèle très léger,
- Design anatomique permettant une grande liberté de mouvement des doigts,
- Éclisse palmaire en aluminium, modelable et amovible,
- Tissu en tricot respirant,
- Taille unique.

Sangle extensible
pour un maintien optimal de l'attelle.



Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 16 cm).

Fixation auto-agrippante micro-injection
facilement repositionnable sans adhérer aux vêtements.

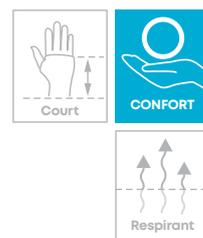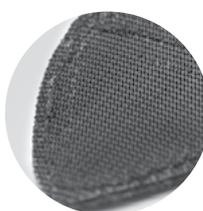

GAUCHE

DROIT

TAILLE	GAUCHE		DROIT	
	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025930131	9719684	8435025930124	9719767

LPPR : 7132822 / 41,64€^{TTC}

Prescrire : Neo Flex® - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

ATTELLE DE POIGNET

Mouv'N Fit®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse palmaire amovible et modelable,
- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.

Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y à 2 points de fixation auto-agrippante.

Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 14 cm).

Maintien optimal du poignet
grâce aux 2 ressorts spiralium.

3 coloris disponibles



● BLEU MARINE / TURQUOISE

● BLEU MARINE / ORANGE

● BLEU MARINE / VERT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	8435025939271	6327830	8435025939295	6327833	8435025939318	6327836
2	18 - 22 cm	8435025939288	6327832	8435025939301	6327834	8435025939325	6327838

LPPR : 7132791 / **56,64€^{TC}**

Prescrire : Attelle de poignet Mouv'N Fit® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Manutec Soft® Poignet

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse palmaire amovible et modelable,
- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.

Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y à 2 points de fixation auto-agrippante.

Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 14 cm).

Maintien optimal du poignet
grâce aux 2 ressorts spiralium.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	8435025931060	6041801
2	18 - 22 cm	8435025931077	6041802

LPPR : 7132791 / **56,64€^{TC}**

Prescrire : Manutec Soft® Poignet - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Manu Easy Soft® Poignet


CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse palmaire amovible et modelable,
- 1 éclisse dorsale,
- 1 sangle de serrage intermédiaire,
- Ergonomique et légère.

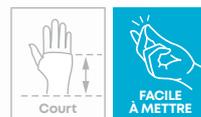

Système de serrage 1 point par lacet permettant un ajustement rapide et uniforme de la contention.



Bras de levier plus court adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 16 cm).

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 17 cm	8435025931206	6219380	8435025931183	6219382
2	17 - 20 cm	8435025931213	6219381	8435025931190	6219383

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}



Prescrire : Manu Easy Soft® Poignet - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Epi Control®

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Tendinite ou tendinopathies du poignet : Tendons des muscles extenseurs ou fléchisseurs du poignet ou du carpe.
Tendinite ou tendinopathies du coude : Épicondylite et Épitrôchléite,

Entorse ligamentaire antérieure ou postérieure du poignet et du carpe.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisses souples (dorsale et palmaire) amovibles, limitant la flexion et l'extension du poignet à 10° et offrant la possibilité d'adapter le port de l'attelle au traitement du patient,
- Système de fermeture 1 point lacet sur la main permettant de contrôler la flexion et l'extension.

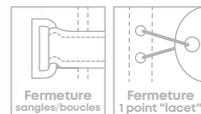

Système de fermeture par sangles auto-agrippantes au niveau de l'avant-bras ainsi qu'au poignet afin d'optimiser l'action des éclisses.



La première attelle de poignet qui agit sur le coude !

Grâce à son système d'éclisses limitant la flexion/extension du poignet, l'attelle de poignet Epi Control® agit sur les pathologies du coude : l'épicondylite et l'épitrôchléite.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	8435025931572	6287392
2	16 - 18 cm	8435025931589	6287393
3	18 - 20 cm	8435025931848	6287394

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}



Prescrire : Epi Control® - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity


oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

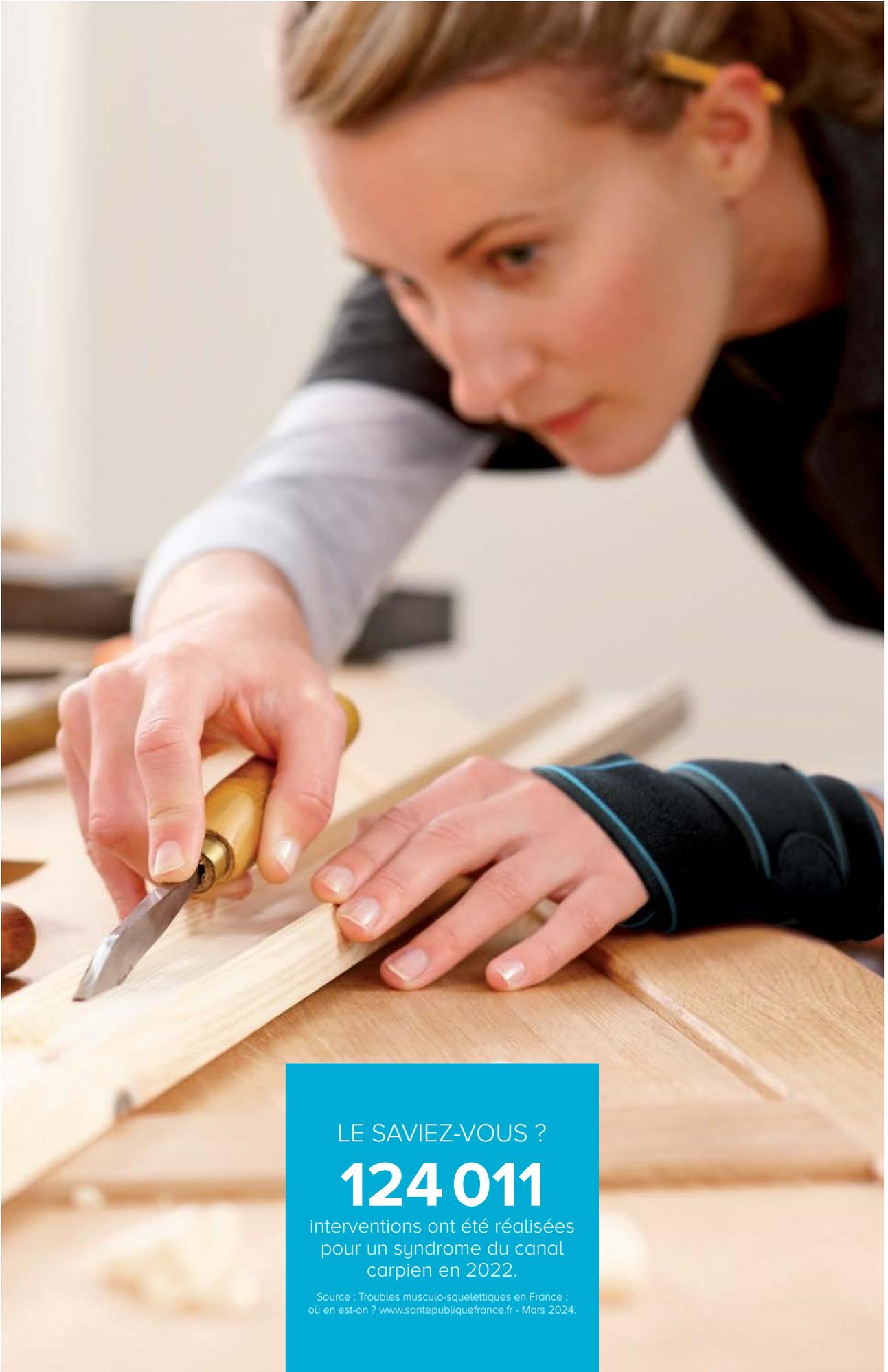

LE SAVIEZ-VOUS ?

124 011

interventions ont été réalisées
pour un syndrome du canal
carpien en 2022.

Source : Troubles musculo-squelettiques en France :
où en est-on ? www.santepubliquefrance.fr - Mars 2024.

ATTELLE DE POIGNET-POUCE

Confort Plus® Poignet-pouce


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Suspicion de fracture du scaphoïde,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 éclisses (latérale amovible et palmaire) en aluminium modelable,
- Réglage par sangles et boucles anti-vrilles,
- Pince de crabe libérée par l'association d'une sangle et d'un repose pouce,
- Existe en taille universelle avec éclisse dorsale ajustable au poignet (circonférence variable).

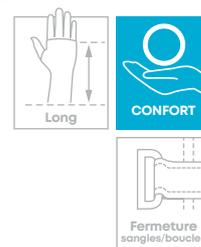

Éclisse latérale dotée d'un reposoir
évite une mauvaise rotation du pouce.



GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Enfant	10 - 12 cm	8435025932395	6033034	8435025932340	6033026
1	12 - 16 cm	8435025932364	6033031	8435025932319	6033021
2	16 - 18 cm	8435025932371	6033032	8435025932326	6033024
3	18 - 20 cm	8435025932388	6033033	8435025932333	6033025
Universelle	> 16 cm	8435025932401	6033030	8435025932357	6033027

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}

Prescrire : Confort Plus® Poignet-pouce - Orliman®



ATTELLE DE POIGNET-POUCE

Fixquick Poignet-pouce

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Suspicion de fracture du scaphoïde,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Serrage et desserrage homogènes, sans point de pression et sans frottement,
- Éclisse palmaire amovible en aluminium modelable,
- Éclisse latérale dotée d'un reposoir pour éviter une mauvaise rotation du pouce,
- Deux baleinages dorsaux en plastique souple,
- Tissus intérieurs suédine et élasthane testés et garantis non irritants pour la peau. ISO 10993-10/2010.



Système de fermeture Boa®



1 cran = 1 millimètre
de serrage ou de desserrage.



GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	13,5 - 14,5 cm	8435025932593	6123306	8435025932555	6123302
2	14,5 - 16 cm	8435025932609	6123307	8435025932562	6123303
3	16 - 17,5 cm	8435025932616	6123308	8435025932579	6123304
4	17,5 - 19 cm	8435025932623	6123309	8435025932586	6123305

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}

Prescrire : Fixquick Poignet-pouce - Orliman®



Attelle de poignet-pouce

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Entorse, Tendinite, Arthrose (y compris rhizarthrose) et arthrite, Syndrome du canal carpien, Syndrome de De Quervain,
Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Éclisse latérale préformée, modelable et amovible,
- 1 Éclisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales souples,
- Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables,
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose,
- Boucles anti-vrilles.

Sangle de pouce pour un ajustement optimal.

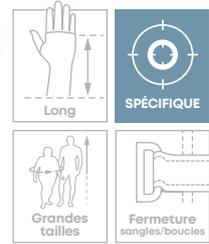

Coussinet de protection interne dans la zone du pouce améliorant le confort durant l'immobilisation.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435025932449	6036052	8435025932418	6036049
2	21 - 23 cm	8435025932456	6036053	8435025932425	6036330
3	23 - 25 cm	8435025932463	6036088	8435025932432	6036050

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}



Prescrire : Attelle de poignet-pouce One Plus - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

70%

des fractures des os du carpe touchent le Scaphoïde, petit os situé dans le poignet, à la racine du pouce.

Source : Société Française de Médecine d'Urgence, Les traumatismes de la main.

ATTELLE DE POIGNET-POUCE

Manu Easy® Poignet-pouce Long

TRAUMATIQUE


INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Suspicion de fracture du scaphoïde,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 3 éclisses : une dorsale ajustable (2 fourreaux gauche/droit), une palmaire et une latérale dotée d'un reposoir pour éviter une mauvaise rotation du pouce,
- 1 sangle de serrage intermédiaire au niveau des doigts permettant de parfaitement solidariser les éclisses dorsales et palmaire au niveau de la main,
- Ergonomique et légère.

Sangle de serrage
au niveau du pouce
procurant une parfaite
immobilisation.

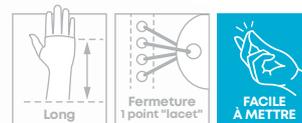

Découpe ergonomique
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	8435025932661	6167857	8435025932630	6167858
2	16 - 18 cm	8435025932678	6167859	8435025932647	6167860
3	18 - 20 cm	8435025932685	6167862	8435025932654	6167861

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}

Prescrire : Manu Easy® Poignet-pouce Long - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-POUCE

Manutec® Poignet-pouce

TRAUMATIQUE


INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Suspicion de fracture du scaphoïde,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Confort palmaire accru grâce au système de réglage par double sangle auto-agrippante permettant l'ajustement en largeur de la zone métacarpienne,
- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.

Attelle de pouce amovible
en aluminium modelable.

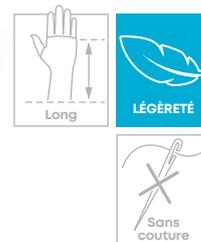

Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y
à 2 points de fixation auto-agrippante.

Immobilisation optimale du poignet
grâce au système de triple baleinage,
2 dorsales et 1 palmaire.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	8435025932296	6010204
2	18 - 22 cm	8435025932302	6010207

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}

Prescrire : Manutec® Poignet-pouce - Orliman®

ATELLE DE POIGNET-POUCE

Manu Easy® Poignet-pouce

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Tendinite de De Quervain,
Rhizarthrose phase aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- Bras de levier court pour un meilleur confort d'utilisation,
- Ergonomique et légère.

Sangle de serrage
au niveau du pouce
procurant une parfaite
immobilisation.

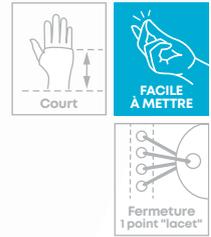

Découpe ergonomique
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	8435025932500	6038575	8435025932470	6038572
2	16 - 18 cm	8435025932517	6038576	8435025932487	6038573
3	18 - 20 cm	8435025932524	6038577	8435025932494	6038574

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TC}

Prescrire : Manu Easy® Poignet-pouce - Orliman®

ATELLE DE POIGNET-POUCE

Manutec Soft® Poignet-pouce

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinite de De Quervain,
Rhizarthrose phase aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- Attelle de pouce amovible permettant une utilisation évolutive en immobilisant le poignet et le pouce ou le poignet seul,
- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.

Attelle de pouce amovible
en aluminium
modelable.



Maintien optimal du poignet
grâce aux 2 ressorts spiraliuim.

Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y
à 2 points de fixation auto-agrippante.

Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant
le travail (hauteur 14 cm).

TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	8435025932531	6041322
2	18 - 22 cm	8435025932548	6041321

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TC}

Prescrire : Manutec Soft® Poignet-pouce - Orliman®

ATTELLE DE POUCE

Neo Rhizo Confort®



TRAUMATIQUE
CHRONIQUE

INDICATIONS :

**Entorse de la métacarpophalangienne (MCP),
Lésion articulaire et ligamentaire
du pouce, Rhizarthrose confirmée.**

CARACTÉRISTIQUES :

- Écisse amovible et repositionnable (modèle ambidextre) à disposer en cas d'entorse du pouce pour immobiliser,
- Fixation auto-agrippante de pré-positionnement permettant un ajustement efficace de l'attelle,
- Modèle bilatéral.

Écisse latérale amovible et modelable permet de maintenir le pouce.

Dédoublage de la sangle pour une mise en place facilitée.



Fixation auto-agrippante de pré-positionnement

TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0 / Enfant	< 14 cm	8435025929777	6018535
Unique	> 14 cm	8435025929784	6018536

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**

Prescrire : Neo Rhizo Confort® - Orliman®



Prise de mesures : tour de poignet.

ATTELLE DE POUCE

Mouv'N Fit®

TRAUMATIQUE
CHRONIQUE


INDICATIONS :

**Entorse de la métacarpophalangienne (MCP),
Lésion articulaire et ligamentaire du pouce,
Rhizarthrose confirmée.**

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.

Conception sans couture pour supprimer tout phénomène d'irritation.

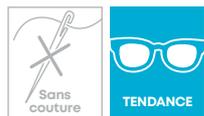

Écisse en aluminium modelable permet une immobilisation optimale.



3 coloris disponibles



Prise de mesures : tour de poignet.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	● BLEU MARINE / TURQUOISE		● BLEU MARINE / ORANGE		● BLEU MARINE / VERT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	8435025939219	6327839	8435025939233	6327841	8435025939257	6327844
2	18 - 22 cm	8435025939226	6327840	8435025939240	6327842	8435025939264	6327845

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**

Prescrire : Attelle de pouce Mouv'N Fit® - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

ATTELLE DE POUCE

Manutec® Pouce

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

**Entorse de la métacarpophalangienne (MCP),
Lésion articulaire et ligamentaire du pouce,
Rhizarthrose confirmée.**

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.



Éclisse en aluminium modelable

permet une immobilisation optimale.

Conception sans couture

pour supprimer tout phénomène d'irritation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	8435025929753	6010202
2	18 - 22 cm	8435025929760	6010203

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**



Prescrire : Manutec® Pouce - Orliman®

oneplus

Attelle de pouce

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Entorse (ex. : pouce du skieur),
Rhizarthrose et arthrite carpo-métacarpienne du pouce,
Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse latérale modelable au niveau de la colonne du pouce,
- Attaches auto-agrippantes grande taille et découposables,
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose,
- Boucles anti-vrilles.

Sangle de pouce
pour un ajustement optimal.

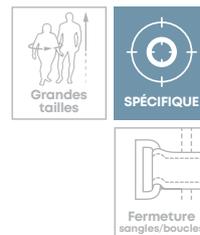

Coussinet de protection
interne dans la zone du pouce
améliorant le confort durant
l'immobilisation.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435025929821	6036038	8435025929791	6036035
2	21 - 23 cm	8435025929838	6036040	8435025929807	6036036
3	23 - 25 cm	8435025929845	6036041	8435025929814	6036037

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**



Prescrire : Attelle de pouce One Plus - Orliman®

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

ATTELLE DE POUCE

Manu Easy® Pouce

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Rhizarthrose confirmée,

Lésion articulaire et ligamentaire du pouce,
Lésions sportives (ex. : pouce du skieur).

CARACTÉRISTIQUES :

- Ergonomique et légère,
- Modèle bilatéral.



Fermeture 1 point "lacet"



FACILE À METTRE

Sangle de serrage
au niveau du pouce
procurant une parfaite
immobilisation.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

Éclisse de pouce préformée
pour un maintien optimal en position
physiologique dans l'alignement
du bras.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 17 cm	8435025929913	6154653
2	17 - 20 cm	8435025929920	6154656

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**

Prescrire : Manu Easy® Pouce - Orliman®



Prise de mesures :
tour de poignet.

ATTELLE DE POUCE

Rhizo 3D®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traitement de la rhizarthrose confirmée,
immobilisation post-opératoire (ex. : arthroplastie),

Lésion articulaire et ligamentaire du pouce,
Lésions sportives (ex. : pouce du skieur).

CARACTÉRISTIQUES :

- **Aérée et légère** : solution discrète et pratique qui améliore le confort et l'acceptation du produit au quotidien,
- **Préformée & rigide** : immobilisation optimale de l'articulation métacarpophalangienne maintenant l'écartement du pouce dans son axe physiologique,
- **Résistante à l'eau** : adaptée à une utilisation domestique quotidienne ou en milieux professionnels nécessitant une immersion en eaux chaudes ou froides,
- **Simple d'utilisation** : grâce au système intuitif de fermeture à crans, se positionne, se règle et se retire très facilement,
- **Facile d'entretien** : totalement lavable à l'eau savonneuse et sèche rapide pour une hygiène optimale.



TENDANCE



Design optimisé
pour un poids ultra-léger
(environ 12 gr).



GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE LA MAIN	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	17 - 19 cm	8435025929968	6261843	8435025929937	6261846
2	19 - 21 cm	8435025929975	6261844	8435025929944	6261847
3	21 - 23 cm	8435025929982	6261845	8435025929951	6261848

LPPR : 7132756 / **43,32€^{TTC}**

Prescrire : Rhizo 3D® - Orliman®



Prise de mesures :
tour de main,
juste en dessous
des têtes des
métacarpiens.

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

ATELLE DE POUCE

Rhizo'R®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traitement de la rhizarthrose confirmée,
immobilisation post-opératoire (ex. : arthroplastie),
Lésion articulaire et ligamentaire du pouce,
Lésions sportives (ex. : pouce du skieur).

CARACTÉRISTIQUES :

- Système de fermeture à 3 sangles
pour plus d'adaptabilité morphologique.



Attelle préformée,
rigide et aérée
pour un maintien optimal
et un confort accru.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	LARGEUR DE LA BASE DE LA PAUME	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	5,5 - 6,5 cm	8435025929883	6154660	8435025929852	6154657
2	6,5 - 7,5 cm	8435025929890	6154662	8435025929869	6154658
3	7,5 - 9 cm	8435025929906	6154663	8435025929876	6154659



LPPR : 7132756 / 43,32€^{TTC}

Prescrire : Rhizo'R® - Orliman®

ATELLE DE POUCE

Rhizo MP®

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Inflammation, Tendinopathie du pouce,
Irritation de l'articulation carpienne
et métacarpienne du pouce (MP),
Rhizarthrose débutante,
Reprise d'activité après lésion
des ligaments latéraux du pouce.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design anatomique permettant une totale liberté
de mouvement du poignet,
- Légère et confortable.

Éclisse en aluminium
modelable
pour une adaptation
personnalisée.

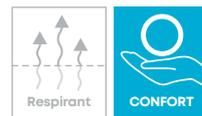

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	< 15 cm	8435025929739	5379978	8435025929715	5379955
2	> 15 cm	8435025929746	5379984	8435025929722	5379961



LPPR : 7132756 / 43,32€^{TTC}

Prescrire : Rhizo MP® - Orliman®

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

ATTELLE DE POIGNET-DOIGTS

Neo Boxer® 4^e et 5^e métacarpes

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture du 4^e et/ou 5^e métacarpe,
Immobilisation post-opératoire.


CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse de doigts à fixation auto-agrippante pour une bonne immobilisation,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable,
- Traitement des plaies facilité.



Conception innovante
en 2 zones distinctes permettant le positionnement et le réglage indépendant du poignet et des doigts.

2 éclisses dorsales modelables permettant d'adapter l'immobilisation selon les besoins du patient.

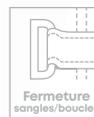

1 éclisse palmaire modelable et pré-formée à la forme de la main pour apporter une immobilisation optimale tout en maintenant un grand niveau de confort.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	8435025932821	6018549	8435025932791	6018553
2	16 - 18 cm	8435025932838	6018551	8435025932807	6018554
3	18 - 20 cm	8435025932845	6018552	8435025932814	6018555

LPPR : 7132762 / 79,20€^{TTC}

Prescrire : Neo Boxer® 4^e et 5^e métacarpes - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-DOIGTS

Neo Boxer® 2^e et 3^e métacarpes

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture du 2^e et/ou 3^e métacarpe,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse de doigts à fixation auto-agrippante pour une bonne immobilisation,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable,
- Traitement des plaies facilité.



Conception innovante
en 2 zones distinctes permettant le positionnement et le réglage indépendant du poignet et des doigts.

2 éclisses dorsales modelables permettant d'adapter l'immobilisation selon les besoins du patient.



1 éclisse palmaire modelable et pré-formée à la forme de la main pour apporter une immobilisation optimale tout en maintenant un grand niveau de confort.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	8435025932760	6018563	8435025932739	6018556
2	16 - 18 cm	8435025932777	6018564	8435025932746	6018558
3	18 - 20 cm	8435025932784	6018565	8435025932753	6018561

LPPR : 7132762 / 79,20€^{TTC}

Prescrire : Neo Boxer® 2^e et 3^e métacarpes - Orliman®



TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

ATTELLE DE POIGNET-DOIGTS

Manu Easy Boxer® 4^e et 5^e métacarpes


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture du 4^e et/ou 5^e métacarpe,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse dorsale amovible spécifiquement modelée pour s'adapter à la forme du poignet et de l'avant-bras,
- 1 éclisse palmaire et 1 éclisse de doigts amovibles, modelables et préformées à la forme de la main pour apporter une immobilisation ergonomique et optimale,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable.

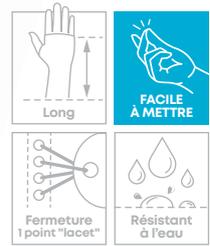

Coussinet en mousse
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	8435025933118	6087258	8435025933088	6087235
2	16 - 18 cm	8435025933125	6087259	8435025933095	6087256
3	18 - 20 cm	8435025933132	6087260	8435025933101	6087257

LPPR : 7132762 / **79,20€^{TTC}**Prescrire : Manu Easy Boxer® 4^e et 5^e métacarpes - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-DOIGTS

Manu Easy Boxer® 2^e et 3^e métacarpes


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture du 2^e et/ou 3^e métacarpe,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse dorsale amovible spécifiquement modelée pour s'adapter à la forme du poignet et de l'avant-bras,
- 1 éclisse palmaire et 1 éclisse de doigts amovibles, modelables et préformées à la forme de la main pour apporter une immobilisation ergonomique et optimale,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable.

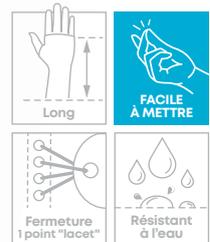

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	8435025932883	6272330	8435025932852	6272327
2	16 - 18 cm	8435025932890	6272331	8435025932869	6272328
3	18 - 20 cm	8435025932906	6272332	8435025932876	6272329

LPPR : 7132762 / **79,20€^{TTC}**Prescrire : Manu Easy Boxer® 2^e et 3^e métacarpes - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-MAIN-POUCE

Neo Manufinger®

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet et des métacarpes,
Immobilisation post-opératoire,
Protocole de Duran (phase aiguë port minimum de 6 semaines),
Traitement des déformations d'origine rhumatismale,
Lésions neurologiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle très confortable grâce à son matelassage intérieur,
- Éclisse palmaire en aluminium modelable permettant plusieurs positionnements,
- Doublure intérieure en tissu bouclé absorbant afin d'éviter la transpiration.



Séparateur interdigital
permettant la séparation
et l'alignement des doigts.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	LARGEUR DE LA MAIN	LONGUEUR	GAUCHE		DROIT	
			CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	5 - 7 cm	31,5 cm	8435025930858	6035140	8435025930827	6035137
2	7 - 9 cm	34 cm	8435025930865	6035141	8435025930834	6035138
3	9 - 11 cm	36,5 cm	8435025930872	6035142	8435025930841	6035139

LPPR : 7132851 / 94,40€^{TTC}

Prescrire : Neo Manufinger® - Orliman®



Prise de mesures :
largeur de la main.

ATTELLE DE DOIGTS

Neo Finger®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture sans déplacement, Entorse, Luxation des doigts.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse palmaire amovible modelable à la forme de la main pour une position d'immobilisation optimale,
- Découpable au niveau des premières phalanges permettant de retrouver la mobilité au niveau de la main en recentrant l'immobilisation au niveau des doigts.

La largeur de l'éclisse est variable selon les tailles des produits pour une meilleure adaptation morphologique aux doigts du patient.



Résistant à l'eau

ÉVOLUTIF

Design minimaliste
avec fermeture par 4 bandes antiglisse, dont 3 amovibles, laissant une grande partie de la main à l'air libre, pour un meilleur confort tout au long de la journée.



Modèle évolutif
l'attelle peut être coupée en fonction de l'évolution du traitement.

TAILLE	LONGUEUR DE MAIN	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	< 13 cm	8435025933255	6018543
2	13 - 17 cm	8435025933262	6018546
3	17 - 20 cm	8435025933279	6018547
4	20 - 22 cm	8435025933286	6018548

LPPR : 7132816 / 36,71€^{TTC}

Prescrire : Neo Finger® - Orliman®



Prise de mesures :
longueur de la main,
mesurer du majeur
au poignet.

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

Attelles complémentaires



ATTELLE GRENOUILLE Non remboursé

TAILLE	LONG.	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	5,4 cm	8435025933057	6035119
2	7 cm	8435025933064	6035120
3	9,5 cm	8435025933071	6035121



ATTELLE BASEBALL Non remboursé

TAILLE	LONG.	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	8,9 cm	8435025932999	6034946
2	10 cm	8435025933002	6034947
3	12,7 cm	8435025933019	6034949



ATTELLE FINGER COT Non remboursé

TAILLE	LONG.	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	6,4 cm	8435025933026	6035110
2	7 cm	8435025933033	6035111
3	8,9 cm	8435025933040	6035112



ATTELLE GOUTTIÈRE Non remboursé

TAILLE	LONG.	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	4 cm	8435025933149	6035114
2	7,5 cm	8435025933156	6035115
3	15,2 cm	8435025933163	6035116



ATTELLE ALU-MOUSSE Non remboursé


TAILLE	DIM.	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	25 x 1,5	8435025932913	6034931
2	25 x 2,0	8435025932920	6034932
3	25 x 2,5	8435025932937	6034933
4	50 x 1,5	8435025932944	6034934
5	50 x 2,0	8435025932951	6034935
6	50 x 2,5	8435025932968	6034936
7	50 x 3,5	8435025932975	6034937
8	50 x 5,0	8435025932982	6034940



STACK PLASTIQUE Non remboursé

TAILLE	CIRC.*	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	5 cm	8435025933170	6035122
2	5,2 cm	8435025933187	6035124
3	5,5 cm	8435025933194	6035125
4	6 cm	8435025933200	6035126
5	6,2 cm	8435025933217	6035127
5,5	7 cm	8435025933224	6035128
6	8 cm	8435025933231	6035129
7	9 cm	8435025933248	6035130

* Périmètre de l'articulation inter-phalangienne distale.

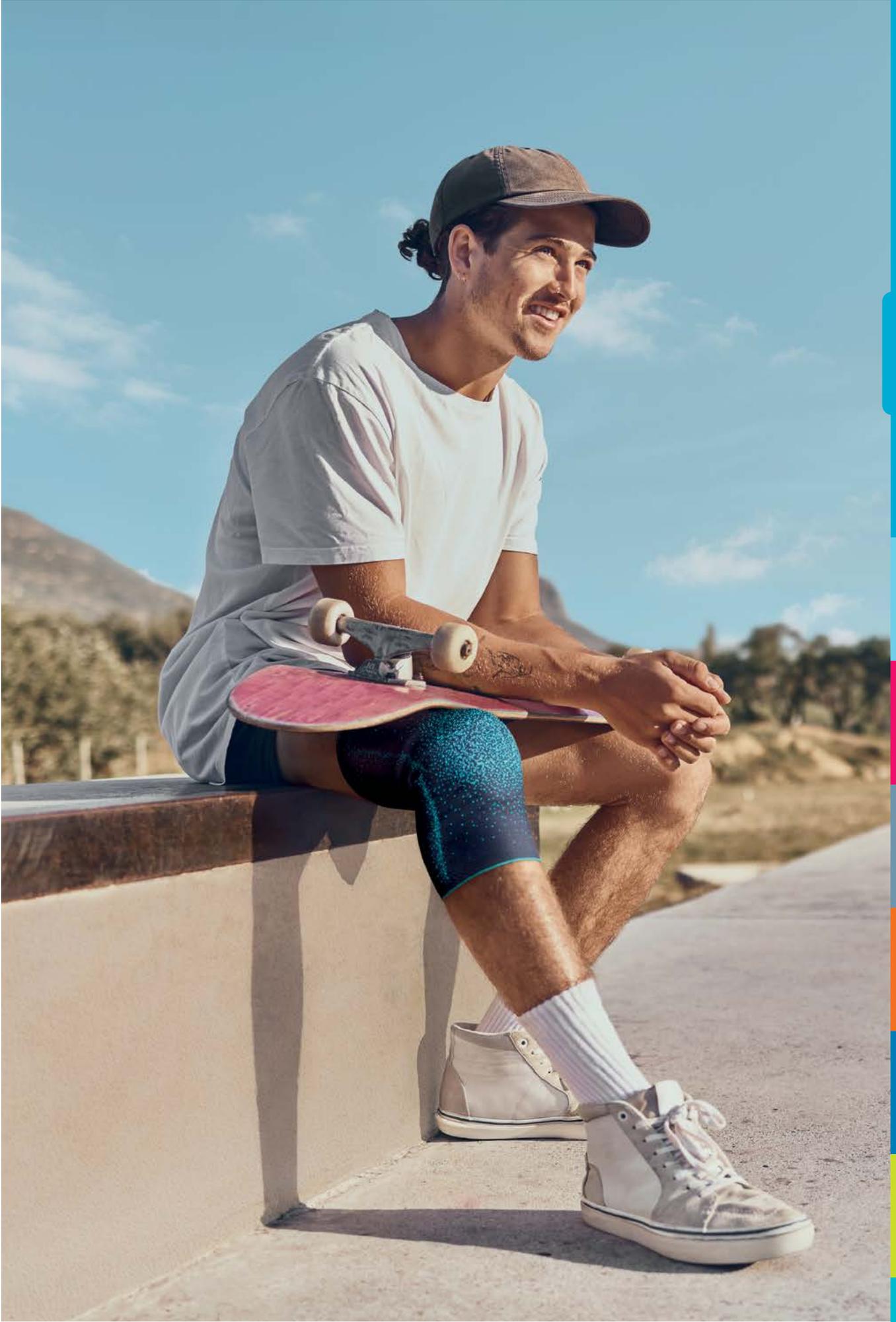

AUTRES
GAMMES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS



GENOU

Les genoux sont les articulations les plus volumineuses. Ils portent le poids du corps, qui, normalement, se répartit de manière équilibrée entre les deux genoux et assurent la stabilité et la mobilité du corps en permettant des **mouvements de flexion** (fléchissement) **et d'extension** (redressement).







Une légère rotation interne et externe du genou peut se produire, mais uniquement en flexion. En extension, le genou est verrouillé et toute rotation est impossible. La stabilité de l'articulation est assurée par des ligaments qui supportent les genoux dans tous leurs mouvements.

Les genoux peuvent être soumis à d'importantes contraintes surtout en position accroupie ou lors de mouvements de pivot. De ce fait, ils contiennent également des ménisques qui agissent comme de vrais amortisseurs lorsque le corps est en mouvement et que les genoux sont contraints à des forces.

Genou

Guide de délivrance





← TRAUMATIQUE →

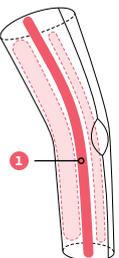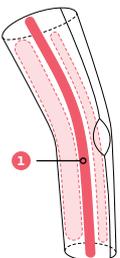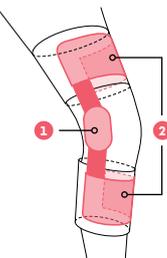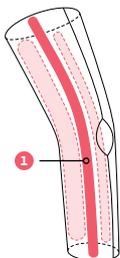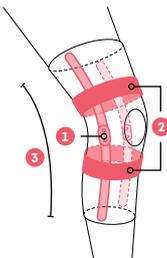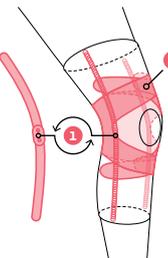	Luxation.	Entorse LCA - LCP.		Entorse LLI - LLE moyenne à grave.		Entorse LLI - LLE légère.			
OBJECTIF	Favoriser la cicatrisation des éléments articulaires.	Favoriser la cicatrisation ligamentaire.							
ACTION	Immobilisation stricte.	Immobilisation stricte.	Immo. relative.	Immobilisation stricte.	Immobilisation relative.	Immobilisation relative. Limitation de l'amplitude articulaire.			
ÉLÉMENT MÉCANIQUE	 Éclisses rigides et modelables 1	 Éclisses rigides et modelables 1	 Articulations dynamiques 1 avec embrasses au niveau de la cuisse et du mollet ou du tibia 2	 Éclisses rigides et modelables 1	 Cadrans articulés avec réglages 1 + système de cloisonnement articulaire (sangles) 2 + bras de levier long 3	 Cadrans articulés ou ressorts spiraliuim 1 + système de cloisonnement articulaire (strapping ou sangles) 2			
DÉLIVRANCE PRODUIT	 Genu'R® p.123 LÉGÈRETÉ	 3 Pans p.124 CONFORT	 Genurom Neo® Ant. p.120 LÉGÈRETÉ	 Genurom Neo® Post. p.120 LÉGÈRETÉ	 Genu'R® p.123 LÉGÈRETÉ	 3 Pans p.124 CONFORT	 Altitude® p.119 ÉVOLUTIF	 Rotulig Stab® p.116 ÉVOLUTIF	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF
PHASE DE CONSOLIDATION	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	 Genurom Neo® Antérieure p.120 LÉGÈRETÉ	 Genurom Neo® Postérieure p.120 LÉGÈRETÉ	 Altitude® p.119 ÉVOLUTIF	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	 Rotulig Stab® p.116 ÉVOLUTIF	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF		
PHASE DE REPRISE D'ACTIVITÉ & PRÉVENTION	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	 Rotulig Stab® p.116 ÉVOLUTIF	 Rotulig Motion® p.114 TENDANCE			

Genou

Guide de délivrance

CHRONIQUE

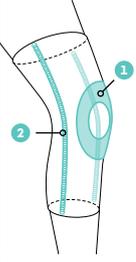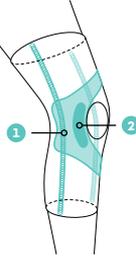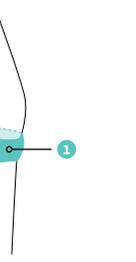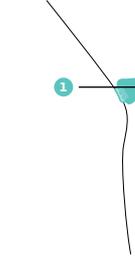Syndrome fémoropatellaire.		Tendinite rotulienne.	Tendinite du fascia lata (essuie-glace ou tendinite de la bandelette ilio-tibiale).	Arthrose fémorotibiale.		Arthrose fémoropatellaire.		
Débutant.	Avancé.			Confirmée.	Débutante à avancée.			
Éviter le conflit articulaire douloureux.		Réduire l'inflammation du tendon.		Éviter le conflit articulaire douloureux.				
Limitation des frottements osseux.		Mise au repos du tendon.	Mise au repos du tendon pour éviter le frottement sur les condyles.	Limitation des frottements osseux.				
								
Ressorts spiraliu ^m 1 + insert rotulien 2	Ressorts spiraliu ^m 1 + Pad silicone 2	Pad silicone 1 + sangle 2	Pad silicone 1 + sangle 2	Articulations dynamiques avec contrôle latéral 1	Cadrans articulés ou ressorts spiraliu ^m 1 + insert rotulien 2	Ressorts spiraliu ^m 1 + Pad silicone 2		
								
Rotulig® p.113 FACILE	Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	Patel'R® p.112 FACILE	Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	Patel'R® p.112 FACILE	Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	Gonartec Plus® p.121 CONFORT	Rotulig Motion® p.114 TENDANCE	Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF

ATTELLES COMPLÉMENTAIRES

Pré et post-opératoire cryothérapie.				Pré et post-opératoire.			
							
Kit compressive CRYOTEC® p.125 ÉVOLUTIF	Genouillère articulée CRYOPUMP® p.117 ÉVOLUTIF	Attelle de genou évolutive CRYOPUMP® p.125 ÉVOLUTIF	Genulig CRYOTEC® p.116 ÉVOLUTIF	Genuflex Rom® p.122 ÉVOLUTIF	Altitude® p.119 ÉVOLUTIF	Genurom Neo Antérieure® p.120 LÉGERETÉ	Genurom Neo Postérieure® p.120 LÉGERETÉ

NOUVEAU LOOK

SANGLE INFRA-PATELLAIRE

Patel'R®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Idéale pour le traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter chez le jeune sportif, Tendinite du tendon rotulien.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot 3D à l'arrière du genou pour un confort accru.



Insert visco-élastique amovible

assurant une pression localisée sur le tendon et limitant les vibrations.



Sangle de réglage ajustement 2 points avec boucles anti-vrilles.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025948457	6408085

Non remboursé

Prise de mesures maximales :
Tour de genou : 46 cm

Prise de mesures minimales :
Tour de genou : 26 cm

Pour les sportifs :

Produit également disponible dans la gamme **Orliman® Sport**, page 168.

Prescrire : Patel'R® - Orliman®

NOUVEAU LOOK

GENOUILLÈRE

Genuforte®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Arthrose légère, CEdème post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot élastique apportant la contention idéale pour réguler les mouvements du genou et participer à l'équilibre général,
- Effet proprioceptif,
- Classe de contention III.



TAILLE	TOUR DE GENOU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	29 - 33 cm	8435025943179	6378562
2	33 - 37,5 cm	8435025943186	6378563
3	37,5 - 42 cm	8435025943193	6378564
4	42 - 47 cm	8435025943209	6378565
5	47 - 53 cm	8435025943216	6378566

LPPR : 201D02. 5 / 17,69€^{TTC}



Prescrire : Genuforte® - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

NOUVEAU

GENOUILLÈRE À ARMATURE SOUPLE

Genuforte Max[®]

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Arthrose légère, Œdème post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot élastique apportant la contention idéale pour réguler les mouvements du genou et participer à l'équilibre général,
- Effet proprioceptif,
- Classe de contention III.

Ressorts spiraliium reproduisant en souplesse et en sécurité le mouvement naturel du genou pour une plus grande dynamique du pas.



TAILLE	TOUR DE GENOU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	29 - 33 cm	8435025943223	6378568
2	33 - 37,5 cm	8435025943230	6378569
3	37,5 - 42 cm	8435025943438	6378570
4	42 - 47 cm	8435025943445	6378571
5	47 - 53 cm	8435025943452	6378572

LPPR : 201D02 . 5 + 201D04 . 3 / **20,27€^{TTC}**

Prescrire : Genuforte Max[®] - Orliman[®]



NOUVEAU LOOK

GENOUILLÈRE ROTULIENNE À ARMATURE SOUPLE

Rotulig Move[®]

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Gonarthrose, Lésion rotulienne, Tendinite du tendon rotulien.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot élastique multidirectionnel pour une meilleure adaptation morphologique,
- Genouillère rotulienne fermée,
- Classe de contention II.

Ressorts spiraliium reproduisant en souplesse et en sécurité le mouvement naturel du genou pour une plus grande dynamique du pas.



Insert rotulien avec picots favorisant l'effet proprioceptif et permettant un meilleur centrage rotulien.

TAILLE	TOUR DE GENOU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	29 - 33 cm	8435025943049	6378549
2	33 - 37,5 cm	8435025943056	6378551
3	37,5 - 42 cm	8435025943063	6378552
4	42 - 47 cm	8435025943070	6378553
5	47 - 53 cm	8435025943162	6378554

LPPR : 201D02 . 5 + 201D04 . 2 + 201D04 . 3 + 201D04 . 4 / **24,46€^{TTC}**

Prescrire : Rotulig Move[®] - Orliman[®]



TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

Rotulig®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Gonarthrose, Lésion rotulienne, Tendinite du tendon rotulien.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot élastique multidirectionnel pour une meilleure adaptation morphologique,
- Classe de contention III.

Bande antiglisse

Tricotage plus souple au niveau du creux poplité pour plus de confort.



Insert rotulien avec picots favorisant l'effet proprioceptif et permettant un meilleur centrage rotulien.




Doubles ressorts spiraliium reproduisant en souplesse et en sécurité le mouvement naturel du genou pour une plus grande dynamique du pas.

TAILLE	TOUR DE GENOU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Enfant	24 - 29 cm	8435025943469	6378528
1	29 - 33 cm	8435025943476	6378529
2	33 - 37,5 cm	8435025943483	6378543
3	37,5 - 42 cm	8435025943490	6378545
4	42 - 47 cm	8435025943506	6378546
5	47 - 53 cm	8435025943599	6378547
6	53 - 58 cm	8435025943629	6378548

LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / **24,46€^{TTC}**

Prescrire : Rotulig® - Orliman®

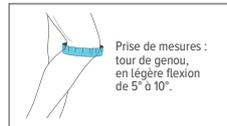

Rotulig Motion®

CHRONIQUE



INDICATIONS :

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE), États d'irritation (tendinopathie, arthrose légère), Instabilité rotulienne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle évolutif fourni avec **doubles ressorts spiraliium** (reproduisant le mouvement du genou pour une plus grande dynamique du pas) et **cadrans articulés et polycentriques avec butée anti-recurvatum** (sécurisant le genou lors des mouvements de flexion/extension et limitant l'amplitude articulaire),
- Tricot multidirectionnel avec bande antiglisse et compression plus faible au creux poplité.

Insert rotulien avec picots favorisant l'effet proprioceptif et permettant un meilleur centrage rotulien.

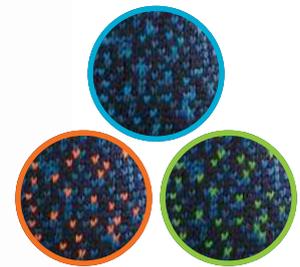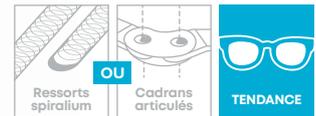

3 coloris disponibles



● BLEU MARINE / TURQUOISE

● BLEU MARINE / ORANGE

● BLEU MARINE / VERT

TAILLE	TOUR DE GENOU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	29 - 33 cm	8435025928299	6240907	8435025928343	6240896	8435025928398	6240902
2	33 - 37,5 cm	8435025928305	6240908	8435025928350	6240897	8435025928404	6240903
3	37,5 - 42 cm	8435025928312	6240909	8435025928367	6240898	8435025928411	6240904
4	42 - 47 cm	8435025928329	6240910	8435025928374	6240899	8435025928428	6240905
5	47 - 53 cm	8435025928336	6240911	8435025928381	6240901	8435025928435	6240906

LPPR : 7132785 / **102,29€^{TTC}**

Prescrire : Rotulig Motion® - Orliman®

GENOUILÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE ET ROTULIENNE

Genulig Stab®

VIDÉO
DE POSE

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Pathologies ligamentaires : Entorse légère à moyenne, Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE), Reprise de sport (sports collectifs).

Pathologies rotuliennes : Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, Tendinite du Fascia lata ou du tendon rotulien, Traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et matériaux souples favorisant la mise en place du produit,
- Matériaux respirants procurant aux patients un réel confort d'utilisation.

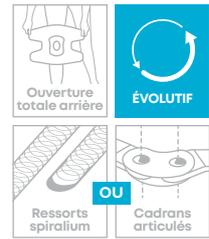


Conception anatomique apportant une grande adaptabilité morphologique.

ACCESSOIRES FOURNIS :**Cadran articulés crantés et polycentriques**


La butée anti-recurvatum des cadrans permet de sécuriser le genou lors des mouvements de flexion / extension.

Entorse, Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE)

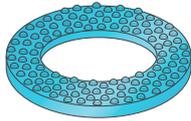**Pad circulaire silicone**


La souplesse du silicone s'adapte parfaitement aux mouvements de flexion / extension pour un meilleur centrage rotulien. Les picots favorisent l'effet proprioceptif.

Gonarthrose, Syndrome rotulien

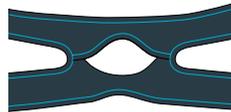**Sangle de strapping en «X»**

L'élasticité des matériaux permet de réaliser une compression graduelle. Astucieuse, elle permet d'effectuer plusieurs types de strapping.

Entorse, Lésion et instabilité légère des ligaments

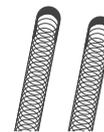**Doubles Ressorts spiralium**

Les ressorts accompagnent l'action des ligaments lors des mouvements du genou.

Reprise d'activité

**Pad silicone & Sangle de strapping demi-lune**

L'association des deux accessoires permet d'effectuer une poussée contrôlée de la rotule ou un appui sur le tendon limitant les vibrations et tensions excessives.

Tendinite rotulienne ou du Fascia lata, Suite subluxation, Syndrome fémoro-patellaire

STRAPPINGS RÉALISABLES :**LIGAMENTS COLLATÉRAUX****Entorse / Instabilité**

Un strapping croisé apporte une stabilité ligamentaire.

**LIGAMENTS CROISÉS****Reprise d'activité**

Un strapping avant renforce et soutient les ligaments.

**ROTULE****Suite subluxation**

Un strapping sur le côté de la rotule évite qu'elle ne se déplace.

**TENDON ROTULIEN****Tendinite**

Un strapping sous la rotule permet la mise au repos du tendon.

**TENDON DU FASCIA LATA****Tendinite**

Un strapping sur le côté externe du genou favorise la mise au repos du tendon.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	39 - 47 cm	8435025926707	6041762
2	47 - 53 cm	8435025926714	6041772
3	53 - 60 cm	8435025926721	6041774
4	60 - 67 cm	8435025926738	6041776
5	67 - 75 cm	8435025926745	6041777

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TT}

Prise de mesures :
tour de cuisse,
jambe en extension
15 cm au-dessus
de la rotule.

Prescrire : Genulig Stab® - Orliman®

Rotulig Stab®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Pathologies ligamentaires : Entorse légère, Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE), Reprise de sport (sports collectifs).

Pathologies rotuliennes : Instabilité rotulienne, Gonarthrose.


CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot élastique multidirectionnel pour une meilleure adaptation morphologique,
- Insert rotulien avec picots participant à l'effet proprioceptif,
- Sangles amovibles (haute et basse) optimisant le cloisonnement de l'articulation.

Sangles amovibles



Doubles ressorts spiralium reproduisant en souplesse et en sécurité le mouvement naturel du genou pour une plus grande dynamique du pas.

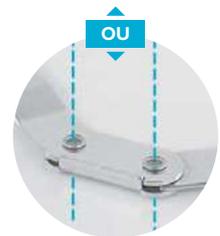


Cadran articulé polycentrique limitant l'amplitude articulaire.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	TOUR DE MOLLET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	36 - 39 cm	26 - 29 cm	8435025942905	6378555
2	39 - 42 cm	29 - 32 cm	8435025942912	6378556
3	42 - 45 cm	32 - 35 cm	8435025942998	6378557
4	45 - 48 cm	35 - 38 cm	8435025943001	6378558
5	48 - 51 cm	38 - 41 cm	8435025943018	6378559
6	51 - 54 cm	41 - 44 cm	8435025943025	6378560
7	54 - 57 cm	44 - 47 cm	8435025943032	6378561

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Rotulig Stab® - Orliman®

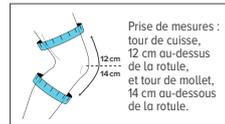

Prise de mesures :
tour de cuisse, 12 cm au-dessus de la rotule, et tour de mollet, 14 cm au-dessous de la rotule.

Genulig® Cryotec®

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE) ou rotulienne, Post-opératoire, Post-traumatique, Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, Reprise du sport ou d'activité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et matériaux souples favorisant la mise en place du produit,
- Matériaux respirants procurant aux patients un réel confort d'utilisation,
- 2 doubles ressorts spiralium pour accompagner les ligaments,
- Cadrans articulés crantés et polycentriques avec butée anti-recurvatum permettant de sécuriser le genou lors des mouvements de flexion/extension.

Sangle de strapping en «X» permettant de réaliser une compression graduelle et d'effectuer plusieurs types de strapping.

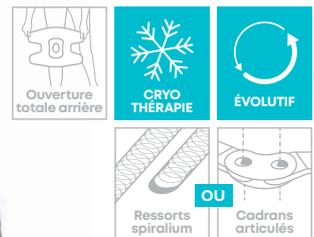

Pad circulaire silicone avec picots favorisant l'effet proprioceptif et permettant un meilleur centrage rotulien.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	39 - 47 cm	8435025926561	6041780
2	47 - 53 cm	8435025926578	6041781
3	53 - 60 cm	8435025926677	6041782
4	60 - 67 cm	8435025926684	6041783
5	67 - 75 cm	8435025926691	6041784

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genulig® Cryotec® - Orliman®



Prise de mesures :
tour de cuisse, jambe en extension 15 cm au-dessus de la rotule.

Compresse de froid amovible technologie « flocon de neige » apporte une diffusion d'un froid constant et de longue durée tout en restant malléable et agréable à utiliser.

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Genouillère Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :


Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

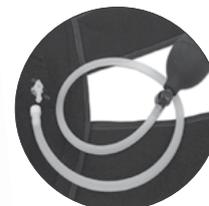

1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.



Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025928671	6028941

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : Genouillère Cryopump® - Orliman®

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Genouillère articulée Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement,
- 2 cadrans articulés amovibles aident la sécurisation latérale.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrans articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.



Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025926981	6085589

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genouillère articulée Cryopump® - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

Flexilig®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Entorse des plans latéraux, Élongation et rupture partielle des ligaments latéraux LLI et LLE, Instabilité chronique du genou, Rééducation, Arthrose.

CARACTÉRISTIQUES :

- Rotule ouverte et évidement poplitéal.

Ouverture totale
fermeture postérieure.




TAILLE	TOUR DE CUISSSE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	39 - 47 cm	8435025925793	4646437
2	47 - 53 cm	8435025925809	4646443
3	53 - 60 cm	8435025925816	4646466
4	60 - 67 cm	8435025925830	4646472
5	67 - 75 cm	8435025925847	4646489
6	75 - 82 cm	8435025926295	9754806

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Flexilig® - Orliman®



Tissage respirant
à base de fibres non
allergisantes.

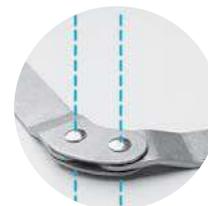

Cadran articulé
polycentrique cranté
butée anti-recurvatum,
pour un renfort articulaire.



oneplus

Genouillère ligamentaire articulée

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Arthrose et arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Traitement post-opératoire et post-traumatique, Instabilités latérales du genou, de type varus ou valgus (en utilisant les articulations polycentriques rigides).

CARACTÉRISTIQUES :

- Genouillère enveloppante à fermeture postérieure,
- 4 sangles amovibles et découpables (hautes et basses),
- 2 cadrans articulés polycentriques crantés et amovibles en aluminium,
- 2 doubles ressorts spiraliuam amovibles.



Matériau élastique
dans la zone poplitée
pour faciliter l'adaptation
au genou.

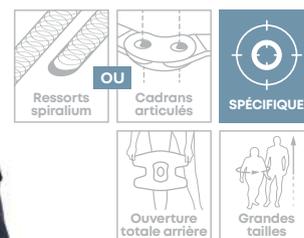

Tissu élastique
au niveau de la rotule pour éviter
les déplacements et les œdèmes
causés par un effet de striction.




2 bandes antiglisse internes
(points de silicone)
dans les parties, inférieure
et supérieure, de l'attelle
pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	49 - 58 cm	8435025926486	6036093
2	58 - 69 cm	8435025926493	6036094
3	69 - 82 cm	8435025926509	6036095

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée One Plus - Orliman®

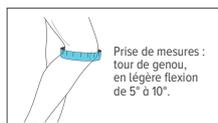

GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE RÉGLABLE

Altitude®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatologie : Entorse des plans latéraux, Élongation et rupture partielle des ligaments latéraux LLI et LLE, Pré ou Post intervention chirurgicale des LLI et LLE, Réadaptation fonctionnelle : Instabilité chronique du genou.

CARACTÉRISTIQUES :

- Genouillère ligamentaire articulée réglable,
- Bandes antiglisse circulaires.

Éclisse postérieure en ABS

large et amovible par fixation auto-agrippante permettant d'accroître la qualité d'immobilisation (type « 3 pans »).




TAILLE	TOUR DE CUISSE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	39 - 47 cm	8435025925502	9775530
2	47 - 53 cm	8435025925519	9775547
3	53 - 60 cm	8435025925526	9775553
4	60 - 67 cm	8435025925533	9775576
5	67 - 75 cm	8435025925540	9775582

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TT}

Prescrire : Altitude® - Orliman®



Prise de mesures :
tour de cuisse,
jambe en extension
15 cm au-dessus
de la rotule.

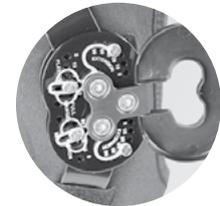**Articulation polycentrique en aluminium**

cadrans réglable par picots en flexion et en extension (0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°).

Sangles avec boucles à fixation rapide (clips).

oneplus

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

Genouillère ligamentaire articulée réglable**INDICATIONS :**


Arthrose et arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Instabilités latérales du genou de type varus ou valgus, Pathologies pour lesquelles il convient de contrôler l'amplitude articulaire du genou, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 cadrans polycentriques articulés et réglables avec contrôle de la flexion-extension à intervalles de 0°-15°-30°-60°-90°,
- 2 sangles amovibles d'ajustement de la compression.



Fermeture enveloppante en forme de «S»
assurant une meilleure adaptation morphologique.

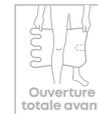

Tissu élastique
au niveau de la rotule pour éviter les déplacements et les œdèmes causés par un effet de striction.




2 bandes antiglisse internes (points de silicone)
dans les parties, inférieure et supérieure, de l'attelle pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	49 - 55 cm	8435025926516	6036096
2	55 - 62 cm	8435025926523	6036098
3	62 - 71 cm	8435025926530	6036099
4	71 - 82 cm	8435025926547	6036100

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TT}

Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée réglable One Plus - Orliman®

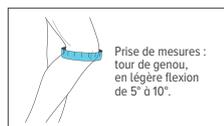

Prise de mesures :
tour de genou,
en légère flexion
de 5° à 10°.

Genurom Neo®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement pré ou post-opératoire des ligaments LCA et LCP.

CARACTÉRISTIQUES :

- Articulations polycycliques dynamiques avec contrôle limitant la flexion-extension de l'articulation tout en reprenant la physiologie du mouvement du genou,
- Ergonomie optimisée par les embrasses en aluminium de la cuisse et du mollet (version postérieure) ou du tibia (version antérieure),
- Doublage intérieur antidérapant apportant confort et protection,
- Sangles de soutien réglables.



Coussins condylières
limitant les appuis pour plus de confort.



Réglages par cales
en acier zingué évitant la corrosion.

Limitation en extension
0°, 10°, 20°, 30° et 40°
et en flexion
90°, 75°, 60° et 45°.

PRINCIPE MÉCANIQUE DE LA GENUROM NEO® (ANTÉRIEURE ET POSTÉRIEURE) :


RÔLE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR (LCA) :

Le LCA possède un double rôle :

- Il s'oppose à la translation antérieure du tibia par rapport au fémur.
- Il empêche les mouvements excessifs vers l'avant et la rotation interne du tibia par rapport au fémur.

L'ACTION RECHERCHÉE :

Exercer des forces antérieures afin de contrôler le mouvement :
Les forces FA1 et FA4 permettent de contrôler le mouvement excessif du tiroir antérieur du tibia.

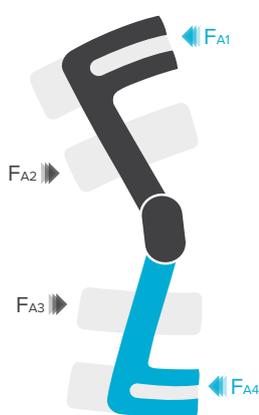


RÔLE DU LIGAMENT CROISÉ POSTÉRIEUR (LCP) :

Le LCP possède un double rôle :

- Il s'oppose au déplacement postérieur du tibia par rapport au fémur.
- Il empêche les mouvements excessifs vers l'arrière et la rotation externe du tibia par rapport au fémur.

L'ACTION RECHERCHÉE :

Exercer des forces postérieures afin de contrôler le mouvement :
Les forces FP1 et FP4 permettent de contrôler le mouvement excessif du tiroir postérieur du tibia.

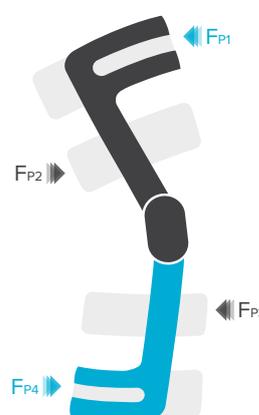

GENUROM NEO® ANTÉRIEURE



GENUROM NEO® POSTÉRIEURE



Prise de mesures :
tour de cuisse,
jambe en extension
15 cm au-dessus
de la rotule.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	Genurom Neo® ANTÉRIEURE				Genurom Neo® POSTÉRIEURE			
		GAUCHE		DROIT		GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	34 - 41 cm	8435025926882	6040819	8435025926752	6040813	8435025926431	6034708	8435025926387	6034703
2	41 - 48 cm	8435025926899	6040820	8435025926844	6040814	8435025926448	6034710	8435025926394	6034704
3	48 - 55 cm	8435025926905	6040821	8435025926851	6040815	8435025926455	6034711	8435025926400	6034705
4	55 - 62 cm	8435025926929	6040823	8435025926868	6040817	8435025926462	6034712	8435025926417	6034706
5	62 - 69 cm	8435025926936	6040824	8435025926875	6040818	8435025926479	6034713	8435025926424	6034707

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genurom Neo® antérieure ou Genurom Neo® postérieure - Orliman®

GENOUILLÈRE GONARTHROSE

Gonartec Plus®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Gonarthrose (tibia, fémur ou fémoro-tibiale).

CARACTÉRISTIQUES :

- Articulations polycentriques dynamiques avec contrôle latéral apportant un appui du fémur et des condyles limitant les frottements osseux non maîtrisés,
- Matériau plastique de densité inférieure améliorant le confort d'utilisation,
- Doublage intérieur respirant en maille 3D,
- 4 sangles numérotées optimisant la mise en place du produit.

Limitation en extension
0°, 10°, 20°, 30° et 40°
et en flexion
90°, 75°, 60°, 45°,
30°, 20°, 10° et 0°.



Coussin condyloaire
limitant l'appui pour plus de confort.

Système de fermeture rapide
sûr et facile à ajuster.



Réglage par cales
en acier zingué
évitant la corrosion.

	GAUCHE		DROIT	
TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025926974	6043551	8435025926967	6041759

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Gonartec Plus® - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

30%

des blessures en ski alpin
sont des entorses du genou.

Source : Comprendre l'entorse du genou.
www.ameli.fr - Octobre 2023.

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

ATTELLE DE GENOU ARTICULÉE

Genuflex Rom®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Pré ou Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Graduation tous les 10° (jusqu'à 30°) et tous les 15° (à partir de 30°),
- 4 enveloppes capitonnées,
- Sangles découpables avec fixations papillons auto-agrippantes repositionnables,
- Hauteur totale de l'attelle : 54 cm mini - 72 cm maxi (4 réglages distincts à la cuisse et au mollet).

Cadran articulé
flexion de 0° à 120°
et extension de 0° à 90°
(immobilisation totale en flexion de 0° à 45° avec lock).



Tige télescopique en aluminium à encoches
réglable en hauteur.

Fermetures clips à mémoire de réglage

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	> 165 cm	8435025929395	6010867

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}



Prise de mesures maximales :
Tour de cuisse : 82 cm

Prescrire : Genuflex Rom® - Orliman®

oneplus

Attelle de genou articulée

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Rééducation post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :


- 4 réglages distincts à la cuisse et au mollet,
- Cadran articulé gradué réglable :
Flexion : de 0° à 120°
(par graduations de 10° jusqu'à 30° et par graduations de 15° jusqu'à 120°),
Extension : de 0° à 90°
(par graduations de 10° jusqu'à 30° et par graduations de 15° jusqu'à 90°),
Immobilisation totale de 0° à 45°,
- Sangles recoupables avec fixations papillons auto-agrippantes.



2 enveloppes capitonnées découpables
pour un ajustement et un confort optimaux.

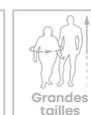

Fermeture à clips à mémoire de réglage

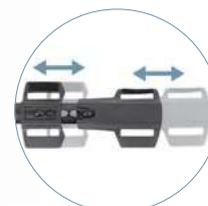

Barres télescopiques en aluminium et clips de friction
permettant de régler la hauteur souhaitée.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025929401	6036101

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prise de mesures maximales :
Tour de cuisse : 85 cm
Tour de mollet : 65 cm

Prescrire : Attelle de genou articulée One Plus - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

AUTRES
GAMMES

ATTELLE DE GENOU AÉRÉE

Genu'R® / Genu'R® 20°

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse, Luxation de la rotule, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 éclisses amovibles et modelables en aluminium (préformées à 20° sur le modèle Genu'R® 20°) pour une bonne immobilisation du genou,
- Élégante et aérée, la Genu'R® se positionne comme l'une des attelles les plus légères du marché (400g pour le modèle Hauteur 50 / Taille 1).



**Modèle léger
et aéré**
confortable
au quotidien.



**Système de fixation
par clip à mémoire
de réglage**
pour une plus grande
facilité d'utilisation.

HAUTEUR 40 cm
(individu < 150 cm)

HAUTEUR 50 cm
(individu 150 à 180 cm)

HAUTEUR 60 cm
(individu > 180 cm)

TAILLE	Genu'R®				Genu'R® 20°				Genu'R®				Genu'R® 20°				
	TOUR DE CUISSE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7			CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7			CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7			
Unique / Enfant	35 - 43 cm	8435025928688	8150851		8435025929333	6219384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	43 - 53 cm	-	-	-	-	-	8435025928695	8150874	8435025929340	6219385	8435025928718	8150897	8435025929364	6219386	-	-	-
2	53 - 63 cm	-	-	-	-	-	8435025928701	8150880	8435025929357	6219388	8435025928725	8150845	8435025929388	6219387	-	-	-

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : Genu'R® ou Genu'R® 20° - Orliman®

ATTELLE DE GENOU

Monobloc

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse, Luxation de la rotule, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Immobilisation du genou en extension,
- Système de bandes antiglisse internes.



HAUTEUR 40 cm
(individu < 150 cm)

HAUTEUR 50 cm
(individu 150 à 180 cm)

HAUTEUR 60 cm
(individu 180 à 190 cm)

HAUTEUR 65 cm
(individu > 190 cm)

TAILLE	TOUR DE CUISSE	HAUTEUR 40 cm		HAUTEUR 50 cm		HAUTEUR 60 cm		HAUTEUR 65 cm	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7						
Unique	23 - 36 cm	8435025928619	4620857	-	-	-	-	-	-
1	36 - 48 cm	-	-	8435025928626	4620863	-	-	-	-
2	48 - 60 cm	-	-	8435025928633	4620886	-	-	-	-
1	42 - 52 cm	-	-	-	-	8435025928640	4620892	-	-
2	52 - 64 cm	-	-	-	-	8435025928657	4620900	-	-
Unique	48 - 60 cm	-	-	-	-	-	-	8435025928664	4620917

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : Monobloc - Orliman®



3 Pans

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :



- Éclisses postérieures et latérales modelables,
- Facile à positionner (avec sangles élastiques pour prépositionner l'attelle),
- Bandes antiglisse internes.



Modèle 3 volets
avec panneaux latéraux amovibles.

Réglage par sangles
avec boucles anti-vrilles.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	TOUR DE CUISSE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	< 110 cm	25 cm	28 - 36 cm	8435025928992	6034697
1 / Enfant	110 - 140 cm	40 cm	33 - 39 cm	8435025929005	6034698
2	140 - 160 cm	50 cm	39 - 46 cm	8435025929012	6034699
3	160 - 180 cm	55 cm	46 - 51 cm	8435025929029	6034700
4	180 - 190 cm	60 cm	51 - 66 cm	8435025929036	6034701
5	> 190 cm	66 cm	66 - 75 cm	8435025929043	6034702

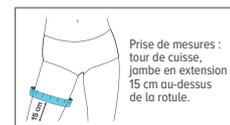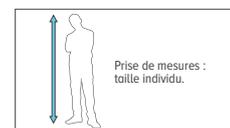

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : 3 Pans - Orliman®

3 Pans 20°

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :


- 1 panneau central et 2 panneaux latéraux amovibles pour faciliter le réglage selon la morphologie du patient,
- Éclisses latérales postérieures amovibles pour le lavage de l'attelle.



2 éclisses latérales et une double éclisse postérieure préformées selon un angle de 20° pour l'immobilisation du genou en légère flexion.

Sangles de serrage avec boucles anti-vrilles facilitant la mise en place et le réglage.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	TOUR DE CUISSE	HAUTEUR	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	< 150 cm	< 55 cm	40 cm	8435025928589	6026622
2	150 - 180 cm	< 67 cm	50 cm	8435025928596	6026623
3	> 180 cm	< 80 cm	60 cm	8435025928602	6026620

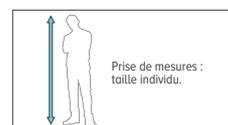

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : 3 Pans 20° - Orliman®

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Attelle de genou évolutive Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- L'attelle de genou évolutive Cryopump® est développée en deux parties dissociables permettant de passer du traitement en phase d'immobilisation (grâce à des éclisses postérieures préformées, latérales amovibles et modelables) en phase de maintien renforcé (grâce à ses éclisses latérales articulées),
- Ses deux zones de compression graduelle par pompe permettent une meilleure répartition du froid.


LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid anatomiques et 2 compresses de froid rectangulaires,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrans articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025928985	6120301

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Attelle de genou évolutive Cryopump® - Orliman®

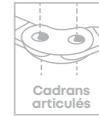

Cadrans articulés



CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE



ÉVOLUTIF



1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.

Compresses de gel rectangulaires et anatomiques
pour une meilleure répartition du froid.



ATTELLE DE GENOU

Kit Compressive Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-traumatique, Entorse avec œdème, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Compression + thérapie par le froid,
fournie avec 2 compresses de froid 30 x 15 cm
(possibilité d'utilisation avec 4 compresses 15 x 15 cm),
- Éclisses postérieures et latérales amovibles.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	8435025929074	6034893
2	> 160 cm	61 cm	8435025929081	6034895

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : Kit Compressive Cryotec® - Orliman®



CRYO THÉRAPIE




ÉVOLUTIF

ATTELLE DE GENOU COMPRESSIVE SEULE (sans compresse de froid)

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	8435025929050	6034718
2	> 160 cm	61 cm	8435025929067	6034719

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : Attelle de genou Compressive seule - Orliman®

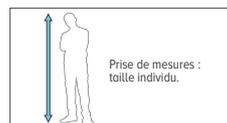Prise de mesures :
taille individu.



AUTRES
GAMMES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

**CHEVILLE
& PIED**

GENOU

**POIGNET
& MAIN**

**ÉPAULE
& BRAS**

**TRONC
& RACHIS**



CHEVILLE & PIED






La cheville est une articulation très stable qui relie le pied au reste de la jambe, dont le rôle principal est de transmettre des mouvements aux muscles des membres inférieurs. Elle a un rôle clé dans le passage au pas, à la marche et également une fonction d'appui. La cheville est également fondamentale dans le maintien de l'équilibre corporel statique et dynamique. Elle peut être soumise, lors d'activités sportives, à de très grosses charges, pouvant aller jusqu'à plusieurs fois le poids du corps.

Le squelette du pied est constitué de 28 os dont la disposition permet d'assurer les deux fonctions principales du pied : l'appui et la locomotion.

La partie arrière du pied, qui se compose du talus et du calcaneum, assure la stabilité et amortit le poids du corps. La partie avant du pied permet d'assurer la mobilité de celui-ci, selon les mouvements d'abduction/adduction, pronation/supination et de flexion/extension.

Cheville & Pied

Guide de délivrance

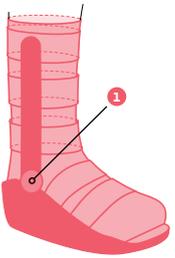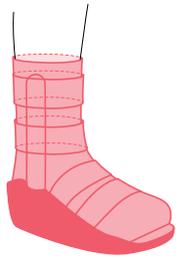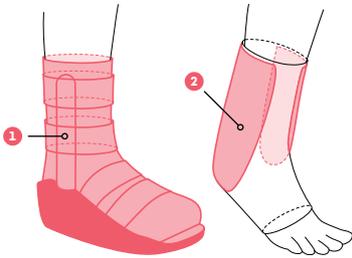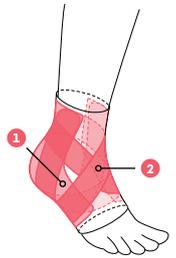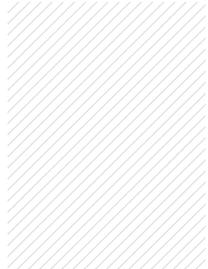
		← TRAUMATIQUE →						
		Rupture du tendon d'Achille. Post-opératoire.	Entorse de Chopart. Fracture de la cheville ou des métatarses. Pré et Post-opératoire.	Entorse latérale moyenne à grave.	Entorse latérale légère. Laxité.			
PHASE DE GUÉRISON	OBJECTIF	Favoriser la reconstruction du tendon.	Favoriser la cicatrisation ligamentaire et la consolidation osseuse.	Favoriser la cicatrisation ligamentaire.				
	ACTION	Immobilisation stricte.		Immobilisation stricte ou relative.	Limitation de l'amplitude articulaire.			
	ÉLÉMENT MÉCANIQUE	 Botte de marche avec cadran articulé 1	 Botte de marche	 Botte de marche 1 ou coques rigides ou éclisses métalliques latérales 2		 Renforts latéraux 1 + système de strapping 2		
	DÉLIVRANCE PRODUIT	 Botimed® Articulée Haute p.137 CONFORT	 Botimed® Air ou Botimed® Basse et Haute p.136 CONFORT	 Botimed® Air Basse et Haute p.136 CONFORT	 Memoforme® Memoforme Air® p.134 CONFORT	 Memostab® p.133 FACILE	 Fixquick Max p.132 TENDANCE	 Chevistrap® p.133 CONFORT
		↓	↓	↓				
PHASE DE CONSOLIDATION	 Chevi Achillo® p.130 ÉVOLUTIF		 Chevistrap® p.133 CONFORT					
	PHASE DE REPRISE D'ACTIVITÉ & PRÉVENTION	 Chevi Achillo® p.130 ÉVOLUTIF	 CheviX® p.131 ÉVOLUTIF	 Chevistrap® p.133 CONFORT	 Chevilig® p.131 FACILE	 CheviX® p.131 ÉVOLUTIF		

← CHRONIQUE →

**Simple foulure.
Instabilité.**

Suppléer l'action du ligament.

**Limitation de l'amplitude
articulaire.**


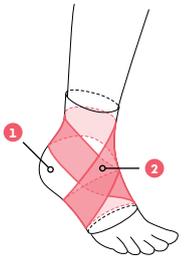


Tissu élastique 1
+ système de strapping 2



Chevilig®
p.131
FACILE

CheviX®
p.131
ÉVOLUTIF

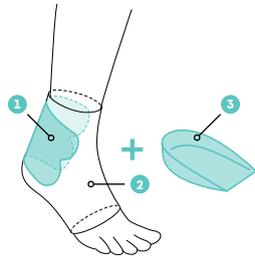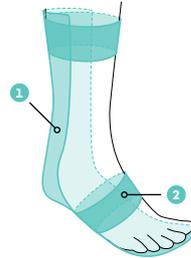Tendinopathies achilléennes. États inflammatoires. Suite d'une rupture du tendon d'Achille.	Steppage.
Réduire l'inflammation du tendon.	Améliorer la mobilité.
Mise au repos du tendon.	Compensation de la fonction articulaire.
 <p>Pad silicone 1 + tissu élastique 2 + talonnettes 3</p>	 <p>Support de maintien à angle droit (par sangle ou releveur 1) + sangle de cheville 2</p>
 <p>Chevi Achillo® p.130 ÉVOLUTIF</p>	 <p>Boxia® p.140 LÉGÈRETÉ</p> <p>Boxia Plus® p.140 FACILE</p>  <p>Releveur de pied p.141 SPÉCIFIQUE</p>

← ATTELLE COMPLÉMENTAIRE →

Cryothérapie.



Chevillère CRYOPUMP®
p.135
CONFORT

CHEVILLÈRE DE CONTENTION

Cheviforte®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Prévention, Maintien souple.

CARACTÉRISTIQUES :

- Procure un effet proprioceptif et apporte la contention optimale pour réguler les mouvements de la cheville et participer à son bon maintien,
- Contention forte et réduite aux extrémités,
- Classe de contention III.

Tricot extensible
avec talon fermé.



TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	17 - 20 cm	8435025905030	4633860
2	20 - 22 cm	8435025905962	4633854
3	22 - 24 cm	8435025905979	4633848
4	24 - 26 cm	8435025905986	4633831
5	26 - 29 cm	8435025905993	4633825

LPPR : 201D02.6 / 16,19€^{TTC}

Prescrire : Cheviforte® - Orliman®



CHEVILLÈRE ACHILLÉENNE

Chevi Achillo®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Achillodynie (tendinopathies achilléennes), États inflammatoires aigus ou chroniques du tendon d'Achille, Thérapie post-traumatique et post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Procure un effet proprioceptif et apporte la contention optimale pour réguler les mouvements de la cheville et participer à son bon maintien,
- Contention forte et réduite aux extrémités,
- Classe de contention III.

Tricot extensible
avec talon fermé.



Pad silicone avec picots
situé au niveau du tendon d'Achille, permet d'envelopper et protéger le tendon, tout en réduisant les chocs.



2 talonnettes silicone amovibles
permettent une légère augmentation de la flexion plantaire afin de décharger le tendon d'Achille et le soulager tout en réduisant les chocs mécaniques subis par la cheville et le genou lors de l'activité.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	17 - 20 cm	8435025904576	6259831
2	20 - 22 cm	8435025904583	6259832
3	22 - 24 cm	8435025904590	6259833
4	24 - 26 cm	8435025904606	6259834
5	26 - 29 cm	8435025904613	6259835

LPPR : 201D02.6 + 201D04.4 / 18,77€^{TTC}

Prescrire : Chevi Achillo® - Orliman®



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

Chevilig®



CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traitement pour suite d'entorse de cheville bénigne,
Reprise d'activité sportive.

CARACTÉRISTIQUES :

- Procure un effet proprioceptif et apporte la contention optimale pour réguler les mouvements de la cheville et participer à son bon maintien,
- Contention forte et réduite aux extrémités,
- La sangle peut se porter avec ou sans la chevillère de contention,
- Classe de contention III.

Tricot extensible
avec talon fermé.




Sangle amovible auto-agrippante
strapping limitant l'inversion
ou l'éversion de la cheville.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0 / Enfant	14 - 17 cm	8435025906167	9492884
1	17 - 20 cm	8435025906174	4872613
2	20 - 22 cm	8435025906181	4872607
3	22 - 24 cm	8435025906198	4872599
4	24 - 26 cm	8435025906365	4872582
5	26 - 29 cm	8435025906372	4872576

LPPR : 201D02.6 / 16,19€^{TT}

Prescrire : Chevilig® - Orliman®

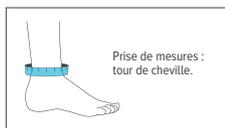

CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

CheviX®



CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traitement pour suite d'entorse de cheville moyenne à grave,
Idéal reprise d'activité sportive, Instabilité ligamentaire,
Relais suite d'entorse de Chopart légère.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux souples et respirants,
- Multi-strapping apportant une solution ciblée :



#1 STRAPPING ∞FORM

Contrôle et limite
les appuis latéraux de la cheville.


ENTORSE LATÉRALE



#2 CHOPART STRAPPING

Soutient et stabilise l'extérieur du pied.
Contrôle les appuis.

ENTORSE DE CHOPART

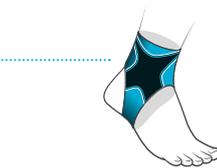

#3 STRAPPING X-SYSTEM

Apporte un renfort ligamentaire et limite
le mouvement latéral de la cheville.

ENTORSE - REPRISE D'ACTIVITÉ - PRÉVENTION

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	DROIT	
				CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0	17 - 20 cm	8435025904019	6126255	8435025903906	6126254
1	20 - 23,5 cm	8435025904026	6120299	8435025903913	6120297
2	23,5 - 27 cm	8435025904033	6120300	8435025903920	6120298

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TT}

Prescrire : CheviX® - Orliman®



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

NOUVEAU

ATTELLE DE CHEVILLE

Fixquick Max



TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Entorse récente de la cheville moyenne à grave,
Prévention des récurrences de l'entorse,
Reprise d'activité sportive (ex. sports de pivots),
Instabilité ligamentaire chronique.



CONFORTABLE À PORTER

- Maille 3D et souple**
au niveau des malléoles pour une meilleure respirabilité et évacuation de la chaleur tout en évitant les points de pression.
- Tissu élastique et antidérapant**
sous la voûte plantaire pour une meilleure adhérence et adaptation morphologique.
- Capitonnage effet velours**
et intérieur doux au toucher pour un confort maximal.

MAINTIEN OPTIMAL HOMOGÈNE

SYSTÈME MULTI-STRAPS

- 3 strappings possibles**
pour adapter le niveau de maintien en fonction de la nature, de la gravité et des besoins spécifiques de la blessure.



STRAPPING EN 8
Stabilisation latérale et médiale
Apporte un soutien latéral et médial renforcé de l'articulation.



STRAPPING EN DOUBLE 8 CROISÉ
Stabilisation accrue
Offre une résistance supplémentaire contre les mouvements de torsion.



STRAPPING ANTIVARUS
Prévention de l'inversion
Limite les mouvements d'inversion de la cheville et réduit la tension sur les ligaments latéraux (ligament talo-fibulaire antérieur).



SYSTÈME MULTI-POINTS

- Système de laçage**
allant sur le cou-de-pied pour limiter la flexion dorsale.
- Renforts métalliques latéraux**
anatomiques.

MISE EN PLACE FACILE

POWERED BY BOA® FIT SYSTEM

- Système de fermeture Boa®**
qui permet de serrer et desserrer pour un ajustement précis (1 cran = 1 millimètre).



- Guide de serrage et desserrage**
pour uniformiser le serrage, sans point de pression ni frottement.

- Grande ouverture**
à l'avant pour faciliter l'enfilage et le retrait de l'attelle.

Vue de dos



TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0	15 - 18 cm	8435025948297	6407099
1	18 - 21 cm	8435025948303	6407100
2	21 - 24 cm	8435025948310	6407101
3	24 - 27 cm	8435025948327	6407102
4	27 - 30 cm	8435025948334	6407103

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Attelle de cheville Fixquick Max - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

Chevistrap®

VIDÉO DE POSE



CHRONIQUE

INDICATIONS :

Entorse légère, Lésion et instabilité ligamentaire interne et/ou externe, Idéal suite d'entorse, Reprise de sport, Prévention.

CARACTÉRISTIQUES :

- Repérage couleur (bleu et orange) pour une plus grande facilité de mise en place,
- Réglage par lacets pour un ajustement rapide et précis à la morphologie de la cheville,
- Dotée de renforcements bilatéraux permettant une stabilité et un équilibre naturel sans aucune gêne lors des mouvements de flexion et d'extension du pied, nécessaires pour la pratique du sport,
- Doublure intérieure respirante en tissu POROMAX®.




Système de double sanglage en 8

conçu pour apporter une stabilité médio-latérale limitant ainsi une inversion et éversion du pied.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1 / Enfant	17 - 20 cm	8435025904293	8176023
2	20 - 24,5 cm	8435025904309	8176170
3	24,5 - 29 cm	8435025904316	8176187

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

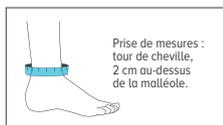

Prescrire : Chevistrap® - Orliman®

ATTELLE DE CHEVILLE

Memostab®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de la cheville récente, Entorse légère à moyenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle semi-fermé facilitant la mise en place tout en apportant un confort optimal,
- Anatomique, confortable, amortit les vibrations, évite les points de pression sur les zones douloureuses.



Système de poulies permettant de découpler la force de tirage afin d'obtenir une immobilisation ajustée.

Sangle de pré-maintien pour un réglage précis de l'attelle.



2 coques amovibles semi-rigides

conçues spécifiquement pour la malléole interne (I) et la malléole externe (E) et mousse double densité garantissant une bonne adaptation morphologique et un confort optimal.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0 / Enfant	30 - 35	8435025902398	6005167
1	35 - 40	8435025902404	6005165
2	40 - 45	8435025902855	6005166

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Memostab® - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

ATTELLE DE CHEVILLE

Memoforme®

VIDÉO
DE POSE



TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de la cheville récente,
Entorse légère à moyenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Évidement malléolaire évitant tout point de pression sur les zones douloureuses,
- Longue sangle calcanéenne.

2 coussins amovibles
en mousse à mémoire de forme
double densité.

Coques à double rigidité
rigides en partie supérieure
et semi-rigides sous les malléoles
pour plus de stabilité et une meilleure
adaptation dans la chaussure.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Petit / Enfant	120 - 160 cm	8435025902909	6032965
Standard	> 160 cm	8435025902916	6032966

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Memoforme® - Orliman®



Prise de mesures :
taille individu.



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

NOUVEAU

ATTELLE DE CHEVILLE

Memoforme® Air

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Entorse récente de la cheville moyenne à grave,
Résorption d'œdème.

CARACTÉRISTIQUES :

- Évidement malléolaire évitant tout point de pression sur les zones douloureuses,
- Longue sangle calcanéenne,
- 1 tuyau de gonflage fourni.

2 coussins d'air amovibles
offrant un effet massant
pour la réduction d'œdème
et un confort malléolaire optimal.

Coques à double rigidité
rigides en partie supérieure
et semi-rigides sous les malléoles
pour plus de stabilité et une meilleure
adaptation dans la chaussure.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Petit / Enfant	120 - 160 cm	8435025948723	6409364
Standard	> 160 cm	8435025948730	6409365

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Memoforme Air® - Orliman®



Prise de mesures :
taille individu.



Attelle de cheville

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Entorse, Laxité ligamentaire,
Instabilité ostéo-articulaire chronique,
Traitement post-opératoire et post-traumatique,
Prévention des séquelles durant la marche.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et évidement dans la zone du talon pour faciliter la mise en place.

Sangle de pronosupination
amovible et découpable permettant
de restreindre les mouvements de la cheville.



2 plaques médio-latérales
en matériau thermoplastique de haute densité,
avec différentes finalités en fonction de la phase
de récupération : effet correcteur ou stabilisateur.




**Tissu élastique dans la zone
du tendon d'Achille**
facilitant l'adaptation au calcanéus.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	23 - 26 cm	8435025903319	6036102
2	26 - 29 cm	8435025903326	6036103
3	29 - 32 cm	8435025903333	6036104

LPPR : 7132667 / **27,44€^{TC}**

Prescrire : Attelle de cheville One Plus - Orliman®

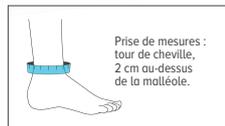

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Chevillère Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique,
Rééducation.

CARACTÉRISTIQUES :

- La chevillère anatomique CRYOPUMP® est dotée
d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau
du talon pour une meilleure adaptation morphologique,
- Sa sangle facilite la mise en place du produit
même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif
réduisant les risques de contamination et
la transmission d'agents infectieux
lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible
apportant une compression
graduelle en fonction du traitement
et du ressenti du patient.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025903890	6035380

LPPR : 7132667 / **27,44€^{TC}**

Prescrire : Chevillère Cryopump® - Orliman®

Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.



BOTTE DE MARCHÉ

Botimed® Basse/Haute



TRAUMATIQUE

INDICATIONS BOTIMED® HAUTE :

Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (fracture distale du tibia ou du péroné), de la cheville et du pied, Blessure au tendon d'Achille et aux ligaments (entorse de grade II et III), Fasciite plantaire sévère, Autres soins post-chirurgicaux ou post-traumatiques.

INDICATIONS BOTIMED® BASSE :

Entorse grave de la cheville, Fracture de la cheville, des malléoles et des métatarses.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chausson enveloppant matelassé en tissu respirant avec coussinets de protection et protège orteils,
- Coque d'immobilisation avec semelle profilée antidérapante en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas.



BOTIMED® PÉDIATRIQUE (voir p. 145)

BOTIMED® BASSE

BOTIMED® HAUTE

TAILLE	POINTURE	MESURE DU PIED	BOTIMED® PÉDIATRIQUE (voir p. 145)			BOTIMED® BASSE			BOTIMED® HAUTE		
			HAUTEUR	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	HAUTEUR	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	HAUTEUR	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	21 - 27	14 - 18 cm	25 cm	8435025906464	8275937	-	-	-	-	-	-
Enfant	24 - 33	16 - 21 cm	30 cm	8435025906471	8275943	-	-	-	-	-	-
1	34 - 38	-	-	-	-	27,5 cm	8435025906488	4633995	38 cm	8435025906594	4634090
2	38 - 43	-	-	-	-	27,5 cm	8435025906495	4634003	44 cm	8435025906600	4634109
3	43 - 46	-	-	-	-	27,5 cm	8435025906501	4634026	44 cm	8435025906617	4634115

LPPR : 7132800 / 64,40€^{TTC}

Prescrire : Botimed® Basse, Botimed® Haute ou Botimed® Pédiatrique - Orliman®

BOTTE DE MARCHÉ

Botimed® Air Basse/Haute



TRAUMATIQUE

INDICATIONS BOTIMED® AIR HAUTE :

Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (fracture distale du tibia ou du péroné), de la cheville et du pied, Blessure au tendon d'Achille et aux ligaments (entorse de grade II et III), Fasciite plantaire sévère, Réduction de l'œdème, Autres soins post-chirurgicaux ou post-traumatiques.

INDICATIONS BOTIMED® AIR BASSE :

Fracture de la cheville, de la malléole et du cou-de-pied (tarses et métatarses), Entorse grave de la cheville, Permet un accroissement de la mobilité en post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Pompe de gonflage intégrée avec vanne de régulation,**
- Chausson enveloppant matelassé en tissu respirant avec coussinets de protection et protège orteils,
- Coque d'immobilisation avec semelle profilée antidérapante en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas.



BOTIMED® AIR BASSE

BOTIMED® AIR HAUTE

TAILLE	POINTURE	BOTIMED® AIR BASSE			BOTIMED® AIR HAUTE		
		HAUTEUR	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	HAUTEUR	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	34 - 38	21,5 cm	8435025906624	9775501	36 cm	8435025906761	9775470
2	38 - 43	23 cm	8435025906631	9775518	39,5 cm	8435025906778	9775487
3	43 - 46	24 cm	8435025906679	9775524	43 cm	8435025906785	9775493

LPPR : 7132800 / 64,40€^{TTC}

Prescrire : Botimed® Air Basse ou Botimed® Air Haute - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

BOTTE DE MARCHE

Botimed® Articulée Haute

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (fracture distale du tibia ou du péroné), de la cheville et du pied, Blessure au tendon d'Achille et aux ligaments (entorse de grade II et III), Fasciite plantaire sévère, Autres soins post-chirurgicaux ou post-traumatiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Modèle doté de cadrans articulés réglables et de 2 baleines métalliques latérales adaptables pour une parfaite adaptation morphologique,**
- Chaussure enveloppante matelassée en tissu respirant avec coussinets de protection et protège orteils,
- Semelle profilée antidérapante en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas.

Articulations monocentriques

à système de réglage en flexion et extension de 0° à 45° (graduation de 7,5° en 7,5°)



TAILLE	POINTURE	HAUTEUR	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	≤ 37	36,5 cm	8435025906792	4634061
2	38 - 41	40,5 cm	8435025906808	4634078
3	42 - 45	40,5 cm	8435025906815	4634084

LPPR : 7132800 / **64,40€^{TT}**

Prescrire : Botimed® Articulée Haute - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

6

est le nombre de mois généralement nécessaires à la récupération après une rupture du tendon d'Achille.

Source : IRBMS.
Rupture du tendon d'Achille, Juin 2022.
www.irbms.com/rupture-du-tendon-dachille

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

AUTRES
GAMMES

Chaussure à décharge de l'avant-pied

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et chirurgie de l'avant-pied,
Période post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Renfort rigide sur le talon, idéal pour des problèmes dans la zone du calcanéen,
- Semelle antiglisse,
- Modèle bilatéral.



Système de fixation auto-agrippant avec boucles anti-vrilles.



TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0	33 - 35	8435025912977	6005597
1	36 - 38	8435025912984	6005600
2	39 - 40	8435025912991	6005602
3	41 - 42	8435025913004	6005603
4	43 - 45	8435025913011	6005604

LPPR : 7132839 / **28,05€^{TTC}**

Prescrire : Chaussure à décharge de l'avant-pied - Orliman®

Chaussure de marche Basse

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-chirurgicale du pied, métatarses et des orteils,
Problèmes de retours veineux (œdèmes).

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle antiglisse,
- Système de fixation auto-agrippant permettant l'adaptation aux pieds ayant de grandes difformités ou des bandages,
- Modèle bilatéral.



TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0	33 - 35	8435025923720	6034720
1	36 - 38	8435025923737	6034876
2	39 - 40	8435025923744	6034878
3	41 - 42	8435025923751	6034880
4	43 - 45	8435025923768	6034884

LPPR : 7132839 / **28,05€^{TTC}**

Prescrire : Chaussure de marche Basse - Orliman®

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

Chaussure post-opératoire

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-chirurgicale du pied, des métatarses et des orteils,
Problèmes de retours veineux (œdèmes).

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle semi-rigide intérieure amovible et externe antidérapante (en forme bateau),
- Système de fixation auto-agrippant,
- Matière respirante,
- Modèle bilatéral.



ÉVOLUTIF

Modèle évolutif
(ouvert ou fermé)
grâce à une zone avant amovible.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0	33 - 35	8435025912878	8138956
1	36 - 38	8435025912885	8139105
2	39 - 40	8435025912892	8139186
3	41 - 42	8435025912908	8139246
4	43 - 45	8435025912915	8139252

LPPR : 7132839 / 28,05€^{TTC}

Prescrire : Chaussure post-opératoire - Orliman®

Chaussure pour pied diabétique

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Permettre la mobilité post-opératoire,
Pied diabétique, Ulcère plantaire
et autres infections liées au diabète,
Pathologies du pied nécessitant
une semelle à décharge.


CARACTÉRISTIQUES :

- Épaisseur de la semelle : 18 mm,
- Possibilité de commander la semelle seule.



SPÉCIFIQUE

2 zones distinctes
de décharge

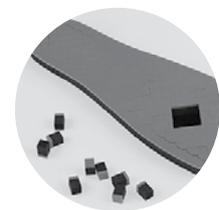

Plots amovibles
et repositionnables



Système de fixation
auto-agrippant

TAILLE	POINTURE	CHAUSSURE AVEC SEMELLE		SEMELLE SEULE	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0	33 - 35	8435025912922	8145399	8435025908567	6000549
1	36 - 38	8435025912939	8145413	8435025910201	6000552
2	39 - 40	8435025912946	8145442	8435025910218	6000555
3	41 - 42	8435025912953	8145459	8435025910225	6000556
4	43 - 45	8435025912960	8145465	8435025910232	6000557

LPPR : 7132839 / 28,05€^{TTC}

Non remboursé

Prescrire : Chaussure pour pied diabétique - Orliman®

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

RELEVEUR DE PIED

Boxia®

CHRONIQUE




INDICATIONS :

Paralysies flaccides, Paralysies traumatiques, Paralysies neurologiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle de maintien autour de la cheville avec rembourrage à base de gel pour plus de confort sur le tendon d'Achille,
- Discret, confortable et souple.

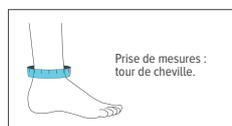

BOXIA®

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0	13 - 17 cm	8435025907058	9848565
1	17 - 21 cm	8435025907140	9848571
2	21 - 25 cm	8435025907157	9848588
3	25 - 29 cm	8435025907164	9848594

LPPR : 7132710 / **76,22€^{TTC}**

Prescrire : Boxia® - Orliman®

RELEVEUR DE PIED

Boxia® Plus

CHRONIQUE




Mise en place
à une main

INDICATIONS :

Paralysies flaccides, Paralysies traumatiques, Paralysies neurologiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Système de fermeture semi-automatique à une main,**
- Sangle de maintien autour de la cheville en tissu micro-perforé respirant, réglable pour s'adapter à la morphologie de chaque patient.

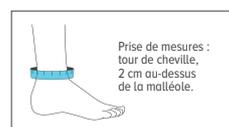

BOXIA® PLUS

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	14 - 20 cm	8435025907171	6225815
2	20 - 26 cm	8435025907331	6225816
3	26 - 32 cm	8435025907348	6225818

LPPR : 7132710 / **76,22€^{TTC}**


Prescrire : Boxia® Plus - Orliman®

ACCESSOIRES INCLUS



Élastique de traction

maintient le pied en position neutre en reliant la sangle de maintien autour de la cheville aux crochets en « S » ou à la languette avec crochet antidérapant.

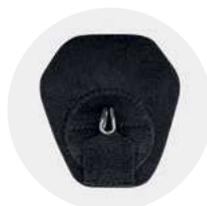

Languette avec crochet antidérapant

à positionner sur la chaussure, avec une sangle qui se fixe aux lacets pour éviter son déplacement.



Crochets en S

pour une fixation dans les œillets des chaussures offrant une plus grande stabilité et un meilleur contrôle varus / valgus.

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

NOUVEAU

Releveur de pied

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Limitation de la flexion dorsale du pied,
Hémiplégie due à des accidents vasculaires cérébraux (AVC),
Séquelles de paralysie flasque, Rétraction du tendon d'Achille,
Lésions du nerf poplité externe sciatique.

CONTRE-INDICATIONS :

Le produit ne doit pas être utilisé chez les patients présentant une déviation en varus ou valgus de l'arrière du pied, ni en cas de paralysie spastique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Prévient tout déséquilibre latéral,
- Repère de découpe sous la semelle pour faciliter l'adaptation du produit,
- Fourni avec un kit de coussins matelassés et un système de fixation.



Système de fermeture aimant
pour une utilisation facile à une main.

Structure dotée de particules de graphène
pour un produit plus léger.

Maintient le pied à angle droit

TAILLE	POINTURE	HAUTEUR	GAUCHE		DROIT	
			CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	35 - 37	29 cm	8435025948518	6408507	8435025948471	6408502
2	38 - 40	32 cm	8435025948525	6408508	8435025948488	6408503
3	41 - 43	34 cm	8435025948648	6408509	8435025948495	6408504
4	44 - 46	37 cm	8435025948716	6408510	8435025948501	6408505

LPPR : 7132710 / 76,22€^{TTC}

Prescrire : Releveur de pied - Orliman®



TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

AUTRES
GAMMES



AUTRES
GAMMES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS



GAMME PÉDIATRIQUE

Une gamme spécialement conçue pour la morphologie des plus petits, de 4 à 14 ans. Des attelles pour immobiliser mais surtout pour bouger !

COLLIER CERVICAL

Collier C1 Souple

INDICATIONS :

Torticolis,
Réadaptation après port d'un collier C2.



TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	5 cm	8435025933750	6034526
Enfant	29 - 34 cm	6,5 cm	8435025933767	6034527

LPPR : 7132704 / **9,25€^{TTC}**

Prescrire : Collier C1 - Orliman®



COLLIER CERVICAL

Collier C2 Semi-rigide

INDICATIONS :

Entorse bénigne,
Torticolis,
Névralgie cervico-brachiale.



TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	5 cm	8435025933934	6034502
Enfant	29 - 34 cm	6,5 cm	8435025933941	6034503

LPPR : 7132733 / **13,10€^{TTC}**

Prescrire : Collier C2 - Orliman®



tour de cou
+ hauteur de cou

ATTELLE DE POUCE

Neo Rhizo Confort®

INDICATIONS :


Entorse de la métacarpophalangienne (MCP),
Lésion articulaire et ligamentaire du pouce.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0	< 14 cm	8435025929777	6018535

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**

Prescrire : Neo Rhizo Confort® - Orliman®

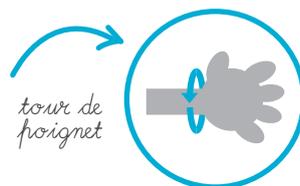

tour de poignet



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

ATELLE DE POIGNET

Confort Plus® Poignet**INDICATIONS :**

Traumatisme du poignet,
Entorse,
Contusion,
Immobilisation post-opératoire.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	< 10 cm	8435025930803	6032982	8435025930728	6032973
Enfant	10 - 12 cm	8435025930797	6032980	8435025930711	6032972

LPPR : 7132822 / **41,64€^{TTC}**

Prescrire : Confort Plus® Poignet - Orliman®



ATELLE DE POIGNET - POUCE

Confort Plus® Poignet-pouce**INDICATIONS :**

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce,
Blessure du scaphoïde.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Enfant	10 - 12 cm	8435025932395	6033034	8435025932340	6033026

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**

Prescrire : Confort Plus® Poignet-pouce - Orliman®

Bandage d'immobilisation d'épaule

INDICATIONS :

Immobilisation post-opératoire et après traumatisme (entorse et luxation) de l'épaule et du coude.



TAILLE	TOUR DE POITRINE + BRAS	LISERÉ	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	< 65 cm	Rouge	8435025924031	4529594
Enfant	65 - 90 cm	Bleu	8435025924048	4529602

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TTC}

Prescrire : Bandage d'immobilisation d'épaule - Orliman®



Anneaux claviculaires

INDICATIONS :


Luxation de l'articulation acromio-claviculaire, Fracture ou traumatisme de la clavicule avec ou sans déplacement.



TAILLE	CARRURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	< 24 cm	8435025924314	4871476
Enfant	25 - 30 cm	8435025924321	4871482

Non remboursé

Prescrire : Anneaux claviculaires - Orliman®

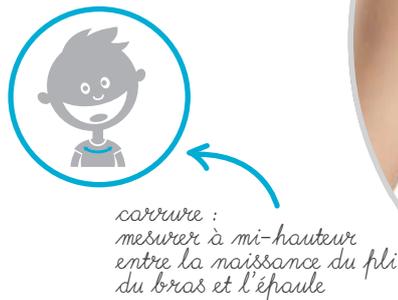

GENOUILLÈRE

Rotulig®**INDICATIONS :**

Lésion rotulienne,
Instabilité modérée des ligaments
latéraux LLI et LLE.



TAILLE	TOUR DE GENOU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Enfant	24 - 29 cm	8435025925557	9799430

LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / **24,46€^{TT}**

Prescrire : Rotulig® - Orliman®



tour de genou



ATTELLE DE GENOU

3 Pans**INDICATIONS :**

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Lésion partielle ou déchirure ligamentaire,
Post-opératoire.



TAILLE	TAILLE DE L'ENFANT	HAUTEUR	TOUR DE CUISSE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	< 110 cm	25 cm	28 - 36 cm	8435025928992	6034697
Enfant	110 - 140 cm	40 cm	33 - 39 cm	8435025929005	6034698

LPPR : 7132727 / **57,23€^{TT}**

Prescrire : 3 Pans - Orliman®



taille de l'enfant

tour de cuisse
(15 cm au-dessus
de la rotule)

ATTELLE DE GENOU AÉRÉE

Genu'R® / Genu'R® 20°**INDICATIONS :**

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Lésion partielle ou déchirure ligamentaire,
Post-opératoire.




HAUTEUR 40 cm (individu < 150 cm)

TAILLE	TOUR DE CUISSE	Genu'R®		Genu'R® 20°	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique / Enfant	35 - 43 cm	8435025928688	8150851	8435025929333	6219384

LPPR : 7132727 / **57,23€^{TT}**

Prescrire : Genu'R® ou Genu'R® 20° - Orliman®

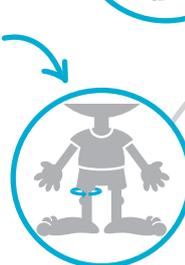Éclisses
préformées à 20°
sur le modèle
Genu'R® 20°

ATTELLE DE CHEVILLE

Memoforme®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente,
Entorse tibio-tarsienne grave,
Laxité chronique de la cheville.




TAILLE	TAILLE DE L'ENFANT	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Petit	120 - 160 cm	8435025902909	6032965

LPPR : 7132667 / **27,44€ ^{TTC}**

Prescrire : Memoforme® - Orliman®



taille de l'enfant

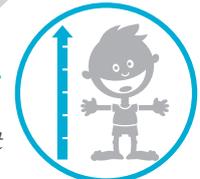

ATTELLE DE CHEVILLE

Memostab®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse récente,
Entorse tibio-tarsienne grave,
Laxité chronique.



TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0	30 - 35	8435025902398	6005167

LPPR : 7132667 / **27,44€ ^{TTC}**

Prescrire : Memostab® - Orliman®



BOTTE DE MARCHÉ

Botimed® Pédiatrique

INDICATIONS :

Traumatisme et suite d'intervention chirurgicale,
Entorse et lésion ligamenteuse,
Remplacement de plâtre.



TAILLE	POINTURE	MESURE DU PIED	HAUTEUR	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Pédiatrique	21 - 27	14 - 18 cm	25 cm	8435025906464	8275937
Enfant	24 - 33	16 - 21 cm	30 cm	8435025906471	8275943

LPPR : 7132800 / **64,40€ ^{TTC}**

Prescrire : Botimed® Pédiatrique - Orliman®



TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

AUTRES
GAMMES



AUTRES
GAMMES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS

GAMME MATERNITÉ

Soucieux du bien-être des patientes, **Orliman®** a développé une gamme de solutions orthopédiques répondant aux problématiques des futures mamans.

Modifications hormonales et morphologiques, prise de poids, augmentation de la rétention des liquides... Bien que la grossesse ne soit pas une maladie, cet état inédit mérite une attention particulière.

Orliman® Maternity est née de cette volonté de mettre notre savoir-faire au service des futures mamans, afin de les accompagner face aux maux du quotidien durant cette nouvelle aventure.



*Pour des mamans heureuses !

BANDE PELVIENNE

Monaë light®

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie, les douleurs de la symphyse pubienne (pubalgies), les douleurs pelviennes et/ou sacro-iliaques, Protège le périnée, Prévient et soulage les douleurs sciatiques.

Après l'accouchement : Soulage les douleurs de la symphyse pubienne, Soutient le plancher pelvien, Permet une action complémentaire aux séances de rééducation périnéale (utilisable lors des activités quotidiennes et/ou en position debout prolongée).

CARACTÉRISTIQUES :

- Bande pelvienne avec système de sangle principale + 2 sangles latérales réglables offrant une contention ferme mais ajustable, sans risque de compression superflue,
- Bande antiglisse pour un bon maintien en position durant les activités quotidiennes.

Pads de massage amovibles
limitant la pression au niveau du coccyx.



Sangles latérales

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025938755	6211590

Non remboursé

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Monaë light® - Orliman® Maternity

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Ninaë casual® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie et les douleurs pelviennes, Réduit l'inconfort postural durant l'activité, Atténue l'effet de pesanteur exercé sur le ventre en position debout.

Après l'accouchement : Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits).

CARACTÉRISTIQUES :

Conception en 2 parties amovibles pour un soutien lombaire optimal et un transfert du poids du bébé sur les hanches, sans pression sur le ventre :

- Bandeau lombaire avec 2 sangles de rappel postural dédoublées pour un ajustement personnalisé du serrage, 4 baleines souples disposées en éventail qui s'adapteront à la cambrure du dos et un tissage aéré pour plus de confort.
- Partie avant universelle, ajustable selon l'évolution de la grossesse (ligne dégagée à l'aîne), tissage extensible au niveau du pubis pour éviter toute pression superflue sur la vessie.



Partie avant amovible et évolutive
avec ligne dégagée à l'aîne.

Rappel postural ajustable

TAILLE	HAUTEUR 21 cm		HAUTEUR 26 cm	
	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025937895	6211573	8435025938496	6211574
LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}		

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Ninaë casual® - Orliman® Maternity

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE MODULABLE

Ninaë evolution® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOCHEMENT

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie et les douleurs pelviennes, Réduit l'inconfort postural durant l'activité, Atténue l'effet de pesanteur exercé sur le ventre en position debout.

Après l'accouchement : Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits).

CARACTÉRISTIQUES :

- Bandeau lombaire avec 2 sangles de rappel postural dédoublées pour un ajustement personnalisé du serrage, 4 baleines souples disposées en éventail qui s'adapteront à la cambrure du dos et un tissage aéré pour plus de confort,
- **Bandeau intermédiaire souple avec pads de massage exerçant une pression douce sur les zones douloureuses dans le bas du dos,**
- Partie avant universelle, ajustable selon l'évolution de la grossesse, ligne dégagée à l'aîne, tissage extensible au niveau du pubis pour éviter toute pression superflue sur la vessie.



Partie avant amovible et évolutive
avec ligne dégagée à l'aîne.

Bandeau souple avec pads de massage

Rappel postural ajustable

1 2 3 Switchsystem®

Design **Switchsystem™** offrant plusieurs choix de combinaisons, un soutien lombaire optimal en toutes situations et un transfert du poids du bébé sur les hanches, sans pression sur le ventre.



1 Un moment de repos dans le canapé ?

La bande de massage, plus souple, exerce une pression douce sur les zones douloureuses.



2 Un peu de bricolage dans la chambre de bébé ?

La bande de massage + la sangle de rappel apportent un soutien musculaire plus ferme lors d'efforts légers et un soulagement des zones douloureuses.



3 Une séance de shopping entre copines ?

La sangle de rappel soulage sans encombrer afin de maintenir une mobilité optimale dans les meilleures conditions.

HAUTEUR 21 cm

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	HAUTEUR 21 cm		HAUTEUR 26 cm	
	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025938502	6211582	8435025938519	6211584
LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}		

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Ninaë evolution® - Orliman® Maternity

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINAL

Monaë activ[®] 22 cm

CHRONIQUE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits), Soulage la lombalgie, Soutient les muscles abdominaux lors de l'effort, Permet une action complémentaire aux séances de rééducation périnéale.

CARACTÉRISTIQUES :

- Plastron abdominal double accroche + zone de fixation étendue offrant un serrage toujours optimal, adapté selon l'évolution de la morphologie de la patiente,
- Tissu élastique aéré en partie arrière pour une contention homogène et plus de confort.



HAUTEUR 22 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	80 - 95 cm	8435025937864	6211575
2	95 - 110 cm	8435025937871	6211576
3	110 - 130 cm	8435025937888	6211578

LPPR : 201E00.031 / 57,54€^{TTC}



Prescrire : Monaë activ[®] - Orliman[®] Maternity

COLLANT DE MATERNITÉ

Lilaë move[®]

CHRONIQUE

GROSSESSE

INDICATIONS :

Soulage la sensation de jambes lourdes et fatiguées avec douleur légère ou gonflement, Problèmes de varices légères ou d'araignées vasculaires, Prévention des pathologies veineuses.

CARACTÉRISTIQUES :

- Compression préventive : 15 à 21 mmHg,
- Collant intégral recouvrant la totalité du ventre pour éviter toute gêne à mi-ventre,
- Densité adaptée en partie haute pour éviter les risques de compression du ventre.




● NOIR

● CHAIR

TAILLE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1 - S	19 - 20	29 - 36	28 - 35	39 - 53	46 - 56	8435025923980	6211591	8435025923935	6211585
2 - M	20 - 22	32 - 40	30 - 38	41 - 56	49 - 60	8435025923997	6211592	8435025923942	6211586
3 - L	22 - 25	34 - 43	33 - 41	45 - 60	56 - 67	8435025924000	6211593	8435025923959	6211587
4 - XL	25 - 27	37 - 45	35 - 44	46 - 62	62 - 74	8435025924017	6211594	8435025923966	6211588
5 - XXL	27 - 31	39 - 48	37 - 47	47 - 64	65 - 78	8435025924024	6211595	8435025923973	6211589

Non remboursé

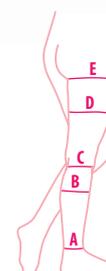

Prescrire : Lilaë move[®] - Orliman[®] Maternity

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

TALONNETTES DE PROTECTION

Lilaë protect®

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Soulage les douleurs liées à la talalgie, la bursite et la tendinite achilléenne, Soulage les douleurs articulaires, Diminue la pression exercée sur le talon.

CARACTÉRISTIQUES :

- Densité d'amorti adaptée permettant de soulager les points d'appuis douloureux sous le talon et de réduire les sollicitations sur les articulations des membres inférieurs,
- Silicone lavable très simplement sous un filet d'eau tiède (ne contient pas de latex),
- Rebord de calage pour une stabilité optimale à l'arrière du pied.



TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	35 - 38	8435025912854	6214932
2	39 - 42	8435025912861	6214933

Non remboursé

Prescrire : Lilaë protect® - Orliman® Maternity

SEMELLES DE CONFORT

Lilaë soft®

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Soulage les douleurs liées à la métatarsalgie, la talalgie et la tendinopathie, Diminue la pression exercée sur les points d'appuis, Soulage les pieds douloureux ou fatigués, Limite l'affaissement de la voûte plantaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design ultra-fin pour une mise en place facile et un confort idéal dans tous types de chaussures,
- Densité double zone avec un amorti accru au niveau des points d'appuis (talon / métatarses),
- Renfort plantaire préformé limitant l'affaissement de la voûte plantaire, favorisant le bon calage et la stabilité du pied dans la chaussure et ainsi l'équilibre dynamique général de la patiente,
- Surfaçage en textile respirant pour plus de confort et d'hygiène.



TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	36 - 38	8435025912663	6211579
2	38 - 40	8435025912670	6211580
3	40 - 42	8435025912847	6211581

Non remboursé

Prescrire : Lilaë soft® - Orliman® Maternity

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES



AUTRES
GAMMES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS



GAMME ONE PLUS

Orliman® s'attache depuis toujours à mettre au point des attelles pour les patients qui présentent des besoins spécifiques.


Nous sommes donc parfaitement conscients des problématiques orthopédiques propres aux personnes dont l'appareil locomoteur doit supporter un plus grand poids, ou dont les grandes tailles nécessitent des solutions adaptées.

Orliman® One Plus est née de la nécessité d'offrir un produit adapté aux patients nécessitant un traitement particulier lié à des caractéristiques physiques et morphologiques atypiques.

La gamme dédiée aux morphologies spécifiques

Des recherches approfondies réalisées par notre équipe R&D ont mené au développement de cette gamme d'attelles très innovantes et plus résistantes, qui permettent une adaptation complète à la morphologie des patients grâce à ses découpes ergonomiques.

La gamme **Orliman® One Plus** se distingue par un choix exigeant et adapté des matériaux, en fonction des besoins anatomiques de chaque attelle. L'association d'éléments rigides dans tous nos produits offre une haute résistance aux chocs mécaniques. Les assemblages sont optimisés pour un effet «sans couture» intérieur et garantissent un port confortable. Les découpes ergonomiques, parfaitement pensées pour les morphologies spécifiques, renforcent cette sensation de confort.

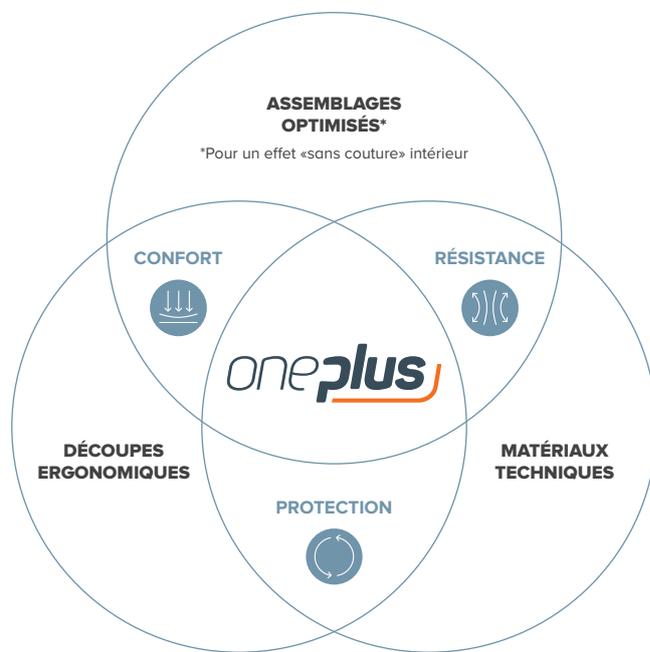

oneplus COLLIER CERVICAL SEMI-RIGIDE

Collier C2

TRAUMATIQUE
CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme léger des parties osseuses (apophyse épineuse et transverse) et molles (coup du lapin), Soins post-opératoires, Torticolis, Cervicalgie, Cervicobrachialgie, Syndrome de compression, Affections rhumatismales et/ou dégénératives.

CARACTÉRISTIQUES :

- Découpe anatomique améliorant le maintien vertical et limitant le mouvement de rotation de la tête pour une bonne repose au niveau des maxillaires et du larynx,
- Renfort plastique inamovible pour assurer un port stable,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Densité de mousse 50 kg/m³.



Bords arrondis améliorant le confort.

Fixation auto-agrippante au design premium pour faciliter la mise en place.



TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 6,5 cm		HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	50 - 53 cm	8435025935556	6323259	8435025935587	6323270	8435025935617	6323273	8435025934474	6323274
2	53 - 56 cm	8435025935563	6323268	8435025935594	6323271	8435025935624	6323278	8435025934481	6323275
3	56 - 59 cm	8435025935570	6323269	8435025935600	6323272	8435025935631	6323279	8435025934757	6323277

LPPR : 7132733 / 13,10€^{TTC}

Prescrire : Collier C2 One Plus - Orliman®

Ceinture de soutien lombaire 32 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Lombalgie et sciatique, Hernie discale, Spondylolyse et spondylarthrite / arthrose, Tension ou déchirure des muscles ou des ligaments qui soutiennent les vertèbres lombaires,
 Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :


- Système de 4 sangles semi-rigides et réglables dont 2 avec système de fermeture éclair,
- 3 renforts semi-rigides pour un maintien accru de la zone abdominale,
- Système de fixation auto-agrippant,
- Hauteur dorsale : 32 cm,
 Hauteur du plastron : 32 cm.



Double bande de rappel postural en tissu élastique avec système de passe-main.

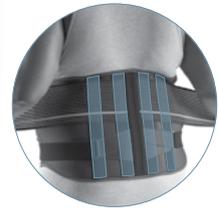

4 baleines dorsales en acier galvanisé.

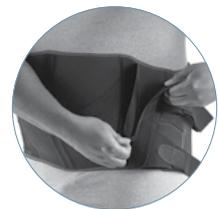


Fermeture éclair antéro-latérale facilitant le positionnement et le réglage de la ceinture.

HAUTEUR 32 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	132 - 142 cm	8435025936614	6037713
2	142 - 152 cm	8435025936621	6037715
3	152 - 162 cm	8435025936638	6037767
4	162 - 172 cm	8435025936645	6037770

LPPR : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**

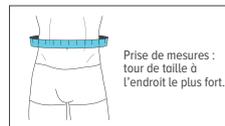

Prescrire : Ceinture de soutien lombaire One Plus - Orliman®

Ceinture de soutien abdominal 29 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Contention d'hernies ventrales petites ou moyennes, Hypotonie abdominale, Traitement post-opératoire, Prophylaxie dans les professions ou les sports qui sollicitent excessivement la colonne lombo-sacrée,
 Lombalgie, Amélioration de la posture.

CARACTÉRISTIQUES :


- 2 baleines dorsales amovibles en acier galvanisé,
- 2 renforts souples sur la zone abdominale,
- Système de fermeture par bande auto-agrippante avec un système de passe-doigt,
- Hauteur dorsale : 29 cm,
 Hauteur du plastron : 32 cm,
- Contient du latex.



Découpe anatomique au-dessus des cuisses pour un confort optimal.

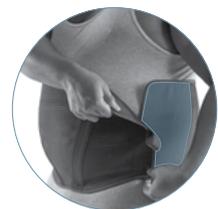

Large zone de tissu auto-agrippant pour une adaptation morphologique optimale.

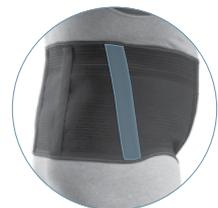


Renforts latéraux semi-rigides pour une meilleure contention des tissus mous.

HAUTEUR 29 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	130 - 140 cm	8435025937826	6036089
2	140 - 150 cm	8435025937833	6036090
3	150 - 161 cm	8435025937840	6036091
4	161 - 172 cm	8435025937857	6036092

LPPR : 201E00.032 + 3x201E03.01 / **82,68€^{TTC}**

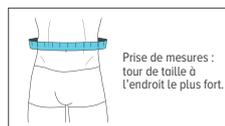

Prescrire : Ceinture de soutien abdominal One Plus - Orliman®

Attelle de poignet

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Entorse, Tendinite, Arthrose et arthrite, Syndrome du canal carpien, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Éclisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales souples,
- Boucles anti-vrilles.

Tissu élastique
sur la partie dorsale
pour faciliter la pose.

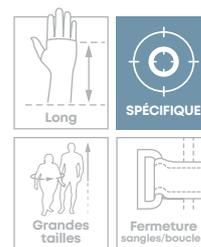

Attaches auto-agrippantes
grande taille
et découpables.

GAUCHE				DROIT	
TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435025930919	6036046	8435025930889	6036042
2	21 - 23 cm	8435025930926	6036047	8435025930896	6036043
3	23 - 25 cm	8435025930933	6036048	8435025930902	6036044

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}



Prescrire : Attelle de poignet One Plus - Orliman®

Attelle de poignet-pouce

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Entorse, Tendinite, Arthrose (y compris rhizarthrose) et arthrite, Syndrome du canal carpien, Syndrome de De Quervain, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Éclisse latérale préformée, modelable et amovible,
- 1 Éclisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales souples,
- Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables,
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose,
- Boucles anti-vrilles.

Sangle de pouce
pour un ajustement optimal.

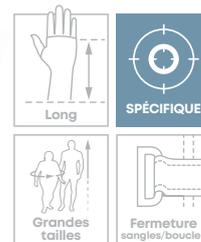

Coussinet de protection
interne dans la zone du pouce
améliorant le confort durant
l'immobilisation.

GAUCHE				DROIT	
TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435025932449	6036052	8435025932418	6036049
2	21 - 23 cm	8435025932456	6036053	8435025932425	6036330
3	23 - 25 cm	8435025932463	6036088	8435025932432	6036050

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}



Prescrire : Attelle de poignet-pouce One Plus - Orliman®

Attelle de pouce

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE



INDICATIONS :

Entorse (ex. : pouce du skieur),
Rhizarthrose et arthrite carpo-métacarpienne du pouce,
Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse latérale modelable au niveau de la colonne du pouce,
- Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables,
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose,
- Boucles anti-vrilles.

Sangle de pouce pour un ajustement optimal.

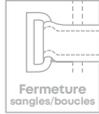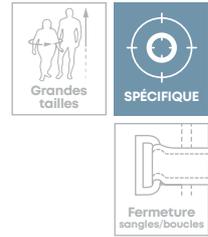

Coussinet de protection interne dans la zone du pouce améliorant le confort durant l'immobilisation.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435025929821	6036038	8435025929791	6036035
2	21 - 23 cm	8435025929838	6036040	8435025929807	6036036
3	23 - 25 cm	8435025929845	6036041	8435025929814	6036037

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}



Prise de mesures :
tour de poignet.

Prescrire : Attelle de pouce One Plus - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

47,3%

des Français sont en surpoids et 17% souffrent d'obésité.

Source : Étude INSERM, 2023.

Genouillère ligamentaire articulée

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Arthrose et arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Traitement post-opératoire et post-traumatique, Instabilités latérales du genou, de type varus ou valgus (en utilisant les articulations polycentriques rigides).

CARACTÉRISTIQUES :

- Genouillère enveloppante à fermeture postérieure,
- 4 sangles amovibles et découpables (hautes et basses),
- 2 cadrans articulés polycentriques crantés et amovibles en aluminium,
- 2 doubles ressorts spiraliium amovibles.



Matériau élastique dans la zone poplitée pour faciliter l'adaptation au genou.

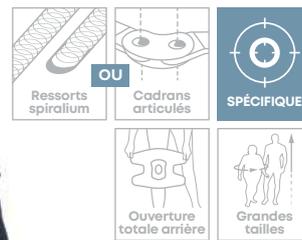


Tissu élastique au niveau de la rotule pour éviter les déplacements et les œdèmes causés par un effet de striction.



2 bandes antiglisse internes (points de silicone) dans les parties, inférieure et supérieure, de l'attelle pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	49 - 58 cm	8435025926486	6036093
2	58 - 69 cm	8435025926493	6036094
3	69 - 82 cm	8435025926509	6036095

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

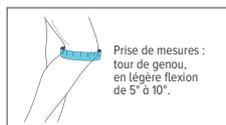

Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée One Plus - Orliman®

Genouillère ligamentaire articulée réglable

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Arthrose et arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Instabilités latérales du genou de type varus ou valgus, Pathologies pour lesquelles il convient de contrôler l'amplitude articulaire du genou, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 cadrans polycentriques articulés et réglables avec contrôle de la flexion-extension à intervalles de 0°-15°-30°-60°-90°,
- 2 sangles amovibles d'ajustement de la compression.



Fermeture enveloppante en forme de «S» assurant une meilleure adaptation morphologique.




Tissu élastique au niveau de la rotule pour éviter les déplacements et les œdèmes causés par un effet de striction.



2 bandes antiglisse internes (points de silicone) dans les parties, inférieure et supérieure, de l'attelle pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	49 - 55 cm	8435025926516	6036096
2	55 - 62 cm	8435025926523	6036098
3	62 - 71 cm	8435025926530	6036099
4	71 - 82 cm	8435025926547	6036100

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

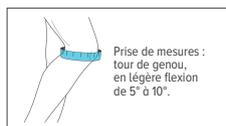

Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée réglable One Plus - Orliman®

Attelle de genou articulée

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Rééducation post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :


- 4 réglages distincts à la cuisse et au mollet,
- Cadran articulé gradué réglable :
Flexion : de 0° à 120°
(par graduations de 10° jusqu'à 30°
et par graduations de 15° jusqu'à 120°),
Extension : de 0° à 90°
(par graduations de 10° jusqu'à 30°
et par graduations de 15° jusqu'à 90°),
Immobilisation totale de 0° à 45°,
- Sangles recoupables avec fixations papillons auto-agrippantes.



2 enveloppes capitonnées découpables pour un ajustement et un confort optimaux.



Fermeture à clips à mémoire de réglage

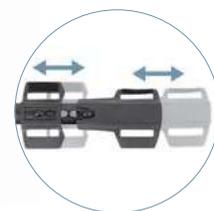

Barres télescopiques en aluminium et clips de friction permettant de régler la hauteur souhaitée.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025929401	6036101
LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}		

Prise de mesures maximales :
Tour de cuisse : 85 cm
Tour de mollet : 65 cm

Prescrire : Attelle de genou articulée One Plus - Orliman®

Attelle de cheville

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Entorse, Laxité ligamentaire,
Instabilité ostéo-articulaire chronique,
Traitement post-opératoire et post-traumatique,
Prévention des séquelles durant la marche.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et évidement dans la zone du talon pour faciliter la mise en place.

Sangle de pronosupination amovible et découpable permettant de restreindre les mouvements de la cheville.

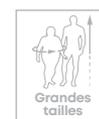


2 plaques médio-latérales en matériau thermoplastique de haute densité, avec différentes finalités en fonction de la phase de récupération : effet correcteur ou stabilisateur.



Tissu élastique dans la zone du tendon d'Achille facilitant l'adaptation au calcanéus.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	23 - 26 cm	8435025903319	6036102
2	26 - 29 cm	8435025903326	6036103
3	29 - 32 cm	8435025903333	6036104
LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}			

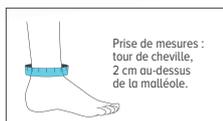

Prescrire : Attelle de cheville One Plus - Orliman®



AUTRES
GAMMES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS



GAMME SPORT

Anatomiques, confortables, résistants et lavables, les produits de la gamme **Orliman® Sport** sont pensés pour tous les sportifs, amateurs comme aguerris.

Nos attelles apportent soutien et maintien et sont fabriquées en tissu élastique et respirant avec coutures plates pour éviter tout frottement gênant.

La gamme orthopédique professionnelle **dédiée aux sportifs**



[ESPACE DÉDIÉ]

SOIN DES SPORTIFS

Nous vous accompagnons dans une démarche catégorielle regroupant des produits liés à la pratique sportive.

Pour plus d'informations, rendez-vous **page 44 !**

SPORT

Épaulière élastique

INDICATIONS : tendinopathie, légère instabilité, inflammation post-traumatique.



Sangle de réglage



Tricot technique



Homme & Femme

TAILLE	TOUR DU BICEPS	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	27 - 32 cm	8435025924413	6222508
M	32 - 38 cm	8435025924420	6222509
L	38 - 44 cm	8435025924437	6222510

Non remboursé



Véritables phénomènes de société, les sports de loisirs ont vu leur pratique évoluer et se diversifier significativement ces dernières années, proposant une offre toujours plus attractive et variée pour un public nouveau, au profil de plus en plus hétérogène.

Très logiquement, on a pu constater une évolution du nombre de pathologies bénignes liées à la pratique d'une activité physique (tendinites, douleurs articulaires, etc.). De plus en plus de patients se tournent vers l'automédication. On remarque alors une demande croissante de dispositifs légers, performants et abordables pouvant soulager rapidement de petites douleurs/gênes ponctuelles mais également rassurer dans le cas de traumatismes passés.

Si cette demande est réelle, elle est en grande partie captée par les magasins de sport généralistes, du fait essentiellement de la méconnaissance d'une telle offre en officine. Force est de constater que pour beaucoup de patients, les dispositifs vendus en pharmacie sont essentiellement destinés aux soins post-traumatiques, ils sont onéreux et uniquement disponibles sur prescription médicale.

L'objectif de la gamme est de vous proposer une sélection de produits performants, « tendance » et abordables pour vous permettre d'améliorer votre champ d'action et votre compétitivité.



SPORT

Coudière élastique



Sangle de réglage



Double densité



Coussinet protecteur



Homme & Femme



INDICATIONS : épicondylite (tennis elbow), épitrochléite (golf elbow), contusion légère, tendinite, processus inflammatoire, instabilité et traumatisme léger.

TAILLE	TOUR DE COUDE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	22 - 26 cm	8435025924529	8145235
M	26 - 30 cm	8435025924536	8145241
L	30 - 34 cm	8435025924543	8145258

Non remboursé



SPORT

Sangle anti-épicondylite



Sangle de réglage



Coussinet silicone



Homme & Femme



INDICATIONS : épicondylite (tennis elbow), épitrochléite (golf elbow), prévention des lésions sportives.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025924451	6041809

Non remboursé

SPORT

Attelle de poignet élastique



Sangle de réglage



Coutures plates



Homme & Femme



INDICATIONS : tendinite, arthrose, arthrite, contusion légère, instabilité et traumatisme léger, processus inflammatoire.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	15 - 18 cm	8435025930148	8145152
M	18 - 21 cm	8435025930155	8145169
L	21 - 24 cm	8435025930162	8143621

Non remboursé



SPORT

Poignet élastique réglable



Sangle de réglage



Coutures plates



Homme & Femme



INDICATIONS : prévention des lésions du poignet, tendinite, ténosynovite bénigne.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025930179	8145146

Non remboursé

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT


FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

SPORT

Genouillère élastique courte

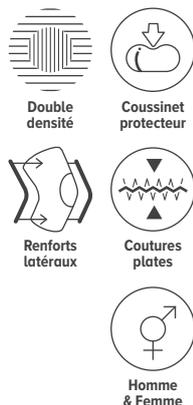

INDICATIONS : arthrite, arthrose, instabilité et traumatisme léger du genou, processus inflammatoire.


TAILLE	TOUR DE GENOU	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	32 - 36 cm	8435025926356	8145293
M	36 - 41 cm	8435025926363	8145301
L	41 - 48 cm	8435025926370	8145318

Non remboursé



SPORT

Sangle infra-patellaire

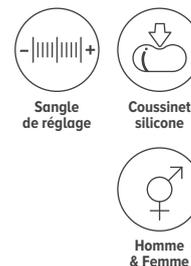


INDICATIONS : traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter chez le jeune sportif, tendinite du tendon rotulien.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025929425	6041811

Non remboursé

SPORT

Cuissard élastique

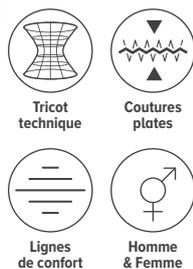

INDICATIONS : prévention des déchirures musculaires des quadriceps, abducteurs, muscles ischio-jambiers et muscles d'approximation.


TAILLE	TOUR DE CUISSE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	45 - 49 cm	8435025929432	8145264
M	49 - 54 cm	8435025929449	8145270
L	54 - 61 cm	8435025929456	8145287

Non remboursé



SPORT

Molletière élastique

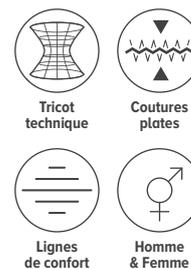

INDICATIONS : pathologies musculaires, protection du tibia.

TAILLE	TOUR DE MOLLET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	27 - 31 cm	8435025929463	8145347
M	31 - 36 cm	8435025929470	8145376
L	36 - 42 cm	8435025929487	8145382

Non remboursé



TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

SPORT

Chevillère élastique



Double densité



Coussinet protecteur



Coutures plates



Homme & Femme

INDICATIONS : instabilité légère de la cheville, épanchements articulaires et inflammations d'origine traumatique et causées par des maladies antérieures, irritation post-opératoire et post-traumatique (après entorses), tendomyopathies.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	17 - 20 cm	8435025903753	8145206
M	20 - 23 cm	8435025903760	8145212
L	23 - 26 cm	8435025903777	8145229

Non remboursé



SPORT

Chevillère élastique réglable



Sangle de réglage



Évidement au talon



Homme & Femme

INDICATIONS : lésions légères, entorses, luxations.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	17 - 20 cm	8435025903784	8145175
M	20 - 23 cm	8435025903791	8145181
L	23 - 26 cm	8435025903883	8145198

Non remboursé



SPORT

Chaussettes de compression



Sans couture



Homme & Femme



Maille aérée



Renfort matelassé

INDICATIONS : amélioration du retour veineux, oxygénation des muscles, des tendons et des ligaments pendant et après l'effort, diminution de la fatigue musculaire et accélération de la récupération.

TAILLE	TOUR DE MOLLET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S/1	30 - 34,5 cm	8435025923850	6041785
M/2	34,5 - 39 cm	8435025923867	6041797
L/3	39 - 43,5 cm	8435025923874	6041798
XL/4	43,5 - 48 cm	8435025923881	6041799

Non remboursé



SPORT

Semelles sportives à décharge



Découpable



Homme & Femme

INDICATIONS : absorption des chocs d'impacts au niveau du talon et diminution de la pression exercée sur les zones d'appui (talon & métatarses), régulation thermique au niveau du pied, réduction des frottements et de la formation de callosités.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	36 - 37	8435025912618	6041803
2	38 - 39	8435025912625	6041805
3	40 - 41	8435025912632	6041806
4	42 - 43	8435025912649	6041807
5	44 - 45	8435025912656	6041808

Non remboursé

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES



AUTRES
GAMMES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS



GAMME SKINTAPE®

Inspirés de la méthodologie du taping, les produits de la gamme Skintape® sont dotés de bandes de silicone intégrées, issues d'une formule unique POWER-BAND™. Ils apporteront à vos patients un soutien mécanique fonctionnel pour stabiliser l'articulation, un accompagnement musculaire lors des mouvements et une réduction des vibrations musculaires lors de la pratique sportive.

La gamme innovante et tendance **dédiée aux sportifs**

Dotés de **bandes de silicone intégrées** issues de la formule unique POWER-BAND™ (élastique, antidérapant, respirant et lavable) et d'un design anatomique, les produits agissent sur les ligaments, tendons et/ou muscles.

AU NIVEAU ARTICULAIRE

Les bandes guident et soutiennent les ligaments et/ou les tendons afin de limiter les sollicitations et sécuriser l'articulation tout en lui laissant de la mobilité et de la flexibilité. Soutenue, celle-ci pourra ainsi travailler de manière équilibrée.

AU NIVEAU MUSCULAIRE

La position et la direction des bandes ont été spécialement étudiées pour réduire les points douloureux et les oscillations musculaires lors de l'exercice (durant la course à pied ou lors des phases de réception de sauts).

L'alliance de deux tissus élastiques, fins, légers, doux et absorbants apporte aux produits SKINTAPE® un effet compressif agréable et confortable, même en cas de port prolongé.

Bien qu'ils soient souvent préconisés pour des actions de soins en cas de blessure, les produits de compression sont tout aussi recommandés dans un cadre préventif pour limiter de manière efficace les sollicitations excessives sur un muscle douloureux, fragile, ou déjà lésé par le passé, diminuant le risque de microlésions post-exercice.

Ils constituent de fait une sécurité psychologique non négligeable en cas de retour de blessure, pour une pratique sportive sereine et totalement libérée. **Les muscles moins sollicités pourront entrer plus rapidement en phase de régénération et de récupération.**

[ESPACE DÉDIÉ]


SOIN DES SPORTIFS

Nous vous accompagnons dans une démarche catégorielle regroupant des produits liés à la pratique sportive.

Pour plus d'informations, rendez-vous **page 44 !**

Le port des produits SKINTAPE® stimule le système proprioceptif lors de la pratique sportive et répond à l'accompagnement physiologique, quelle que soit l'activité pratiquée.

Coudière SKINTAPE®

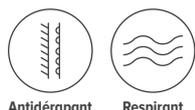


INDICATIONS : Soutien et protection pour les activités sportives et professionnelles, Épicondylite, Épitrôchléite, État inflammatoire, Arthrose légère, Tendinite et contusion légères.

TAILLE	TOUR DE COUDE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S/1	23 - 26 cm	8435025924772	6297252
M/2	26 - 29 cm	8435025924789	6297253
L/3	29 - 32 cm	8435025924796	6297255
XL/4	32 - 35 cm	8435025924802	6297256

Non remboursé



Attelle de Poignet-Pouce SKINTAPE®

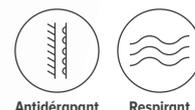


INDICATIONS : Soutien et protection pour les activités sportives et professionnelles, Soutien et compression après blessure mineure, Arthrose légère, Entorse, État inflammatoire chronique.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S/1	14 - 16 cm	8435025931220	6297264
M/2	16 - 18 cm	8435025931558	6297265
L/3	18 - 21 cm	8435025931565	6297266

Non remboursé



Cuissard SKI'tape®

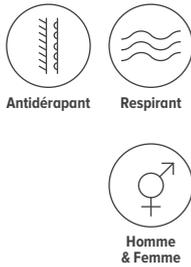


INDICATIONS : Soutien et protection pour les activités sportives et professionnelles, Prévention des déchirures et tensions musculaires, Évite la surcharge musculaire dans les quadriceps, les ischio-jambiers et les abducteurs, Rupture fibrillaire du quadriceps, Foulure musculaire, Post-traumatique.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S/1	42 - 46 cm	8435025929661	6297240
M/2	46 - 50 cm	8435025929678	6297241
L/3	50 - 54 cm	8435025929685	6297242
XL/4	54 - 58 cm	8435025929692	6297243
XXL/5	58 - 62 cm	8435025929708	6297244

Non remboursé



Genouillère SKI'tape®

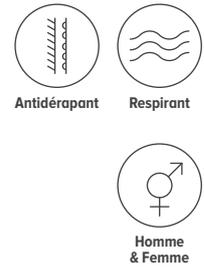

INDICATIONS : Soutien et protection pour les activités sportives et professionnelles, Arthrite et arthrose, Processus inflammatoire, Légère ecchymose, Traumatisme léger et instabilité, Épanchement et inflammation articulaires, État inflammatoire post-opératoire.


TAILLE	TOUR DE CUISSE*	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S/1	39 - 43 cm	8435025928442	6297245
M/2	43 - 47 cm	8435025928459	6297246
L/3	47 - 51 cm	8435025928466	6297247
XL/4	51 - 55 cm	8435025928473	6297249
XXL/5	55 - 59 cm	8435025928480	6297250

Non remboursé

*14 cm au-dessus de la rotule.



Molletière SKI'tape®

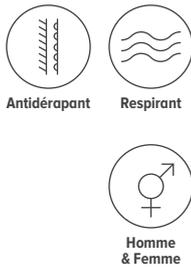


INDICATIONS : Soutien et protection pour les activités sportives et professionnelles, Trouble musculaire, Soutien et compression après une blessure musculaire, Déchirure fibrillaire, Tension musculaire, Post-traumatisme.

TAILLE	TOUR DE MOLLET	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S/1	30 - 34 cm	8435025929494	6297235
M/2	34 - 38 cm	8435025929500	6297236
L/3	38 - 42 cm	8435025929517	6297237
XL/4	42 - 46 cm	8435025929647	6297238
XXL/5	46 - 50 cm	8435025929654	6297239

Non remboursé



Chevillère SKI'tape®

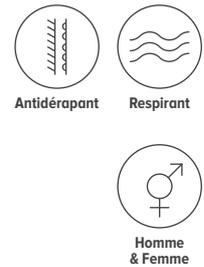

INDICATIONS : Soutien et protection pour les activités sportives et professionnelles, Légère blessure et instabilité, Soutien de l'articulation, Arthrite et arthrose, Faiblesse ligamentaire.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE*	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	
Droite	S/1	17 - 21 cm	8435025904866	6297257
	M/2	21 - 25 cm	8435025904873	6297258
	L/3	25 - 29 cm	8435025904880	6297259
Gauche	S/1	17 - 21 cm	8435025904897	6297263
	M/2	21 - 25 cm	8435025904903	6297262
	L/3	25 - 29 cm	8435025904996	6297261

Non remboursé

*2 cm au-dessus de la malléole.





AUTRES
GAMMES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS



GAMME PODOLOGIE



COLLECTION **CORRECTEURS**

CORRIGER & PROTÉGER

Pour corriger l'axe de l'articulation afin de ralentir le processus de déformation de l'Hallux Valgus **176**



COLLECTION **COUSSINETS**

AMORTIR & SOULAGER

Pour amortir les surcharges du pied grâce aux coussinets en gel à placer dans la chaussure **178**



COLLECTION **PROTECTEURS**

PRÉVENIR, PROTÉGER, SOULAGER...

Pour protéger les orteils et « l'oignon » des pressions et frottements exercés contre la chaussure **179**



COLLECTION **SEMELLES**

SOUTENIR & SOULAGER

Pour redistribuer les forces de charges sur le pied et réduire la pression sur les zones d'appuis **182**



COLLECTION **TALONNETTES**

SOUTENIR & SOULAGER

Pour absorber les chocs sous le talon et réduire les tensions exercées sur le tendon **185**



COLLECTION **CHAUSSETTES**

PRÉVENIR, PROTÉGER, STIMULER...

De compression ou pour pieds diabétiques, elles protègent notamment le pied contre les frottements douloureux des chaussures **186**

Correcteur nocturne Hallux Valgus

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Traitement d'Hallux Valgus, Thérapie conservatrice et post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle de pression ajustable permettant un réglage de l'axe de correction,
- Coussin amortisseur offrant un confort optimal.

TAILLE	POINTURE	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	34 - 36	8435025912175	6005001	8435025912144	6004997
M	37 - 40	8435025912182	6005002	8435025912151	6004995
L	41 - 46	8435025912199	6005000	8435025912168	6004998

LPPR : 7132673 / **12,13€ ^{TTC}**

Prescrire : Correcteur nocturne Hallux Valgus - Orliman® FeetPAD



Écarteur & Protecteur Hallux Valgus

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Protège et soulage les oignons douloureux, Réalignement de l'articulation, Amortit les pressions.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs,
- Modèle bilatéral.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025908550	6117298

Non remboursé

Prescrire : Écarteur & Protecteur Hallux Valgus - Orliman® FeetPAD



Écarteur de doigts Hallux Valgus

2 UNITÉS

INDICATIONS :

Réduit les frictions, Réalignement de l'articulation, Évite les Hallux Valgus.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	35 - 38	8435025907867	6117246
M	39 - 42	8435025907850	6117252
L	43 - 46	8435025907843	6117269

Non remboursé

Prescrire : Écarteur de doigts Hallux Valgus - Orliman® FeetPAD



Coussinet Gel Talon

LA PAIRE

INDICATIONS :

Soulage la douleur et absorbe les chocs sous le talon,
Évite les frottements et la formation de callosités.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025908543	2945408

Non remboursé

Prescrire : Coussinet Gel Talon - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

Coussinet Gel Métatarses

LA PAIRE

INDICATIONS :

Soulage la douleur de la zone métatarsienne et de l'avant du pied,
Évite la formation de callosités et durillons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025912205	2945377

Non remboursé

Prescrire : Coussinet Gel Métatarses - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

Coussinet Gel Orteils

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Soulage les douleurs de l'avant-pied et les orteils
en forme de griffe ou marteau.

CARACTÉRISTIQUES :

- Petit coussinet sous-diaphysaire en gel polymère viscoélastique
avec anneau de fixation au 2° orteil.

TAILLE	POINTURE	GAUCHE		DROIT	
		CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	35 - 38	8435025908451	2945503	8435025908369	2945443
M	39 - 42	8435025908444	2945526	8435025908352	2945489
L	43 - 46	8435025908437	2945549	8435025908345	2945495

Non remboursé

Prescrire : Coussinet Gel Orteils - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

COLLECTION **PROTECTEURS**

Protecteur Hallux Valgus et Cors

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Protège et soulage les oignons douloureux et sensibles.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absorbe et répartit les pressions sur l'Hallux Valgus grâce à son gel polymère,
- Ne glisse pas,
- Modèle bilatéral.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	< 41	8435025907881	6116347
2	≥ 41	8435025907874	6116353

Non remboursé

Prescrire : Protecteur Hallux Valgus et Cors - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

COLLECTION **PROTECTEURS**

Protection Plantaire Métatarses

LA PAIRE

INDICATIONS :

Protège et soulage la zone des métatarses,
Empêche la formation de cors,
Absorbe les chocs et réduit les callosités.

CARACTÉRISTIQUES :

- Mini-bande plantaire en tissu élastique avec coussin en gel polymère.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	< 41	8435025907911	6116198
2	≥ 41	8435025907904	6116212

Non remboursé

Prescrire : Protection Plantaire Métatarses - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

COLLECTION **PROTECTEURS**

Protection plantaire Gel Métatarses

LA PAIRE

INDICATIONS :

Protège la zone des métatarses contre les frottements,
Indiqué pour les métatarsalgies qui nécessitent une décharge importante,
Soulage la sensation de brûlure et la douleur sous les têtes métatarsiennes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère viscoélastique,
- Anneau de fixation au 2^e orteil.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025940673	6345161

Non remboursé

Prescrire : Protection plantaire Gel Métatarses - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Protection Gel Talon

2 UNITÉS

INDICATIONS :

Prévient des pressions et des frottements,
Évite la formation d'ampoules,
Protège les blessures existantes du tendon d'Achille.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025908536	2945437

Non remboursé

Prescrire : Protection Gel Talon - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

Tube protecteur Gel Orteils et doigts

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Atténue la pression et la friction, Protection et hydratation des orteils,
Favorise la cicatrisation, Protège les zones lésées.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère,
- Longueur 15 cm découpable,
- Couleur : ○ Blanc.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	15 mm	8435025908338	2945650
M	20 mm	8435025908321	2945667
L	25 mm	8435025908314	2945673

Non remboursé

Prescrire : Tube protecteur Gel Orteils et doigts - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOUPABLE

Tube protecteur Gel & Tissu Orteils et doigts

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Atténue la pression et la friction,
Protection et hydratation des orteils, Favorise la cicatrisation.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère, Tissu : Polyamide et Élastomère,
- Longueur 15 cm découpable,
- Couleur : ● Chair.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
XS	20 mm	8435025907997	6140245
S	25 mm	8435025907980	6140251
M	30 mm	8435025907966	6140268
L	35 mm	8435025907959	6142238

Non remboursé

Prescrire : Tube protecteur Gel & Tissu Orteils et doigts - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOUPABLE

Doigtier protecteur Orteils et doigts

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Orteil en marteau, Lésion kératosique,
Superposition des orteils, Favorise la cicatrisation.


CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère, Tissu : Polyamide et Élastomère,
- Longueur 8,5 cm découpable.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
S	25 mm	8435025907942	6133647
M	30 mm	8435025907935	6138076
L	35 mm	8435025907928	6138952

Non remboursé

Prescrire : Doigtier protecteur Orteils et doigts - Orliman® FeetPAD

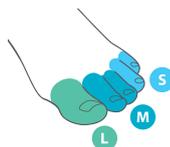

SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOUPABLE

Protecteur Gel Petit orteil

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Réduit la douleur, Protège l'exostose de l'articulation,
Diminue la pression et les frottements causés par la chaussure.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs,
- Modèle bilatéral.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025908529	2945420

Non remboursé

Prescrire : Protecteur Gel Petit orteil - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

LE SAVIEZ-VOUS ?

61%

des Français souffrent des pieds. En effet, les pieds font 5 000 à 6 000 pas par jour et sont donc soumis à rude épreuve !

Source : Union française pour la santé du pied.

Semelles COSY à mémoire de forme

MIXTE

LA PAIRE

INDICATIONS :

Métatarsalgie, Talalgie, Bursite, Fasciite plantaire, Pied diabétique, Pied douloureux ou fatigué.

CARACTÉRISTIQUES :

- Zones de décharge de l'avant-pied et du talon : soulagent les pressions plantaires,
- Mousse à mémoire de forme double densité : épouse l'anatomie du pied,
- Couche inférieure en feutre : respirante pour un port confortable,
- Conception légère et douce : absorbe l'humidité et garde le pied au sec,
- Peuvent remplacer les semelles intérieures d'origine,
- Couleur : ● Bleu marine,
- Épaisseur de la semelle : de 5 à 8 mm.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0	35 - 36	8435025940819	6345172
1	37 - 38	8435025940826	6345173
2	39 - 40	8435025940833	6345174
3	41 - 42	8435025940840	6345175
4	43 - 44	8435025940857	6345176
5	45 - 46	8435025940864	6345178

Non remboursé

Prescrire : Semelles COSY - Orliman® FeetPAD



Ultra confortables, adaptées à la plupart des chaussures.



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Semelles FINES Silicone & tissu

MIXTE

LA PAIRE

INDICATIONS :

Métatarsalgie, Épine calcanéenne, Talalgie, Bursite, Fasciite plantaire, Pied diabétique, Pied fatigué ou douleur post-chirurgicale, Soulage le pied après l'effort (idéal pour le sport).

CARACTÉRISTIQUES :

- Zones de décharges de l'avant-pied et du talon + coussin plantaire : soulagent les pressions plantaires en atténuant les appuis douloureux,
- Système antiglisse sous le talon : ne bougent pas dans les chaussures,
- Doublure tissu : préserve de l'humidité et des odeurs,
- Couleur : ● Gris clair,
- Épaisseur de la semelle : de 3 à 7 mm.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0	35 - 36	8435025940727	6345165
1	37 - 38	8435025940734	6345166
2	39 - 40	8435025940741	6345167
3	41 - 42	8435025940758	6345168
4	43 - 44	8435025940765	6345169
5	45 - 46	8435025940772	6345170

Non remboursé

Prescrire : Semelles FINES - Orliman® FeetPAD



Douces et souples, adaptées à la plupart des chaussures.



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Semelles EXTRA FINES Silicone & tissu

FEMME

LA PAIRE

INDICATIONS :

Soulage la zone de l'avant-pied grâce au coussinet métatarsien,
Soulage la douleur plantaire, Évite la formation de callosités et de cors,
Absorbe les chocs.

CARACTÉRISTIQUES :

- Zone de décharge de l'avant-pied : coussinet métatarsien pour protéger et soulager la zone des métatarses,
- Système antiglisse sous le talon : ne bougent pas dans les chaussures,
- Doublure tissu : préserve de l'humidité et des odeurs,
- Couleur : ● Gris clair,
- Épaisseur de la semelle : de 2,6 à 4,6 mm.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	34 - 36	8435025940789	6345162
2	37 - 39	8435025940796	6345163
3	40 - 42	8435025940802	6345164

Non remboursé

Prescrire : Semelles EXTRA FINES - Orliman® FeetPAD



Fines et souples,
adaptées aux escarpins
et chaussures plates.



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Semelles INVISIBLES Gel

FEMME

LA PAIRE

INDICATIONS :

Absorbe les chocs et la pression,
Apporte un confort de port tout au long de la journée.

CARACTÉRISTIQUES :

- Zones de décharge de l'avant-pied et du talon : soulagent les pressions plantaires,
- Ultra fines et longueur $\frac{3}{4}$: s'adaptent facilement à l'intérieur des chaussures,
- Adhésives et antidérapantes : ne glissent pas dans la chaussure,
- Couleur : ○ Transparent,
- Épaisseur de la semelle : de 1,6 à 2 mm.



Discrètes
et transparentes,
idéales pour les escarpins
et les chaussures ouvertes.



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025940710	6345171

Non remboursé

Prescrire : Semelles INVISIBLES - Orliman® FeetPAD

Semelles Silicone avec inserts

LA PAIRE

INDICATIONS :

Métatarsalgie, Épine calcanéenne, Talalgie, Bursite, Fasciite plantaire, Pied diabétique, Pied fatigué ou douleur post-chirurgicale, Soulage le pied après l'effort (idéal pour le sport).

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires,
- Limite les traumatismes liés aux impacts répétés,
- Épaisseur de la semelle interne : de 3,5 à 6,5 mm.



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
0	35 - 36	8435025907430	6116270
1	37 - 38	8435025907447	6116287
2	39 - 40	8435025907454	6116293
3	41 - 42	8435025907461	6116318
4	43 - 44	8435025907584	6116324
5	45 - 46	8435025907591	6116330

Non remboursé



Prescrire : Semelles Silicone avec inserts - Orliman® FeetPAD

Semelles thermoformables

LA PAIRE

Grâce à leur technologie Bion'tech®, les semelles thermoformables s'adaptent parfaitement à la morphologie du pied améliorant ainsi l'amorti et la stabilité durant les phases de marche ou de course.

Elles permettent de réduire les vibrations sur les articulations du genou, de la cheville et de la région lombaire, réduisant les risques de traumatismes mineurs pouvant nuire aux articulations et aux os, tout en diminuant la fatigue musculaire.



POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
36	8435025910249	6003291
37	8435025910256	6003294
38	8435025910263	6003274
39	8435025910270	6003275
40	8435025910508	6003276
41	8435025910515	6003277
42	8435025910522	6003279
43	8435025910539	6003282
44	8435025910546	6003285
45	8435025910553	6003288
46	8435025910560	6003290

Non remboursé

INNOVATION BREVETÉE

EFFICACITÉ PROUVÉE !

lmana
Ingeniería biomecánica

Colegio Oficial
de Podólogos
de La Rioja

Prescrire : Semelles thermoformables - Orliman® FeetPAD

COLLECTION **TALONNETTES**

Talonnettes Silicone avec insert central

LA PAIRE

INDICATIONS :

Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Aponévrosite plantaire, Épine calcanéenne, Éperon calcanéen, Maladie de Sever (décharge partielle).

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	35 - 38	8435025907607	6116229
2	39 - 42	8435025907614	6116241
3	43 - 46	8435025907690	6116258

Non remboursé

Prescrire : Talonnettes Silicone avec insert central - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

INSERT
CENTRALÉPAISSEUR
8mmCOLLECTION **TALONNETTES**

Talonnettes Silicone avec insert latéral

LA PAIRE

INDICATIONS :

Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Aponévrosite plantaire, Épine calcanéenne, Éperon calcanéen, Maladie de Sever (décharge partielle).

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	35 - 38	8435025907706	6435012
2	39 - 42	8435025907713	6469376
3	43 - 46	8435025907720	6469525

Non remboursé

Prescrire : Talonnettes Silicone avec insert latéral - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

INSERT
LATÉRALÉPAISSEUR
8mmCOLLECTION **TALONNETTES**

Talonnettes plates Silicone avec insert central

LA PAIRE

INDICATIONS :

Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Épine calcanéenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires,
- Épaisseur de 5 mm sans bords latéraux.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	35 - 38	8435025908079	2945584
2	39 - 42	8435025908086	2945590
3	43 - 46	8435025908093	2945615
4	47 - 50	8435025908109	2945621

Non remboursé

Prescrire : Talonnettes plates Silicone avec insert central - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

INSERT
CENTRALFAIBLE
ÉPAISSEUR
5mm

Chaussettes de compression Voyage

LA PAIRE

INDICATIONS :

Stimule et favorise le retour veineux,
Protège le pied contre les frottements douloureux des chaussures,
Recommandé pour les longs trajets.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sans couture,
- Compression dégressive,
- Renfort matelassé au niveau de la plante des pieds,
- Maille épaisse,
- **Degré de compression : 15 - 20 mmHg - Classe II.**



SANS LATEX



UNISEXE



COMPRESSION



SANS COUTURE



RESPIRANT

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	18 - 21,5 cm	8435025923898	6041764
2	21,5 - 25 cm	8435025923904	6041765
3	25 - 28,5 cm	8435025923911	6041768
4	28,5 - 32 cm	8435025923928	6041770

Non remboursé

Prescrire : Chaussettes de compression Voyage - Orliman® FeetPAD

LE SAVIEZ-VOUS ?

6h

de voyage en avion
peuvent favoriser l'apparition
d'une thrombose
veineuse profonde chez
les personnes à risque.

Source : L'Assurance Maladie.
Prévenir la phlébite, Juillet 2023.
www.ameli.fr



Chaussettes Confort & Protection Pieds diabétiques

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds sensibles du diabétique, Candidose, Mycose, Eczéma, Prévient le développement des bactéries et champignons (traitement bactériostatique), Évite les frictions et les frottements sur les zones sensibles du pied, tels que les orteils et les talons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sans couture,
- Sans compression,
- Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon,
- Tissu en tricot lisse,
- Fibre de coton traitée avec des ions d'argent pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	36 - 38,5	8435025923775	6034921
2	38,5 - 41	8435025923782	6034928
3	41 - 43,5	8435025923799	6034929
4	43,5 - 46	8435025923805	6034930

Non remboursé

Prescrire : Chaussettes Confort & Protection Pieds diabétiques Daily - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



UNISEXE



SANS COMPRESSION



SANS COUTURE



RESPIRANT



BACTÉRIO-STATIQUE

Chaussettes Confort & Protection Pieds diabétiques

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds sensibles du diabétique, Candidose, Mycose, Eczéma, Prévient le développement des bactéries et champignons (traitement bactériostatique), Évite les frictions et les frottements sur les zones sensibles du pied, tels que les orteils et les talons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sans couture,
- Sans compression,
- Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon,
- Viscose avec charbon actif, absorbe l'humidité et neutralise les odeurs,
- Fibre de coton traitée avec des ions d'argent pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques.

TAILLE	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	36 - 38,5	8435025923812	6038578
2	38,5 - 41	8435025923829	6038579
3	41 - 43,5	8435025923836	6038580
4	43,5 - 46	8435025923843	6038581

Non remboursé

Prescrire : Chaussettes Confort & Protection Pieds diabétiques Relax - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



UNISEXE



SANS COMPRESSION




SANS COUTURE



RESPIRANT



BACTÉRIO-STATIQUE

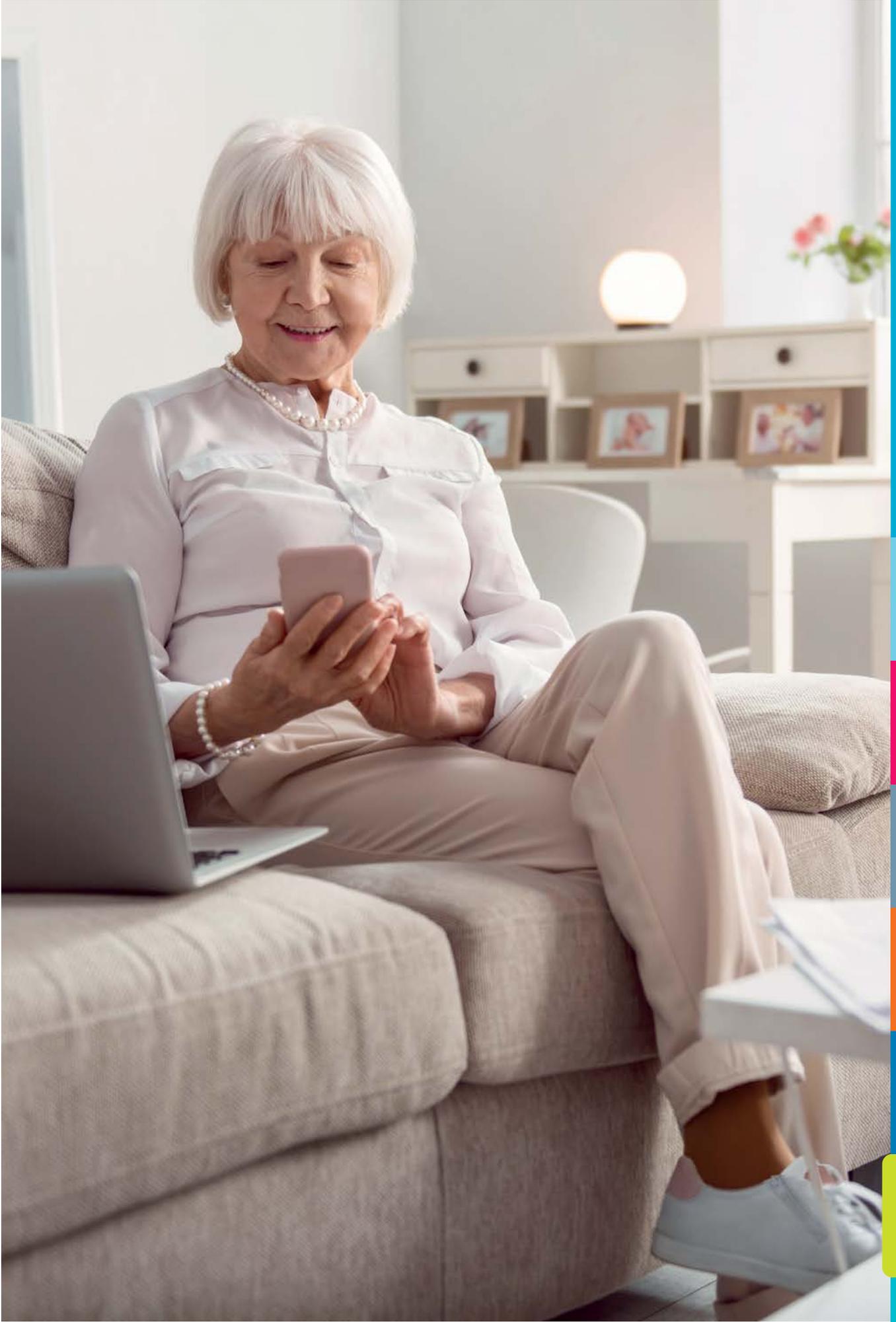

AUTRES
GAMMES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS




GAMME CHUT

Les chaussures thérapeutiques à usage temporaire sont destinées à des patients dont les anomalies constatées au niveau du pied demandent un maintien, un chaussant particulier ou une correction que ne peut assurer une chaussure ordinaire sans pour autant justifier l'attribution d'une chaussure thérapeutique sur mesure.

- Elles permettent une **plus grande mobilité en facilitant la marche** ou sa reprise,
- Elles sont **adaptées à de nombreuses pathologies plantaires** et favorisent la cicatrisation des plaies,
- Elles peuvent être utilisées **lorsqu'un appareillage orthopédique a été mis en place.**

Nos modèles allient **confort, protection et facilité d'utilisation** grâce à des **matériaux performants** aux **propriétés respirantes, antibactériennes et antistatiques.**

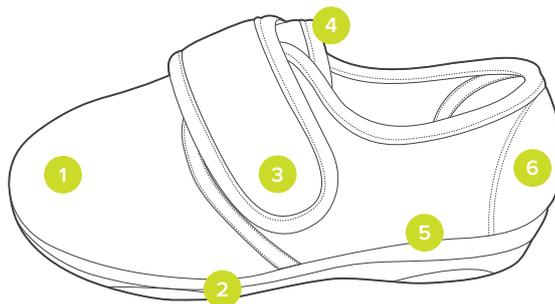

1. Volume chaussant important à l'avant-pied pour éviter les points de pression.
2. Semelle flexible antidérapante et antiglisse pour limiter le risque de chute.
3. Système de fermeture auto-agrippant ou élastique pour un ajustement optimal aux variations de volume.
4. Ouverture large pour une grande facilité de mise en place.
5. Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique.
6. Contrefort stabilisant pour un maintien optimal.

Chaussures thérapeutiques à usage temporaire **gamme CHUT**

INDICATION PRINCIPALE	MODÈLES FEMMES			MODÈLES MIXTES	MODÈLES HOMMES		
	CHAUSSURES OUVERTES	CHAUSSURES FERMÉES	CHAUSSONS		CHAUSSURES OUVERTES	CHAUSSURES FERMÉES	CHAUSSONS
PIEDS DIABÉTIQUES		TINTIAUX®				PENFRET®	RHUYS®
		ERQUY®				CHAUSEY®	
		CÉZEMBRE®					
		GAVRINIS®					
PIEDS RHUMATOÏDES	BRIAND®	HOEDIC®	MOLÈNE®	NOIRMOUTIER®	GUERNIC®	ER LANNIC®	
	ILLIEC®	DORELLE®	BRÉHAT®	OZAC'H®		ARZ®	
			OLÉRON®			ROËLAN®	
HALLUX VALGUS - OIGNONS	GLAZIC®	TATIHOU®				OUESSANT®	
	BELLE-ÎLE®	VEÏZIT®					
	HOUAT®	VERDELET®					
	THINIC®						
ORTEILS EN GRIFFE / MARTEAU	LEMENEC®		BELLE-ÎLE ÉTÉ®		COZ CASTEL®		QUIBERON®
	BELLE-ÎLE ÉTÉ®		GROIX ÉTÉ®				
	NOHIC®						



Chaussures thérapeutiques
à usage temporaire **gamme CHUT**

#1 DÉTERMINER LA POINTURE

POINTURE	LONGUEUR DU PIED (cm)	
	FEMME	HOMME & MIXTE
35	21,9	-
36	22,6	23
37	23,2	23,7
38	23,9	24,4
39	24,5	25
40	25,2	25,7
41	25,8	26,4
42	26,5	27
43	-	27,7
44	-	28,4
45	-	29
46	-	29,7

#2 DÉTERMINER LA LARGEUR DU PIED

POINTURE	CIRCONFÉRENCE (cm)		
	PIED MOYEN	PIED LARGE	PIED EXTRA-LARGE
35	< 22,4	22,5 - 23,5	> 23,5
36	< 22,9	23 - 24	> 24
37	< 23,4	23,5 - 24,5	> 24,5
38	< 23,9	24 - 25	> 25
39	< 24,4	24,5 - 25,5	> 25,5
40	< 24,9	25 - 26	> 26
41	< 25,4	25,5 - 26,5	> 26,5
42	< 25,9	26 - 27	> 27
43	< 26,4	26,5 - 27,5	> 27,5
44	< 26,9	27 - 28	> 28
45	< 27,4	27,5 - 28,5	> 28,5
46	< 27,9	28 - 29	> 29

#3 CHOISIR LE MODÈLE

		PIED MOYEN	PIED LARGE	PIED EXTRA-LARGE	HAUTEUR DU TALON	ÉPAISSEUR SEMELLE INTERNE	
						(mm)	(mm)
FEMME							
BELLE-ÎLE®	P192	●			30	8	
VEÏZIT®	P195	●			30	8	
VERDELET®	P195	●			30	8	
DORELLE®	P199	●			28	8	
CÉZEMBRE®	P202	●			30	8	
GAVRINIS®	P203	●			28	8	
TINTIAUX®	P203	●			28	8	
HOUAT®	P193	●	●		41	8	
THINIC®	P194	●	●		40	-	
TATIHOU®	P194	●	●		41	8	
ILLIEC®	P198	●	●		30	8	
HOEDIC®	P199	●	●		30	8	
BRÉHAT®	P200	●	●		30	8	
ERQUY®	P202	●	●		30	8	
GLAZIC®	P193	●	●	●	30	8	
LEMENEC®	P196	●	●	●	40	-	
NOHIC®	P196	●	●	●	40	-	
BELLE-ÎLE® ÉTÉ	P197	●	●	●	30	8	
GROIX® ÉTÉ	P197	●	●	●	30	-	
BRIAND®	P198	●	●	●	28	8	
MOLÈNE®	P200	●	●	●	30	8	
OLÉRON®	P201	●	●	●	30	8	
HOMME & MIXTE							
ARZ®	P206	●			30	8	
ER LANNIC®	P206	●			30	8	
ROËLAN®	P207	●			30	8	
GUERNIC®	P207	●	●		25	8	
PENFRET®	P208	●	●		28	8	
RHUYS®	P209	●	●		25	8	
OUESSANT®	P204	●	●	●	30	8	
COZ CASTEL®	P205	●	●	●	25	-	
QUIBERON®	P205	●	●	●	25	8	
CHAUSEY®	P208	●	●	●	30	8	
OZAC'H®	P211	●	●	●	25	8	
NOIRMOUTIER®	P211	●	●	●	25	8	

OUTILS



Affiche



Dépliant patients



Présentoir



Prise de mesures



Règlettes

La prise de mesures est essentielle à la délivrance du produit le plus adapté. Il est recommandé de bien suivre le protocole de prise de mesures disponible en téléchargement dans votre **Espace Pro** sur notre site : pro.orliman.fr.

Ou demandez-le à votre **technico-commercial(e)** ou notre **Service client : 02 99 66 41 41**.



Les mesures indiquées et le conseil des modèles sont à titre indicatif. En raison de la diversité des pathologies, l'essayage de la chaussure reste le moyen le plus adapté au choix du bon produit.



MODÈLES FEMMES

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Belle-Île®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Cou-de-pied fort. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige élastique pour épouser parfaitement les déformations du pied,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Effet bi-matière pour une chaussure élégante et féminine,
- Tissu déperlant.



Ouverture large
pour faciliter la mise en place.

Langue auto-agrippante
pour une fermeture rapide et ajustable.



● NOIR

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025914070	6015411
36	8435025914087	6015412
37	8435025914094	6015649
38	8435025914100	6015650
39	8435025914117	6015660
40	8435025914124	6015661
41	8435025914131	6015662
42	8435025914148	6015663

En raison du petit taillant du modèle Belle-Île®, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Belle-Île® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Glazic®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort.

Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors.

Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire.

Pansements épais. Pieds rhumatoïdes. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige latérale ultra souple pour épouser parfaitement les déformations du pied,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025917040	6223448
36	8435025917057	6223449
37	8435025917064	6223450
38	8435025917071	6223452
39	8435025917088	6223453
40	8435025917095	6223454
41	8435025917101	6223455
42	8435025917118	6223456

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Glazic® - Orliman® FeetPAD



Ouverture complète
idéal pour les personnes ayant
du mal à se baisser.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Houat®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds diabétiques. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

● NOIR / TAUPE

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025914797	6028960	8435025923102	6328177
36	8435025915893	6028961	8435025923157	6328206
37	8435025915909	6028963	8435025923164	6328207
38	8435025916210	6028964	8435025923171	6328208
39	8435025916227	6028965	8435025923188	6328209
40	8435025916234	6028966	8435025923294	6328211
41	8435025916326	6028967	8435025923300	6328212
42	8435025916333	6028968	8435025923317	6328213

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Houat® - Orliman® FeetPAD



Tige élasthanne ultra souple
pour épouser parfaitement les déformations du pied.

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Thinic®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds rhumatoïdes. Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau. Pathologies unguéales.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau souple sur les côtés, épouse les déformations du pied,
- Effet bi-matière pour une chaussure élégante et féminine.

● CRÈME / MOTIFS

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025920675	6287403
36	8435025920682	6287404
37	8435025920699	6287405
38	8435025920705	6287406
39	8435025920712	6287407
40	8435025920729	6287408
41	8435025921559	6287409
42	8435025921566	6287410

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Thinic® - Orliman® FeetPAD



Ouverture arrière complète

idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.

Languette arrière auto-agrippante pour une fermeture rapide et ajustable.



CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Tatihou®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds diabétiques. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 lanières auto-agrippantes souples et longues pour une fermeture ajustable au cou-de-pied,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025914575	6028951
36	8435025914728	6028952
37	8435025914735	6028953
38	8435025914742	6028954
39	8435025914759	6028955
40	8435025914766	6028957
41	8435025914773	6028958
42	8435025914780	6028959

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Tatihou® - Orliman® FeetPAD



Tige élasthane ultra souple

pour épouser parfaitement les déformations du pied.

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Veizit®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges.
Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors.
Pieds rhumatoïdes. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité.
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Modèle moderne et élégant.



Matériau souple sur les côtés
pour épouser les déformations du pied.

● NOIR / KAKI

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025922884	6327816
36	8435025922891	6328163
37	8435025922907	6328164
38	8435025922914	6328168
39	8435025922921	6328169
40	8435025923072	6328171
41	8435025923089	6328172
42	8435025923096	6328174

LPPR : 7133052 / **25,31€^{TTC}** l'unité, soit **50,62€^{TTC}** la paire.

Prescrire : CHUT Veizit® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Verdelet®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges.
Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors.
Pieds rhumatoïdes, Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Modèle moderne et élégant.



Matériau souple sur les côtés
pour épouser les déformations du pied.

● NOIR

● BEIGE

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025941748	6349744	8435025941182	6349496
36	8435025941755	6349745	8435025941199	6349737
37	8435025941762	6349746	8435025941236	6349738
38	8435025941779	6349747	8435025941328	6349739
39	8435025941786	6349748	8435025941663	6349740
40	8435025941793	6349750	8435025941670	6349741
41	8435025941809	6349751	8435025941700	6349742
42	8435025941816	6349752	8435025941731	6349743

LPPR : 7133052 / **25,31€^{TTC}** l'unité, soit **50,62€^{TTC}** la paire.

Prescrire : CHUT Verdelet® - Orliman® FeetPAD

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Lemenec®

FEMME

ORTEILS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe / marteau. Pieds rhumatoïdes.
Hallux valgus, oignons. Œdème post-opératoire,
Pansement épais.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau souple sur les côtés, épouse les déformations du pied,
- Languettes auto-agrippantes pour une fermeture rapide et ajustable,
- Semelle extérieure souple pour plus de confort.



Ouverture complète
sur le dessus et à l'arrière
de la chaussure.

POINTURE	● BLEU		● ROSE	
	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025923409	6328340	8435025923645	6328349
36	8435025923416	6328341	8435025923652	6328350
37	8435025923423	6328342	8435025923669	6328352
38	8435025923430	6328343	8435025923676	6328353
39	8435025923447	6328344	8435025923683	6328354
40	8435025923454	6328346	8435025923690	6328355
41	8435025923461	6328347	8435025923706	6328356
42	8435025923478	6328348	8435025923713	6328357

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Lemenec® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Nohic®

FEMME

ORTEILS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe / marteau. Pieds rhumatoïdes.
Hallux valgus, oignons. Œdème post-opératoire,
Pansement épais.

CARACTÉRISTIQUES :

- Avant-pied large et ajustable,
- Effet bi-matière pour une chaussure élégante et féminine.



Languettes auto-agrippantes
sur la tige et à l'arrière.

Ouverture complète
idéal pour les personnes ayant
du mal à se baisser.

POINTURE	● GRIS CLAIR / MOTIFS	
	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025920590	6287395
36	8435025920606	6287396
37	8435025920613	6287397
38	8435025920620	6287398
39	8435025920637	6287399
40	8435025920644	6287400
41	8435025920651	6287401
42	8435025920668	6287402

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Nohic® - Orliman® FeetPAD

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Belle-Île® été



FEMME

ORTELS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe / marteau. Hallux valgus, oignons.
Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Durillons, cors.
Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire.
Pansements épais. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Avant-pied large et ajustable grâce à sa languette auto-agrippante,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Tissu déperlant.

● BLEU MARINE

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025916807	6223465
36	8435025916814	6223466
37	8435025916821	6223467
38	8435025916838	6223469
39	8435025916845	6223470
40	8435025916852	6223471
41	8435025916869	6223472
42	8435025916876	6223473

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Belle-Île® été - Orliman® FeetPAD



Ouverture complète

idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.



En raison du petit taillant du modèle Belle-Île® été, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Groix® été



FEMME

ORTELS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe / marteau. Hallux valgus, oignons.
Pieds extra-larges. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Avant-pied large et ajustable grâce à sa languette auto-agrippante,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Tissu déperlant.

● GRIS

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025916883	6223483
36	8435025916890	6223484
37	8435025916906	6223485
38	8435025916913	6223486
39	8435025916920	6223487
40	8435025916937	6223488
41	8435025916944	6223489
42	8435025916951	6223490

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Groix® été - Orliman® FeetPAD



Ouverture complète

idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.



En raison du petit taillant du modèle Groix® été, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Briand®

FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Pieds diabétiques. Cou-de-pied fort. Pieds extra-larges. Durillons, cors.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, amovible, permet le remplacement par une semelle orthopédique.
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité.



● ROUGE

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025921733	6287436
36	8435025921740	6287550
37	8435025922044	6287551
38	8435025922051	6287552
39	8435025922068	6287553
40	8435025922075	6287554
41	8435025922082	6287555
42	8435025922099	6287556

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Briand® - Orliman® FeetPAD

Ouverture large
pour faciliter la mise en place.

Languettes auto-agrippantes
pour une fermeture rapide et ajustable.



CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Illiec®

FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Cou-de-pied fort. Hallux valgus, oignons. Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau élastique sur les côtés, épouse les déformations du pied,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, amovible, permet le remplacement par une semelle orthopédique.



● BLEU MARINE / BLEU MÉTALLIQUE

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025921573	6287411
36	8435025921580	6287412
37	8435025921597	6287413
38	8435025921603	6287414
39	8435025921610	6287415
40	8435025921627	6287420
41	8435025921634	6287421
42	8435025921641	6287423

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Illiec® - Orliman® FeetPAD

Ouverture large
pour faciliter la mise en place.

Languettes auto-agrippantes
pour une fermeture rapide et ajustable.



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Dorelle®



FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Pieds diabétiques. Hallux valgus, oignons. Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, amovible, permet le remplacement par une semelle orthopédique.



● BLEU MARINE

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025921658	6287427
36	8435025921665	6287429
37	8435025921672	6287430
38	8435025921689	6287431
39	8435025921696	6287432
40	8435025921702	6287433
41	8435025921719	6287434
42	8435025921726	6287435

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Dorelle® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Hoedic®



FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Cou-de-pied fort. Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture large pour faciliter la mise en place,
- Languette auto-agrippante pour une fermeture rapide et ajustable,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Matière élastique sur les côtés
pour épouser les déformations du pied.

● NOIR

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025917125	6223438
36	8435025917132	6223440
37	8435025917149	6223441
38	8435025917156	6223442
39	8435025917163	6223443
40	8435025917170	6223444
41	8435025917187	6223446
42	8435025917194	6223447

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Hoedic® - Orliman® FeetPAD

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Bréhat®

FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors. Pathologies unguéales.

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Effet bi-matière pour une chaussure élégante et féminine,
- Tissu déperlant.



Tige élasthanne

aux propriétés extensibles pour épouser parfaitement les déformations du pied.

● NOIR

● BORDEAUX

POINTURE	NOIR		BORDEAUX	
	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025913776	6015403	8435025913189	6015035
36	8435025913783	6015404	8435025913196	6015036
37	8435025913790	6015405	8435025913202	6015038
38	8435025913806	6015406	8435025913219	6015039
39	8435025913813	6015407	8435025913738	6015040
40	8435025913820	6015408	8435025913745	6015041
41	8435025913837	6015409	8435025913752	6015042
42	8435025913844	6015410	8435025913769	6015044

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Bréhat® - Orliman® FeetPAD

En raison du petit taillant du modèle Bréhat®, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Molène®

FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Tissu nid d'abeille déperlant pour une respiration optimale et un parfait maintien du pied,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Grande ouverture
pour faciliter la mise en place.

Chaussant large
pour le confort des pieds déformés.



● NOIR

● BLEU MARINE

POINTURE	NOIR		BLEU MARINE	
	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025913851	6015395	8435025916968	6223475
36	8435025913868	6015396	8435025916975	6223476
37	8435025914018	6015397	8435025916982	6223477
38	8435025914025	6015398	8435025916999	6223478
39	8435025914032	6015399	8435025917002	6223479
40	8435025914049	6015400	8435025917019	6223481
41	8435025914056	6015401	8435025917026	6223482
42	8435025914063	6015402	8435025917033	6223962

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Molène® - Orliman® FeetPAD

En raison du petit taillant du modèle Molène®, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Cézembre®

FEMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Hallux valgus, oignons.
Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés ou diabétiques,
- Matière légèrement élastique sur les côtés pour épouser les déformations du pied,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Ouverture souple
grâce à sa tige munie d'élastiques,
mise en place facile.

● NOIR / BRONZE

● BLEU MARINE / BLEU

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025919587	6223457	8435025919068	6223521
36	8435025919594	6223458	8435025919075	6223520
37	8435025919600	6223459	8435025919082	6223519
38	8435025919617	6223460	8435025919099	6223518
39	8435025919624	6223461	8435025919105	6223517
40	8435025919631	6223462	8435025919327	6223516
41	8435025919648	6223463	8435025919358	6223515
42	8435025919655	6223464	8435025919570	6223514

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Cézembre® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Erquy®

FEMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Cou-de-pied fort. Hallux valgus, oignons.
Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors.
Pieds rhumatoïdes. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés ou diabétiques,
- Matière légèrement élastique pour épouser les déformations du pied,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Ouverture large
pour faciliter la mise en place.

2 languettes auto-agrippantes
pour une fermeture rapide et ajustable.

● NOIR

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025920422	6223963
36	8435025920439	6223964
37	8435025920538	6223966
38	8435025920545	6223501
39	8435025920552	6223500
40	8435025920569	6223499
41	8435025920576	6223498
42	8435025920583	6223496

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Erquy® - Orliman® FeetPAD

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Gavrinis®

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Cou-de-pied fort.
Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, amovible, permet le remplacement par une semelle orthopédique.

● BLANC / ROSE POUDRÉ

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025944169	6349763
36	8435025944183	6349764
37	8435025944190	6349765
38	8435025944312	6349766
39	8435025944329	6349767
40	8435025944343	6349768
41	8435025944350	6349769
42	8435025944367	6349770

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Gavrinis® - Orliman® FeetPAD

FEMME

PIEDS DIABÉTIQUES



Double ouverture latérale par fermeture éclair
facilite la mise en place de la chaussure.



CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Tintiaux®

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Cou-de-pied fort.
Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés ou diabétiques,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique.

● MARRON / LÉOPARD

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
35	8435025923324	6328331
36	8435025923331	6328332
37	8435025923348	6328333
38	8435025923355	6328334
39	8435025923362	6328335
40	8435025923379	6328336
41	8435025923386	6328337
42	8435025923393	6328338

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Tintiaux® - Orliman® FeetPAD

FEMME

PIEDS DIABÉTIQUES



Ouverture large
avec languette rabattable
pour faciliter la mise en place.



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES



MODÈLES HOMMES

TRONC
& RACHISÉPAULE
& BRASPOIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIEFeetPAD
CHUTAUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Ouessant®

 HOMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors. Œdème post-opératoire. Pansements épais. Pieds rhumatoïdes. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture large pour faciliter la mise en place,
- Languette auto-agrippante pour une fermeture rapide et ajustable,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Tige élastique
pour épouser parfaitement
les déformations du pied.

● NOIR

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
39	8435025920255	6223429
40	8435025920262	6223430
41	8435025920279	6223431
42	8435025920286	6223432
43	8435025920293	6223433
44	8435025920392	6223434
45	8435025920408	6223435
46	8435025920415	6223436

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Ouessant® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Coz Castel®

HOMME

ORTELS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe ou en marteau. Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Œdème post-opératoire, Pansements épais.

CARACTÉRISTIQUES :

- Languettes auto-agrippantes sur la tige et à l'arrière pour une fermeture rapide et ajustable,
- Avant-pied large et ajustable.



● BEIGE

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
39	8435025943636	6349753
40	8435025943643	6349754
41	8435025943650	6349756
42	8435025943667	6349757
43	8435025943674	6349758
44	8435025943681	6349759
45	8435025943698	6349760
46	8435025943704	6349762

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Coz Castel® - Orliman® FeetPAD

Ouverture complète
idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.



CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Quiberon®

HOMME

ORTELS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe / marteau. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Hallux valgus, oignons. Durillons, cors. Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire. Pansements épais. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle dimensionnée pour les pieds larges,
- Butée du pied totalement fermée,
- Tissu élégant et déperlant,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



● MARRON

● NOIR

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
39	8435025914155	6015664	8435025941106	6349793
40	8435025914162	6015665	8435025941113	6349794
41	8435025914179	6015666	8435025941120	6349795
42	8435025914186	6015667	8435025941137	6349796
43	8435025914193	6015668	8435025941144	6349797
44	8435025914209	6015670	8435025941151	6349798
45	8435025914216	6015671	8435025941168	6349799
46	8435025914223	6015672	8435025941175	6349800

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Quiberon® - Orliman® FeetPAD

Languette pliée
en une seule partie
pour faciliter la fermeture.



TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Arz®

HOMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons.
Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux légèrement élastiques sur les côtés pour épouser les déformations du pied,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
39	8435025920149	6223512
40	8435025920156	6223510
41	8435025920163	6223509
42	8435025920200	6223508
43	8435025920217	6223507
44	8435025920224	6223506
45	8435025920231	6223504
46	8435025920248	6223503

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Arz® - Orliman® FeetPAD



Semi-fermée avec
large languette auto-agrippante
pour une fermeture rapide.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Er Lannic®

HOMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Pieds diabétiques. Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Effet bi-matière élégant.

● NOIR

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
39	8435025923560	6328366
40	8435025923577	6328367
41	8435025923584	6328369
42	8435025923591	6328370
43	8435025923607	6328371
44	8435025923614	6328372
45	8435025923621	6328373
46	8435025923638	6328375

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Er Lannic® - Orliman® FeetPAD



Ouverture large
pour faciliter la mise en place.

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Guernic®



HOMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons.
Durillons, cors. Cou-de-pied fort.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau élastique sur les côtés, épouse les déformations du pied,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, amovible, permet le remplacement par une semelle orthopédique.



● BLEU MARINE

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
39	8435025922105	6287558
40	8435025922310	6287559
41	8435025922327	6287560
42	8435025922334	6287561
43	8435025922341	6287562
44	8435025922358	6287564
45	8435025922365	6287565
46	8435025922372	6287566

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTIC} l'unité, soit 50,62€^{TTIC} la paire.

Prescrire : CHUT Guernic® - Orliman® FeetPAD

Ouverture large
pour faciliter la mise en place.

Languette auto-agrippante
pour une fermeture rapide et ajustable.



CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Roëlan®



HOMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Pieds diabétiques. Durillons, cors.
Métatarsalgie. Hallux valgus, oignons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, amovible, permet le remplacement par une semelle orthopédique.



● BLEU MARINE

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
39	8435025922389	6287567
40	8435025922624	6287569
41	8435025922631	6287570
42	8435025922648	6287571
43	8435025922655	6287572
44	8435025922853	6287573
45	8435025922860	6287574
46	8435025922877	6287575

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTIC} l'unité, soit 50,62€^{TTIC} la paire.

Prescrire : CHUT Roëlan® - Orliman® FeetPAD

Matière élastique sur les côtés
pour épouser les déformations du pied.

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Chausey®

HOMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Orteils en griffe ou en marteau.
Pieds extra-larges. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés ou diabétiques,
- Semelle dimensionnée pour les pieds larges,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
39	8435025916340	6028943
40	8435025916357	6028944
41	8435025916364	6028945
42	8435025916371	6028946
43	8435025916388	6028947
44	8435025916777	6028948
45	8435025916784	6028949
46	8435025916791	6028950

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Chausey® - Orliman® FeetPAD



Languette longue
pour ajuster la fermeture
aux pieds volumineux.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Penfret®

HOMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Pieds rhumatoïdes.
Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés ou diabétiques,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure extrêmement souple pour plus de confort.

● NOIR

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
39	8435025923485	6328358
40	8435025923492	6328359
41	8435025923508	6328360
42	8435025923515	6328361
43	8435025923522	6328362
44	8435025923539	6328363
45	8435025923546	6328364
46	8435025923553	6328365

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Penfret® - Orliman® FeetPAD



Ouverture large sur le dessus
pour faciliter la mise en place.



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

MODÈLES MIXTES



AUTRES
GAMMES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Ozac'h®

MIXTE

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors. Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire. Pansements épais.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- 2 fermetures auto-agrippantes sur la tige et à l'arrière,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Semelle intérieure amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique.



LATEX



Ouverture complète
idéal pour les personnes ayant
du mal à se baisser.

● NOIR

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
36	8435025940338	6349771	42	8435025940420	6349777
37	8435025940345	6349772	43	8435025940437	6349779
38	8435025940352	6349773	44	8435025940482	6349780
39	8435025940369	6349774	45	8435025940499	6349781
40	8435025940406	6349775	46	8435025940505	6349782
41	8435025940413	6349776	-	-	-

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Ozac'h® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Noirmoutier®

MIXTE

EHPAD

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors. Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire. Pansements épais.

CARACTÉRISTIQUES :

- Mousse contrecollée sur tissu auto-agrippant compatible, s'adapte à toutes les épaisseurs de pieds,
- Modèle montant sur la cheville,
- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Tissu déperlant.



LATEX

2 fermetures auto-agrippantes
sur la tige et à l'arrière.

Ouverture complète
idéal pour les personnes ayant
du mal à se baisser.



Étiquette à l'intérieur de la tige
pour inscrire les nom et
chambre du patient.



● NOIR

POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7	POINTURE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
36	8435025914322	6015045	42	8435025914520	6015051
37	8435025914339	6015046	43	8435025914537	6015052
38	8435025914360	6015047	44	8435025914544	6015053
39	8435025914377	6015048	45	8435025914551	6015054
40	8435025914490	6015049	46	8435025914568	6015055
41	8435025914513	6015050	-	-	-

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Noirmoutier® - Orliman® FeetPAD

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES



AUTRES
GAMMES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS



AUTRES GAMMES

CRYOTHÉRAPIE 214

La cryothérapie est une méthode de soins qui consiste à appliquer du froid sur une zone du corps afin de faire chuter la température cutanée. Elle est souvent pratiquée par les sportifs dans le but d'obtenir une récupération de la fonction musculaire plus rapide.

PROTOCOLE GREC

Le protocole GREC (ou RICE) est une méthode de premiers soins qui a pour but de diminuer la douleur, d'atténuer les œdèmes et de favoriser le rétablissement.

GLAÇAGE

Appliquer du froid pour un effet antalgique et anti-inflammatoire.

REPOS

Mettre l'articulation en repos strict afin d'éviter que la lésion ne s'aggrave.

ÉLÉVATION

Maintenir l'articulation surélevée pour favoriser la circulation sanguine et diminuer la pression au niveau de la zone douloureuse.

COMPRESSION

Effectuer une compression sur la zone douloureuse afin de favoriser l'action du froid et de réduire la douleur.

BANDES DE CONTENTION 220

Les bandes de contention sont adaptées à la traumatologie sportive en général (entorses, tendinites, élongations, contention musculaire...). Elles protègent les zones sensibles et peuvent servir à maintenir les compresses dans le cadre d'un traitement en cryothérapie.

GAMME AXESS 221

Attelles de cryothérapie Cryotec®

Comment le froid soulage-t-il la douleur ?

ANALGÉSIQUE ET ANTALGIQUE

Appliquer du froid sur une zone du corps a pour but de faire chuter la température cutanée. Ce « choc thermique » permet d'anesthésier les nerfs sensitifs qui conduisent le message douloureux envoyé au cerveau. Ce qui procure alors un effet antalgique immédiat.

ANTI-ŒDÉMATEUX / ANTI-INFLAMMATOIRE

Lorsque les muscles ou les articulations sont enflammés, les vaisseaux sanguins ont pour réaction de se dilater (vasodilatation). Cette réaction rend leur paroi particulièrement perméable. Le liquide (plasma) peut alors s'infiltrer dans les tissus et provoquer l'apparition d'un œdème. L'application immédiate du froid, associée à une légère compression et une position surélevée, permet de minimiser la dilatation des vaisseaux limitant ainsi la formation de gonflements et ralentissant le processus inflammatoire.



Recommandation :
Ne jamais mettre de glace à même la peau, pour éviter tout risque de brûlure ou de gelure.

GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE ET ROTULIENNE

Genulig® Cryotec®

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE) ou rotulienne, Post-opératoire, Post-traumatique, Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, Reprise du sport ou d'activité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et matériaux souples favorisant la mise en place du produit,
- Matériaux respirants procurant aux patients un réel confort d'utilisation,
- 2 doubles ressorts spiraliium pour accompagner les ligaments,
- Cadrans articulés crantés et polycentriques avec butée anti-recurvatum permettant de sécuriser le genou lors des mouvements de flexion/extension.

Sangle de strapping en «X» permettant de réaliser une compression graduelle et d'effectuer plusieurs types de strapping.



Pad circulaire silicone avec picots favorisant l'effet proprioceptif et permettant un meilleur centrage rotulien.



Compresse de froid amovible technologie « flocon de neige » apporte une diffusion d'un froid constant et de longue durée tout en restant malléable et agréable à utiliser.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	39 - 47 cm	8435025926561	6041780
2	47 - 53 cm	8435025926578	6041781
3	53 - 60 cm	8435025926677	6041782
4	60 - 67 cm	8435025926684	6041783
5	67 - 75 cm	8435025926691	6041784

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genulig® Cryotec® - Orliman®



ATTELLE DE GENOU

Kit Compressive Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-traumatique, Entorse avec œdème, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Compression + thérapie par le froid,
fournie avec 2 compresses de froid 30 x 15 cm
(possibilité d'utilisation avec 4 compresses 15 x 15 cm),
- Éclisses postérieures et latérales amovibles.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	8435025929074	6034893
2	> 160 cm	61 cm	8435025929081	6034895

LPPR : 7132727 / **57,23€^{TTC}**

Prescrire : Kit Compressive Cryotec® - Orliman®

ATTELLE DE GENOU COMPRESSIVE SEULE (sans compresse de froid)

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	8435025929050	6034718
2	> 160 cm	61 cm	8435025929067	6034719

LPPR : 7132727 / **57,23€^{TTC}**

Prescrire : Attelle de genou Compressive seule - Orliman®



Kit dentaire Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Douleurs dentaires, Post-opératoire (dents de sagesse...).

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie « Flocon de neige » n'agressant pas la peau,
- Compresses de froid malléables même congelées permettant d'envelopper le visage tout en suivant les courbes,
- Sangle de maintien pour une plus grande liberté de mouvement.



TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025902367	6034889

Non remboursé

Prescrire : Kit dentaire Cryotec® - Orliman®

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

AUTRES
GAMMES


Cryopump® , le soin par la cryothérapie compressive



Les produits CRYOPUMP® associent la technologie de la **cryothérapie** et la **compression localisée**.

Grâce à la compresse de gel et à la zone d'air adaptées à la morphologie et physiologie du corps humain, ces attelles apportent un **soin en continu** et une diffusion du froid sur toute la zone musculaire et articulaire.

LA TECHNOLOGIE DES PRODUITS CRYOPUMP®

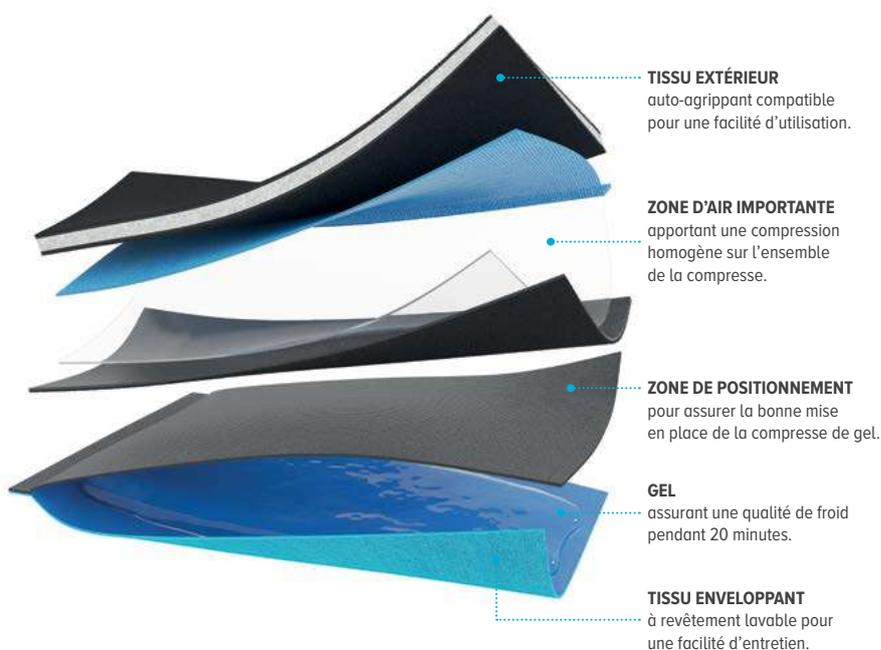

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Épaulière Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-opératoire et post-traumatique, Capsulite.

CARACTÉRISTIQUES :

- L'épaulière anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau de l'acromion pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses 3 sangles (dont une amovible) facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 sangle amovible,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.



Comresse de gel anatomique pour une meilleure répartition du froid.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025924406	6028940

LPPR : 6132607 / **15,24€^{TTC}**

Prescrire : Épaulière Cryopump® - Orliman®

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Genouillère Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible
apportant une compression
graduelle en fonction du traitement
et du ressenti du patient.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025928671	6028941

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : Genouillère Cryopump® - Orliman®

Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.



CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Genouillère articulée Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement,
- 2 cadrans articulés amovibles aident la sécurisation latérale.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrans articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible
apportant une compression
graduelle en fonction du traitement
et du ressenti du patient.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025926981	6085589

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genouillère articulée Cryopump® - Orliman®

Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Attelle de genou évolutive Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- L'attelle de genou évolutive Cryopump® est développée en deux parties dissociables permettant de passer du traitement en phase d'immobilisation (grâce à des éclisses postérieures préformées, latérales amovibles et modelables) en phase de maintien renforcé (grâce à ses éclisses latérales articulées),
- Ses deux zones de compression graduelle par pompe permettent une meilleure répartition du froid.


LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid anatomiques et 2 compresses de froid rectangulaires,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrans articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025928985	6120301

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Attelle de genou évolutive Cryopump® - Orliman®

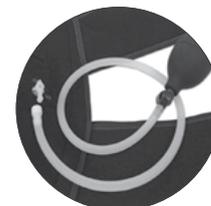

1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.

Compresses de gel rectangulaires et anatomiques
pour une meilleure répartition du froid.



CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Chevillère Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique,
Rééducation.

CARACTÉRISTIQUES :

- La chevillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau du talon pour une meilleure adaptation morphologique,
- Sa sangle facilite la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Unique	8435025903890	6035380

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Chevillère Cryopump® - Orliman®



1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.

Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.



TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

Compresse de froid & chaud/froid

Compresse de froid Réutilisable

INDICATIONS :

Hématomes, Entorses, Élongations, Maux de tête, Tendinites, Arthrose (poussée inflammatoire), Piqûres d'insectes, Douleurs dentaires...

CARACTÉRISTIQUES :

- Livrée avec sa housse de protection,
- Dimensions au choix :
15 x 15 cm et 30 x 15 cm,
- Diffusion du froid :
2h (15 x 15 cm) ou 4h (30 x 15 cm).



TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
15 x 15 cm	8435025902329	6034688
30 x 15 cm	8435025902336	6034689

Non remboursé

- Diffusion d'un froid constant et de longue durée,
- **Malléable** grâce à la technologie de type flocon de neige,
- **Ne brûle pas la peau.**

Prescrire : Compresse de froid - Orliman®

COMPRESSE CHAUD/FROID RÉUTILISABLE

Thermopad

INDICATIONS :

Chaud : Contractures, Courbatures, Lombalgie, Arthrose (raideur articulaire), Crampes, Douleurs musculaires, Torticolis...

Froid : Hématomes, Entorses, Élongations, Maux de tête, Arthrose (poussée inflammatoire), Piqûres d'insectes, Douleurs dentaires...

CARACTÉRISTIQUES :

- Livrée avec sa housse de protection,
- Dimensions au choix :
15 x 15 cm et 30 x 15 cm,
- Diffuse 20 minutes de chaud ou froid.




TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
15 x 15 cm	8435025902343	6034714
30 x 15 cm	8435025902350	6034716

Non remboursé

Prescrire : Compresse chaud/froid Thermopad - Orliman®

Bandes de contention **Neostrap**[®]

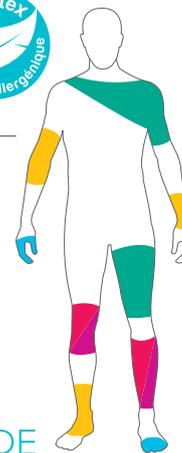

Les bandes de contention **Neostrap**[®] sont élégantes, confortables et respirantes. Grâce à leur conception spécifique et leur système de fixation auto-agrippant micro-injection, elles permettent d'effectuer **un strapping efficace sans coller à la peau**. Sans latex, **hypoallergéniques**, elles sont **lavables et réutilisables plusieurs fois**.

Neostrap[®], l'élément indispensable de la trousse à pharmacie, à la maison ou en voyage.

TABLEAU DE RECOMMANDATION


TECHNOLOGIE NEOSTRAP[®]



Tissage esthétique et performant
Auto-agrippant compatible,
Indémaillable
(découpable dans les 2 sens).

Revêtement «seconde peau»
Pour un contact cutané agréable,
confortable et un maintien optimal.
(Sans latex, hypoallergénique,
sans agent collant, résistant aux usages répétés.)

Fixation auto-agrippante micro-injection
pour une fixation parfaite et un maintien performant.

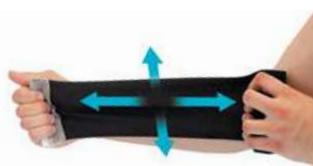

Respirante et extensible




- Doigts/orteils
- Petits bobos

2.5 CM



- Coude/poignet
- Cheville

5 CM

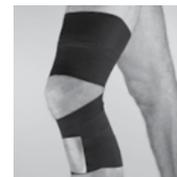

- Genou
- Mollet

7.5 CM



- Épaule
- Cuisse

10 CM



- Cryothérapie
(maintien de compresse)

10 CM

BANDE DE CONTENTION RÉUTILISABLE

Neostrap[®]

- Contention adaptée à la traumatologie sportive et générale (entorses, tendinites, elongations, contusions, contention musculaire...),
- Maintien de pansements et protection des zones sensibles (plaies des extrémités, tête, épaules, talons...),
- Maintien de compresses dans le cadre de traitement en cryothérapie (compresses de froid et compresses chaud/froid Thermopad, Protocole G.R.E.C.).

● NOIR

TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
2,5 cm x 50 cm	8435025902312	6035131
5 cm x 1 m	8435025900479	6035132
7,5 cm x 1 m	8435025902299	6035134
7,5 cm x 2 m	8435025902305	6138616
10 cm x 1,5 m	8435025900486	6035136

Non remboursé

Prescrire : Bande de contention Neostrap[®] - Orliman[®]



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE


FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

AXESS



Une gamme orthopédique
AXESSible!

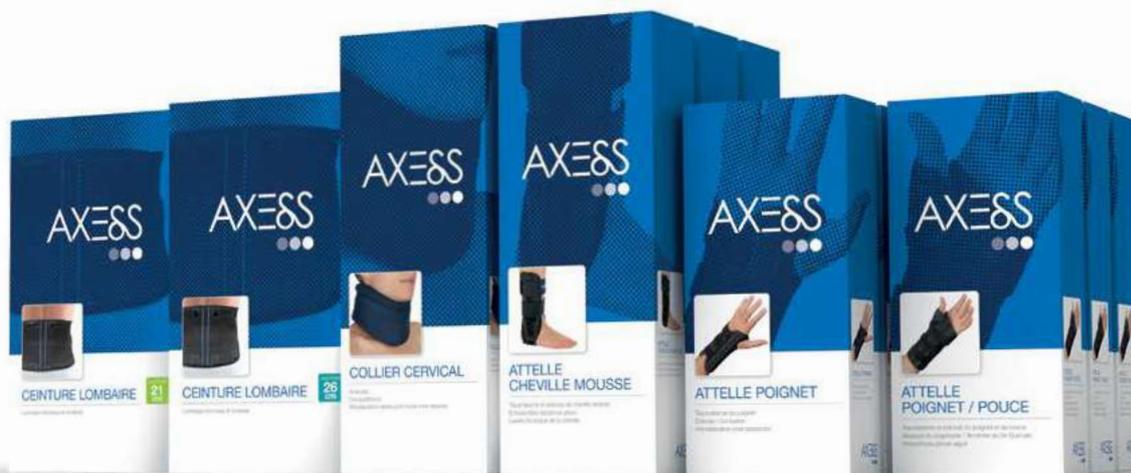

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

AUTRES
GAMMES

Collier cervical



INDICATIONS : Torticolis, Cervicarthrose, Réadaptation après port d'une mini-minerve.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle souple,
- Forme très anatomique, bonne repose au niveau des maxillaires et du larynx,
- Densité 32 kg/m³.



HAUTEUR	TOUR DE COU	TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
6,5 cm	29 - 34 cm	Enfant	8435025933378	6446085
	30 - 34 cm	1	8435025933385	6446091
7,5 cm	35 - 39 cm	2	8435025933392	6446116
	40 - 44 cm	3	8435025933620	6446122
	30 - 34 cm	1	8435025933637	6446139
9,5 cm	35 - 39 cm	2	8435025933644	6446145
	40 - 44 cm	3	8435025933651	6446151
10,5 cm	30 - 37 cm	1	8435025933354	6446079
	38 - 44 cm	2	8435025933361	7165282

LPPR : 7132704 / **9,25€^{TTC}**


Ceinture lombaire



INDICATIONS : Lumbalgie aiguë, Lumbago, Sciatalgie chronique ou aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système de sangle à rappel postural,
- Tissu élastique et respirant permettant une parfaite adaptation morphologique et une contention homogène,
- Système de passe-doigts.

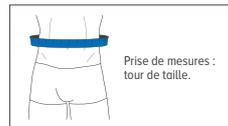

HAUTEUR	TOUR DE TAILLE	TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
21 cm	60 - 85 cm	1	8435025936393	7165299
	85 - 110 cm	2	8435025936409	7167602
	110 - 140 cm	3	8435025936416	7172721
26 cm	60 - 85 cm	1	8435025936423	7180956
	85 - 110 cm	2	8435025936430	7697398
	110 - 140 cm	3	8435025936447	7803995

LPPR : H21 cm : 201E00.021 / **47,19€^{TTC}** / H26 cm : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**

Attelle de genou 3 pans 0°



INDICATIONS : Traumatisme et entorse du genou, Lésion partielle ou déchirure d'un ligament, Luxation de la rotule, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle universel grâce à son système de panneaux latéraux amovibles,
- Baleines latérales modelables optimisant l'adaptation au niveau du genou,
- Double système intérieur de bandes anti-glisse (partie supérieure et inférieure).



TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
< 140 cm	40 cm	8435025928558	6320728
140 - 180 cm	50 cm	8435025928565	7165230
> 180 cm	60 cm	8435025928572	7165247

LPPR : 7132727 / **57,23€^{TTC}**

Attelle de genou aérée



INDICATIONS : Traumatisme et entorse du genou, Luxation de la rotule, Lésion partielle ou déchirure d'un ligament, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 éclisses modelables : 2 latérales et 2 postérieures préformées,
- 2 sangles de pré-positionnement et 2 sangles de fixation avec boucles anti-vrilles et fixations auto-agrippantes.



HAUTEUR	TAILLE INDIVIDU	TAILLE	TOUR DE CUISSE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
50 cm	150 - 180 cm	1	43 - 53	8435025929234	6167850
		2	53 - 63	8435025929241	6167851
		3	63 - 73	8435025929258	6167852
60 cm	> 180 cm	1	43 - 53	8435025929265	6167854
		2	53 - 63	8435025929326	6167855

LPPR : 7132727 / **57,23€^{TTC}**

Attelle de poignet



INDICATIONS : Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse palmaire en aluminium modelable,
- Légère et confortable,
- Réglage par sangles et brides anti-vrilles.



MAIN	TOUR DE POIGNET	TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Gauche	12 - 16 cm	1	8435025930100	6196062
	16 - 18 cm	2	8435025930117	7165253
Droite	12 - 16 cm	1	8435025930032	6438298
	16 - 18 cm	2	8435025930094	7165276

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}

Attelle de poignet-pouce



INDICATIONS : Traumatisme et entorse du poignet et du pouce, Blessure du scaphoïde, Tendinite de De Quervain, Rhizarthrose phase aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisses (latérale et palmaire) en aluminium modelable,
- Éclisse latérale dotée d'un reposoir : évite une mauvaise rotation du pouce,
- Réglage par sangles et brides anti-vrilles



MAIN	TOUR DE POIGNET	TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
Gauche	12 - 16 cm	1	8435025932272	6196085
	16 - 18 cm	2	8435025932289	6196091
Droite	12 - 16 cm	1	8435025932258	6196079
	16 - 18 cm	2	8435025932265	6196116

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}

Attelle de cheville mousse



INDICATIONS : Traumatisme et entorse de cheville récente, Entorse tibio-tarsienne grave, Laxité chronique de la cheville.

CARACTÉRISTIQUES :

- Coussins amovibles en mousse à mémoire de forme,
- Anatomique, confortable, amortit les vibrations,
- Évidement malléolaire afin d'éviter tout point de pression sur les zones douloureuses.



TAILLE INDIVIDU	TAILLE	CODE RÉFÉRENT 13	ACL 7
< 160 cm	Petit	8435025902862	7165201
> 160 cm	Standard	8435025902879	7165218

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

Orliman® la marque d'orthopédie préférée des pharmaciens.

TAUX DE SATISFACTION
GLOBAL DE 97%*



*Merci !
pour votre
confiance.*



*Avec une note de 8.8/10 attribuée chez les clients référencant Orliman® comme marque majeure. Etude A+A, oct. 22.





Pour la France :



SERVICE CLIENT :
+33 (0)2 99 66 41 41

Distributeur : SM Europe/Orliman® - 20, La Herbetais - 35520 La Mézière - France
Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Fabricante/Fabricant:

ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana
Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)
Tel.: +34 96 272 57 04 - Fax: +34 96 275 87 00 · Export Tel.: +34 96 274 23 33
E-mail: orto@orliman.com · Export mail: export@orliman.com · www.orliman.com



Ce document est destiné aux professionnels de santé uniquement. Dispositifs médicaux de classe I selon le Règlement (UE) 2017/745.
Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant toute délivrance ou utilisation.

Crédits photos : SM Europe/Orliman®, Vincent Bauza, Studio Laudator, Fotolia®, iStock®, Thinkstock®.

Photos non contractuelles. Siret : 420574626 RCS Rennes. 250101_AT. CATGSM2025



Flashez-moi pour
retrouver toutes
nos vidéos 